

メンテナンスに関する変更のご案内

！販売終了のお知らせ

フリーアーム用除菌スプレー「パワーミスト2」および「フリーアーム掃除用キット」は、2026年4月末をもちまして販売を終了いたします。販売終了に伴い、今後のフリーアームのメンテナンス方法が変更となりますので、ご案内申し上げます。

従来のメンテナンス方法

フリーアーム外装の清掃・除菌



パワーミスト2を使用して清掃、又は柔らかい布に水か中性洗剤を少量含ませて軽く拭く

吸引管路内部の清掃・除菌



フリーアーム掃除用キットを（パワーミスト2・フリーアーム専用スポンジのセット）使用して清掃
※フリーアーム専用スポンジの販売は継続

2026年4月30日以降のメンテナンス方法

フリーアーム外装の清掃・除菌



グローブを装着した状態で、クリーニングシートを手に被せて拭く

吸引管路内部の清掃・除菌



クリーニングシートをスポンジブラシに被せて清掃



吸引口に装着し、スイッチオンすることで管路内の除菌

フリーアーム・バブライザー
製品詳細・使用方法動画はこちら



<https://x.gd/Pnxxo>

フリーアーム・クリーニングシート
製品詳細・使用方法動画はこちら



<https://x.gd/FLwjo>

パワーミスト2 からバブリライザーへ 切替えに関するご案内



見えないフリーアーム内部を除菌


Free Arm
Bubbrilizer フリーアーム・バブリライザー

フリーアームの先端に装着して、スイッチオンして帰るだけ。除菌効果のある成分を含んだガスをバブリングで発生させ、アーム先端からシャッタまでを除菌するフリーアーム用の装置です。



「パワーミスト2」は2026年4月30日をもって販売を終了いたします

バブリングとは？

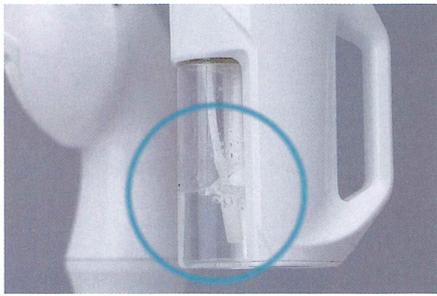


液体に空気を送り泡立てることで除菌ガスを発生させる仕組みです！

希釈したリキッドにポンプで空気を送り込んで泡立てることで気体を発生させ、除菌ガスがフリーアーム内部に広がります。

フリーアーム・シーテクト FI
除菌対象部



フリーアーム プラグイン型
除菌対象部

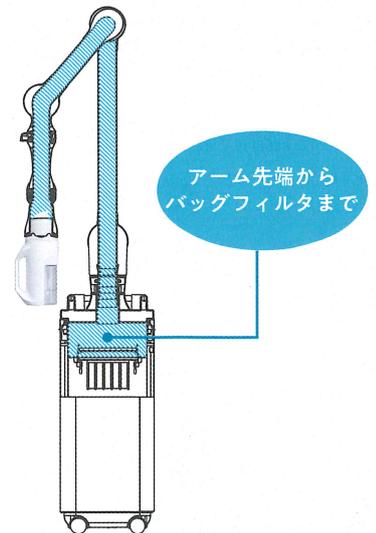

ご使用方法



ボトルに水道水 100mL を入れて、バブリライザーにセット。フリーアーム・バブリライザーリキッドを注入します。



フードを外して、バブリライザー本体を装着します。



スイッチを入れてバブリングスタート。15分後に自動で電源 OFF になります。



終業後に行う場合は、そのまま帰ってしまっても OK！毎日のルーティンにしてみてくださいのがおすすめです！

仕様・価格一覧

フリーアーム・バブリライザー

製品コード / JAN E250 / 04582539074753

標準医院価格 50,000 円 (税抜)*

付属品 アルカリ単3電池 ×4本

運転時間 15分

*本体購入初年度：1年分リキッド代4本分を含む
*翌年以降のリキッドはメンテナンスパック加入で4本(1年分・定価:20,000円)、メンテナンスパック非加入の場合は4本(1年分・定価:15,000円)をヤマトクール便で半年毎に2本分直送。

バブリライザー用リキッド (1本)

製品コード / JAN E252 / 04582539074777

標準医院価格 5,000 円 (税抜)

バブリライザー用リキッド (4本)

製品コード / JAN E255 / 04582539075200

標準医院価格 15,000 円 (税抜)

使用方法動画



アーム管路内・外装の清掃・除菌に


Free Arm Cleaning Sheet

フリーアーム・クリーニングシート

フリーアーム専用設計の除菌シート。外装はサッと拭き取り、アーム内部は専用スポンジにセットして使用することで、簡単に除菌と清掃が行えます。


ご使用方法

■ アーム管路内の清掃・除菌

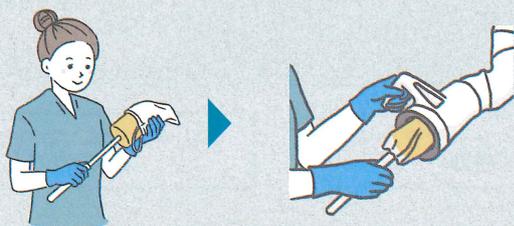

シートを袋から取り出し、スポンジブラシに被せて使用

■ 外装の清掃・除菌

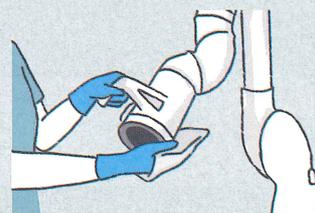

グローブを装着した手に被せて使用

使用前／使用後の比較



フリーアームって
実はこんなに
汚れているんだ！

※写真は清掃効果の一例です。使用環境や汚れの種類により、結果は異なります。

フリーアームのメンテナンス方法まとめ

フリーアーム・バブライザー

使用用途

アーム管路内の除菌

使用頻度

毎日（診療時間終了後がおすすめです）



フリーアーム・クリーニングシート

使用用途

アーム管路内（吸引口付近）の除菌・清掃

使用頻度

毎日（診療時間終了後や、スキマ時間がおすすめです）



仕様・価格一覧



フリーアーム・クリーニングシート

製品コード / JAN B850 / 04582539075453

標準医院価格 1,800 円（税抜）

内容量 30 枚入

成分 エタノール 70%、塩化ベンザルコニウム 0.05%

使用方法動画

