

# ALIGNER CONNECT アライナーコネク

## アタッチメント作製のためのレジン誕生

アライナーコネクは、マウスピース型矯正装置で使用するアタッチメント作製のためのレジンです。



通常販売価格：4,800円  
**特別価格**

### 歯科矯正用レジン材料 オルソリー アライナーコネク

色調●1色=ユニバーサル  
包装・価格●アライナーコネク2mL 1本、フィリングチップIII  
プラスチック3個、フィリングチップ用キャップ1個 =¥4,800  
管理医療機器 歯科矯正用レジン材料  
303AKBZX00054000

アタッチメント作製時の  
歯面処理はSEプライマー  
をご使用ください。




アライナーコネク  
使用ステップ



### 審美性

・広い色調をカバーするユニバーサル色

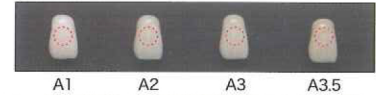


### 操作性

・形態を維持しつつ流れるチキソトロピー性を付与



### 耐摩耗性

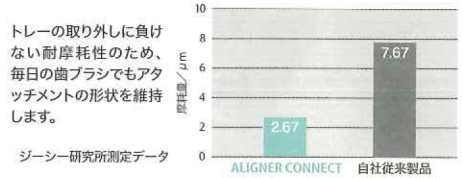

# SE PRIMER SEプライマー

高分子系プラケット接着材及び歯面調整材  
SEプライマー

通常販売価格：15,000円  
**特別価格**

管理医療機器：230AABZX00107000




## 「高い接着力」と「簡便性」を実現する3つの特長


- 特長 ①** MDP(リン酸エステル系モノマー) 配合によりエナメル質(ハイドロキシアパタイト)及びレジンと結合
- 特長 ②** 液垂れしにくいオリジナルボトルデザイン
- 特長 ③** 水洗不要! 強圧ブローのみで前処理が完了

### 特長 ① エナメル質・KommonBaseに高い接着力

エナメル、レジン、ステンレスの各被着体に対して20MPa以上のせん断接着強さを発揮

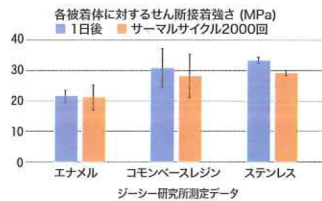

### 特長 ② 1滴ずつ採取しやすい細孔ノズル

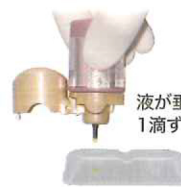

1本で約300滴使用可能!  
※約4,500歯分 (オルソリー調べ)

液が垂れることなく、1滴ずつ採取



液垂れによるノズル周りの汚れ低減

# IPR BUR IPRバー

## 矯正歯科におけるIPR(ディスクング)を精密かつ効率的に行うためのダイヤモンドバー

**アソート**

型番: T-Assort  
仕様: φ0.18mm/6mm (fff) 2本入  
φ0.28mm/6mm (fff) 2本入  
φ0.38mm/6mm (fff) 2本入 (1函)

通常販売価格: 6,500円  
**特別価格**  
※推奨回転数  
30万回転以下でご使用ください。

**φ0.18mm/6mm**

型番: T018-06  
仕様: φ0.18mm/6mm (fff)  
6本入(1函)  
中心径 0.3mm

通常販売価格: 6,500円  
**特別価格**  
※推奨回転数  
30万回転以下でご使用ください。

**φ0.28mm/6mm**

型番: T028-06  
仕様: φ0.28mm/6mm (fff)  
6本入(1函)  
中心径 0.4mm

通常販売価格: 6,500円  
**特別価格**  
※推奨回転数  
30万回転以下でご使用ください。

**φ0.38mm/6mm**

型番: T038-06  
仕様: φ0.38mm/6mm (fff)  
6本入(1函)  
中心径 0.5mm

通常販売価格: 6,500円  
**特別価格**  
※推奨回転数  
30万回転以下でご使用ください。

**φ0.5mm/6mm・7mm**

型番: P050-06 (φ 寸長6mm) P050-07 (φ 寸長7mm)  
仕様: φ0.5mm/6mm (fff)  
6本入(1函)  
φ0.5mm/7mm (fff)  
6本入(1函)

通常販売価格: 5,000円  
**特別価格**  
※推奨回転数  
10万回転以下でご使用ください。

<使用例>



製品情報

一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー  
13B3X00256000001

# TRANSCLEAR トランスクリア

歯科矯正用レジン材料  
オルソリー  
トランスクリアシート  
管理医療機器:222AABZX00170000



## Web Case Viewer



加工例

ウェブサイトにログインするとトランスクリアサービスにおける症例の確認・承認がいつでも、どこでも行えます。

1. 快適な装着感

2. 国内設計・製造

3. 3Dデータで設計確認

サービス名	内容
TC5	・ライナー5ステージまで ・セットアップ作製
TC10	・ライナー10ステージまで ・セットアップ作製
TC20	・ライナー20ステージまで ・セットアップ作製
TC30	・ライナー30ステージまで ・セットアップ作製

リテーナーサービス開始!

●お試し保定の1セット ●2年間保定できる4セット  
それぞれ片顎・両顎選べます。






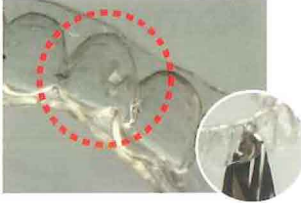
お問い合わせは、ジーシーオルソリーHPよりお願いいたします。 [www.gcortholy.com](http://www.gcortholy.com)

# TRANSCLEAR PLIER トランスクリア プライヤー



一般医療機器:13B1X00155000288  
歯科矯正用プライヤー  
トランスクリア プライヤー  
通常販売価格:18,000円  
**特別価格**

## アライナー治療をサポートする便利な専用プライヤー

 No.01 ボタンフォーミング	<p>圧下の補助に</p>  No.02 アンダーカットフォーミング	 No.03 リテンションフォーミング	 No.04 マルチインデンテーションフォーミング
	 <p>頬・舌側に作製した突起に エラスティックゴムをかけて圧下</p>	 <p>ローテーションさせたい歯の 隣接面に突起を作製し捻転改善</p>	

# UNIVERSAL BOND ユニバーサルボンド



管理医療機器: 223AABZX00073000

高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材  
ユニバーサルボンド  
スターターセット(クリア)  
包装●ボンディング2mL1本 エッチャント3.6mL1本  
通常販売価格: 12,800円 **特別価格**

「しなる」コンポジット系接着材! これ1本で様々な素材と強固に接着

しなる



ユニバーサルボンド


フィラーを低減している  
ためしなりやすい

しなりにくい



通常のコンポジットレジン  
(ジーシー社ユニフィルロー)

様々な素材と  
強固に接着

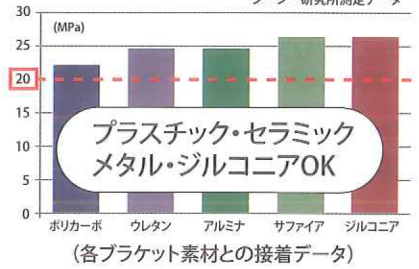

流動性に関しては二次元コードをご覧ください!

# UNIVERSAL BOND FLOW ユニバーサルボンドフロー



管理医療機器: 230AABZX00107000

○クリア ●ピンク ※用途に合わせてお選びいただけます。  
高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材  
ユニバーサルボンドフロー  
スターターセット  
包装●ボンディング2mL1本・SEプライマー1本  
通常販売価格: 23,000円 **特別価格**

Kommon Baseや  
インダイレクトボンディングに適した  
フローとシンプルな操作性を実現!  
ブラケットベース面で薄く  
拡がりやすい適度な流動性



Kommon Base



IDBS

エッチング不要! 前処理はSEプライマーのみ



歯面清掃

水洗・  
乾燥



SEプライマー塗布

強圧  
ブロー



ユニバーサルボンド塗布

余剰  
除去



光照射 LED10秒

# KommonBase RESIN コモンベースレジン



管理医療機器: 223AABZX00071000

歯科矯正用レジン材料  
コモンベースレジン  
色調 LV:クリア, ピンク HV:クリア  
包装●コモンベースレジン2.7g (2ml) 2本,  
フィリングチップIIIプラスチック4個,  
フィリングチップ用キャップ1個  
通常販売価格: 12,800円 **特別価格**

プライマー成分配合レジン! 様々な症例でご活用いただけます



使用例 ①

ワイヤーのストッパーとして




使用例 ②

チューブのカスタムベース



使用例 ③

3-3Fixリテーナー

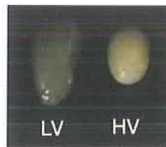

LV

HV

エクステンションなど  
薄く拡がる低粘度タイプのLV  
ポジショニングに最適な  
垂れない高粘度タイプのHV



ストッパーデモ動画



しなりデモ動画

# BAND PASTE バンドペースト




管理医療機器: 220AKBZX00105000

バンド用ガラスイオンマー系レジンセメント  
バンドペースト スターターセット  
包装●カートリッジ12.9g (7.2ml) 1本, ミキシングチップ10本  
通常販売価格: 9,800円 **特別価格**

① 光重合+化学重合  
による確かな硬化性!

光が届きにくい場所でも「化学重合」で硬化。  
光照射の有無により接着力のコントロールが可能

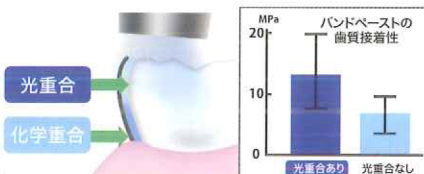

ジーシー研究所測定データ

② 垂れにくく薄く拡がる  
ペースト性状!

操作性に関しては  
二次元コードをご覧ください!



ペースト圧接前



ペースト圧接後

バンドの内面に塗布した後は、  
セットするまで垂れにくい適度  
なチキソトローピー性を実現!

圧接により薄く拡がる  
ため、細かい空隙にも  
入り込む!

## Dual Surface 採用による 歯肉粘膜に配慮した設計

※Dual Surface: 歯肉部と骨内部において、異なる表面性状

直径: Φ1.4mm

### Narrow

狭い箇所への  
アプローチに適した  
スリムタイプ

包装内容: 1函=2本入  
通常販売価格: 12,000円

**特別価格**



直径: Φ1.6/1.8mm

### Double Thread

硬い骨質に適した  
2条ネジタイプ  
(ホール付)

ダブルスレッド  
包装内容: 1函=2本入  
通常販売価格: 13,000円

**特別価格**



直径: Φ1.6/1.8mm


### Regular



歯科矯正用アンカースクリュー  
包装内容: 1函=2本入  
通常販売価格: 12,000円

**特別価格**

### 歯肉の厚みに合わせたラインナップ

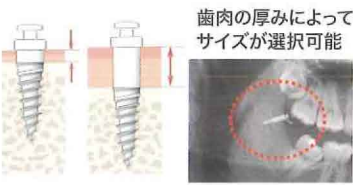

歯肉の厚みによって  
サイズが選択可能

歯肉の厚い白歯遠心や  
口蓋側にはロングネックタイプ

### 滅菌済みパッケージ

ガンマ線滅菌後出荷されるので、開封後  
そのまま使用可能



緩んだスクリューの急な埋入にも対応  
スクリュー滅菌の手間が不要

## ANCHOR SCREWS

直径	歯肉厚+骨内	全長	適応部位
Φ1.4mm	1+5mm	6mm	頬側
	1+6mm	7mm	頬側
Φ1.6mm	1+5mm	6mm	頬側/正中口蓋
	1+6mm	7mm	頬側/正中口蓋
	1+7mm	8mm	頬側
Φ1.8mm	2+6mm	8mm	頬側/口蓋側
	1+5mm	6mm	正中口蓋
	1+6mm	7mm	頬側/口蓋側
	1+7mm	8mm	頬側
	2+6mm	8mm	頬側/口蓋側
	3+6mm	9mm	口蓋側
ダブルスレッド Φ1.6mm	4+6mm	10mm	口蓋側/白後三角
	5+6mm	11mm	白後三角
	1+6mm	7mm	頬側
ダブルスレッド Φ1.8mm	1+7mm	8mm	頬側
	1+6mm	7mm	頬側/正中口蓋
	1+7mm	8mm	頬側

高度管理医療機器: 22400BZIO0013000

専用の注文用紙でご発注ください。

製品名	規格		数量
グラスボンド	スターターセット		
	カートリッジ(単品)		
バンドペースト	スターターセット		
	カートリッジ(単品)		
コモンベースレジン	LV	クリア	
		ピンク	
	HV	クリア	
マニキューパー	10個入り		
ユニバーサルボンド	スターターセット		
	ボンディング(単品)		
	エッチャント(単品)		
ユニバーサルボンド フロー	スターターセット	クリア	
		ピンク	
	ボンディング(単品)	クリア	
		ピンク	
SEプライマー(単品)			
アライナーコネクト	ユニバーサル		
ブランストーン	3kg×3箱		
トランスクリア プライヤー	No.1 ボタンフォーミング		
	No.2 アンダーカットフォーミング		
	No.3 リテンションフォーミング		
	No.4 マルチインデンテーションフォーミング		
IPRバー	IPR用 ダイヤモンドバー (6本入り)	Φ0.18mm/6mm	
		Φ0.28mm/6mm	
		Φ0.38mm/6mm	
		アソート	
		Φ0.5mm/6mm	
		Φ0.5mm/7mm	
デンタソニック IPRストリップ	ErgoStrip (4個入り)	ESM-40	
		ESM-60	
	ErgoStripSaw (4個入り)	ESS-1	
		ESS-15	

製品名	規格		数量	
インデューズ MS-II	Φ1.4mm	Φ1.4mm/1+5mm		
		Φ1.4mm/1+6mm		
	Φ1.6mm	Φ1.6mm/1+5mm		
		Φ1.6mm/1+6mm		
		Φ1.6mm/1+7mm		
		Φ1.6mm/2+6mm		
	Φ1.8mm	Φ1.8mm/1+5mm		
		Φ1.8mm/1+6mm		
		Φ1.8mm/1+7mm		
		Φ1.8mm/2+6mm		
		Φ1.8mm/3+6mm		
		Φ1.8mm/4+6mm		
	Φ1.6mm (ダブルスレッド)	Φ1.6mm/1+6mm		
		Φ1.6mm/1+7mm		
	Φ1.8mm (ダブルスレッド)	Φ1.8mm/1+6mm		
		Φ1.8mm/1+7mm		
	インストル メント	ハンドドライバー-L		
		ハンドドライバー-S		
		ハンドドライバーチップL		
		ハンドドライバーチップS		
エンジンドライバーチップL				
エンジンドライバーチップS				
パイロット ドリル	インストルメントボックス			
	ハンド用			
	エンジン用S			
		エンジン用L		

その他	
-----	--

貴医院名		Tel
ご住所	〒	

■セミナーのお申し込みは、ジーシーオルソリーHPよりお願いいたします。 [www.gcortholy.com](http://www.gcortholy.com)

株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原1-19-5 03-3625-3111  
 大阪支店：〒666-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-3-9 06-6643-0085  
 北海道営業所：〒001-0016 北海道札幌市北区北16条西5-9-18 011-716-7001  
 九州営業所：〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂4-16-22 092-436-2288

※本紙記載の通常販売価格はジーシーオルソリーの販売価格です。  
 また、価格には消費税は含まれておりません。

ご用命は

--