

YOSHIDA

ヘムコン デンタルドレッシング®

HemCon® Dental Dressing

ご愛顧感謝キャンペーン



キャンペーン期間：2024年9月21日～11月20日

「ヘムコン デンタルドレッシング」の特別キャンペーンです。
部位に応じて使い分け可能な2サイズご用意しています。

10mm×12mm

×5枚

標準価格
11,000円(税別)

特別価格

例えば…
抜歯窩に

25mm×70mm

×5枚

標準価格
18,000円(税別)

特別価格

例えば…
遊離歯肉
採取部位に

販売名：ヘムコン デンタルドレッシング 一般的名称：綿状パッド 届出番号：13B1X00066000007

コードNo.	商品名	注文数
497157	ヘムコン デンタルドレッシング 10mm×12mm×5枚	
497171	ヘムコン デンタルドレッシング 25mm×70mm×5枚	

取扱店

貴歯科医院名

ご住所

TEL () FAX ()

ご提供いただきました個人情報につきましては、弊社事業に関連する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネット ホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

販売元 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(コンタクトセンター)



(01)02747937021958

C02625/2024年9月/@1/新

ヘムコン デンタルドレッシング® HemCon® Dental Dressing

医療用品 4 整形用品

一般医療機器 綿状パッド 32572000

届出番号：13B1X00066000007

禁忌・禁止

- 1.再使用禁止。 [本品はガンマ線滅菌済のディスポーザブル製品であるため。]
- 2.再滅菌禁止。 [医療現場での再滅菌を想定していないため。]

特徴

1. キトサンを使用した製品です。
2. 素早い止血効果が得られ、効果が持続します。
3. 生体中の凝固線溶系因子を介さずに止血効果を発揮し、自然な凝血塊の形成を促します。
4. 出血面の範囲や出血の程度により、2種類のサイズ
(10mm×12mm 厚さ:3.5mm、25mm×70mm 厚さ:1.15mm)から製品を選べます。
5. ISO10993に基づく生物学的安全性を検証しています。
6. 滅菌済みのため、必要な時にすぐ使えます。

作用機序


- ◎キトサンはプラスに帯電していて、出血面に適応すると、マイナスに帯電した血液中の赤血球と血小板を引き付けます。
- ◎ヘムコンデンタルドレッシングはこの電荷特性により速やかに傷口を塞ぎ、止血効果を発揮します。
- ◎その後、生体内では血小板凝集反応により凝血塊が形成されます。
- ◎ヘムコンデンタルドレッシングは出血面において、出血口の血栓を強化します。



使用目的

口腔内止血のために、手術等に使用する。また、一時的に口腔粘膜組織を保護する。

使用方法

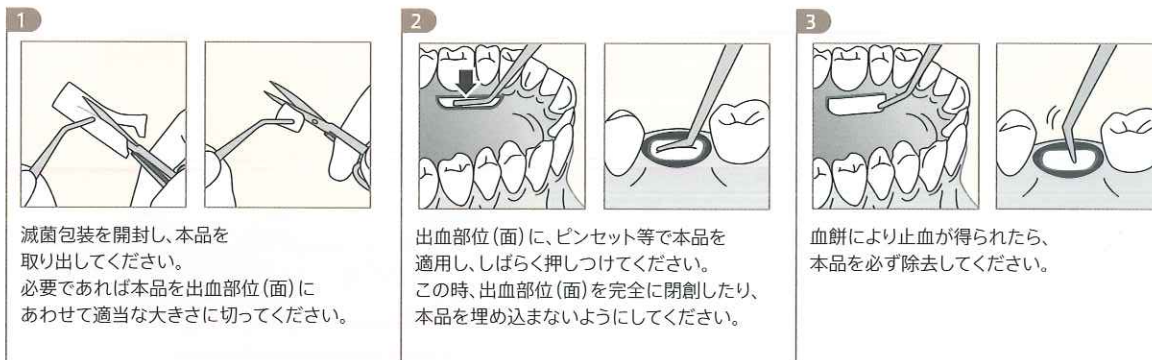

1
滅菌包装を開封し、本品を取り出してください。
必要であれば本品を出血部位(面)にあわせて適当な大きさに切ってください。

2
出血部位(面)に、ピンセット等で本品を適用し、しばらく押しつけてください。
この時、出血部位(面)を完全に閉創したり、本品を埋め込まないようにしてください。

3
血餅により止血が得られたら、本品を必ず除去してください。

使用上の注意

- ◎本品を留置したまま縫合しないこと。
- ◎本品使用中に過敏症状が現れた場合には使用を中止し、適切な治療を行うこと。

保管方法

室温で保管すること。



発売元



ゼリア商事株式会社

製造販売元



ゼリア新薬工業株式会社

製造元



お問い合わせ・資料請求先