

フロークリーナー + オロカップ

キャンペーン



1000セット限定

酸性



DÜRR DENTAL

【キャンペーン期間】

2025年4月21日～2025年6月20日

MD555 (フロークリーナー) とは？

吸引システムとユニット内の配管や分離器の洗浄に使用します。歯面清掃やパウダーやペースト、配管内の沈着物、固着物に効果を発揮しつまりを防止します。



オロカップとは？

MD555フロークリーナーの希釈液を一度に2台分(2L)作製しバキュームホース内のお手入れが手軽にできる専用容器です。差し込み口の特殊構造により、容器内の希釈液と空気を混ぜながら吸引できるため、洗浄効果がさらに高まります。



使用方法 週2回フロークリーナーのご使用で配管内の徹底洗浄をお勧めします。

※バイオクリーンは、フロークリーナー使用後4時間以上あけてご使用ください。 ※強力洗浄液のため下記の使い方に従ってお使いください。

Step 1 下洗いの水吸引



より高い効果を得るため、洗浄作業前に各ユニットで2ℓの水を吸引させます。

Step 2 希釈液を作製



オロカップのキャップを外して、水と濃縮液を入れます。キャップを戻し、オロカップを左右に少し振って混ぜてください。

●希釈液の作り方

	水	
1台	1L	2½杯
2台	2L	5杯

Step 3 希釈液を吸引



バキュームと排唾管のハンドピースをオロカップに差し込み、各ユニットに希釈液1ℓずつを吸引させます。

Step 4 注入



スピット下の配管には希釈液を作製し250ml以上流してください。

Step 5 作用時間



酸性薬液のため30分～120分以内に必ずSTEP6を行ってください。

Step 6 仕上の水吸引



ユニット1台につき水2ℓを吸引させてください。スピットボウル下の配管にも水を1ℓ以上流してください。

限定数に達した段階でキャンペーンは終了させていただきます。キャンペーンの詳細・価格はお取引歯科ディーラー様までお問い合わせください。

必要事項(全て必須)をご記入いただき、お取引歯科ディーラー様または最寄りの(株)ヨシダ営業所までお申込みください。

MD555フロークリーナー1L+オロカップ キャンペーン	
貴病院名	
ご住所	
TEL	FAX

コードNO.	商品名	価格	注文数
457675	MD555 (フロークリーナー) 1L +オロカップ	¥	

〈発売元〉 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9
ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ: 0800-170-5541

■お取引ディーラー名

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関連する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。



吸引システムの洗浄除菌

バイオクリーン

デンタルチェアの吸引システムや分離器の
除菌、脱臭、洗浄とメンテナンスが同時にできます

アルカリ性


特徴

- アルデヒド、フェノール、塩素非含有で、材質と環境にやさしい洗浄除菌液です。
- ご使用の際は、専用容器「オロカップ」で希釈液を作ります（ユニット1台に対して水1Lにキャップ1杯）。ユニットのホースを「オロカップ」に差し込んで吸引させます。
- 無発泡性で、セパレーター付きのユニットにも対応可能。

ユニット内部のメンテナンス

血液や歯科材料、切削片などでユニット内部は汚染されます。この汚れは、バキュームハンドピース、ホース、分離器の機能を損なうため、定期的なメンテナンス（除菌、消臭、洗浄）が必須となります。

➡ 各デンタルユニットに毎日1～2回「バイオクリーン」を吸引させて、バキュームハンドピース、ホース、分離器等のユニット排水回路を洗浄します。

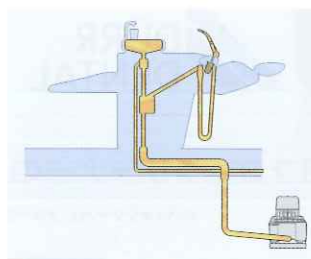

ユニット内部 模式図



バイオクリーン未使用の排水トラップ内部

吸引システムの洗浄除菌

各デンタルユニットに毎日1～2回のご使用をお勧めします。

Step 1 下洗いの水吸引



より高い効果を得るため、洗浄除菌作業前に各ユニットに2ℓの水を吸引させます。

Step 2 希釈液を作製



オロカップのキャップを外して、水と濃縮液を入れます。キャップを戻し、オロカップを左右に少し振って混ぜてください。



● 希釈液の作り方

	水	濃縮液
1台	1L	1杯
2台	2L	2杯

Step 3 希釈液を吸引



バキュームと排唾管のハンドピースをオロカップに差し込み、各ユニットに希釈液1ℓずつを吸引させます。

Step 4 注入



スピット下の配管には希釈液を作成し、250ml以上流してください。

Step 5 作用時間



次回の診療時に、Step6を行っても構いません。

Step 6 仕上げの水吸引



ユニット1台につき水2ℓを吸引させてください。スピットボウル下の配管にも水を1ℓ以上流してください。



MD555フロークリーナー
×
オロカップ
使用方法動画



バイオクリーン
×
オロカップ
使用方法動画

バイオクリーン 容量1L濃縮液（商品コード：471333） 標準価格7,000円（税別）
バイオクリーン 容量1L濃縮液6本入セット（商品コード：435675） 標準価格39,000円（税別）
オロカップ吸引ボトル（商品コード：437007） 標準価格8,150円（税別）

●販売元/株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9 ●価格は2025年4月現在の税別価格です。

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは



株式会社ヨシダ コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00
（日曜・祝祭日を除く）