

YOSHIDA

ドイツ生まれのDMG社製品が
特別プライスで購入できるチャンス!

DMG CAMPAIGN

裏層治療 と 支台歯形成 に!

キャンペーン期間

2025 5/21 水

2025 7/18 金

歯科裏層用高分子系材料

Ionosit Baseline



Point

1 グラスアイオノマーだから

前処理なく歯質に強固な接着、
かつ高い生体親和性

Point

2 コンポジットだから

裏層材としての十分な強度

Point

3 シリンジタイプだから

練和不要で操作時間を短縮、
窩洞に直接充填

販売名：アイオノジット ベースライナー
一般名称：歯科裏層用高分子系材料
認証番号：220AKBZX00085000(管理)
製造販売元：(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9 ●製造元：DMG社

歯科用支台築造材料

LuxaCore Z Dual



Point

1 ジルコニア含有だから

優れた物性をもち、
歯根破折のリスクを軽減

DMG社従来品より性能UP!

圧縮強度
380
Mpa

曲げ強度
150
Mpa

Point

2 適度な流動性だから

根管内填入しやすく、
コアの築造時はタレにくい



Point

3 デュアルキュアタイプだから

練硬化時間をコントロールしやすく、
作業時間も短縮

販売名：ルクサコア Z-デュアル
一般名称：歯科用支台築造材料
認証番号：222AKBZX00026000(管理)
製造販売元：(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9 ●製造元：DMG社

必要事項(全て必須)をご記入いただき、お取引歯科ディーラー様または最寄りの(株)ヨシダ営業所までお申込みください。

Ionosit Baseline



コード	商品名	特別価格	数量
390899	アイオノジットベースライナー スタンダードシリンジ 6本入	¥	
390900	アイオノジットベースライナー スタンダードシリンジ 2本入	¥	
723599	アイオノジットベースライナー (0.3g×20本入)	¥	
724007	アイオノジットベースライナー (0.3g×6本入)	¥	

LuxaCore Z Dual



コード	商品名	特別価格	数量
686738	ルクサコア Z-デュアル A3	¥	
686745	ルクサコア Z-デュアル ブルー	¥	
686752	ルクサコア Z-デュアル ライトオパーク	¥	

クラウン ブリッジ インプラント 義歯 治療に!

付加重合型シリコン印象材

Honigum Pro

限定

600個

販売名：ハニガムプロ
 一般的名称：歯科用シリコン印象材
 認証番号：302AKBZX00055000(管理)
 製造販売元：(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9 ●製造元：DMG社

限定数に達した段階でキャンペーンは終了させていただきます。キャンペーンの詳細・価格等はお取引歯科ディーラー様までお問い合わせください。

製品説明動画



Point

1 高い流動性



ハニガムプロ ライトは高い流動性があり、歯肉溝内深くまで入り込みます。

Point

2 ちぎれにくいタフさ



口腔内からの撤去時もマージン部がちぎれにくい。ため、より精度の高い作業模型と補綴物の作製が可能です。

Point

3 馴染みの良さ



インジェクションとトレータイプの馴染みが良いので、印象面に段差が生じにくく、そのため適合の良い補綴物を作製することが可能になります。

テクニカルデータ

Honigum Pro	Light		Mono				Heavy				Putty
	Fast		Fast		Fast		Fast		Fast		Soft
ml	50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	450
練和時間(分)											0:30
口腔内操作時間(分)	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30					
最大口腔外操作時間(分)	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 3:15
口腔内での硬化時間(分)	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15
寸法変化[24時間後](%)	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5
圧縮永久ひずみ(%)	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
ショアA硬度	= 48	= 48	= 56	= 56	= 56	= 56	= 68	= 68	= 68	= 68	= 62
圧縮ひずみ(%)	= 4,0	= 4,0	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 1,8	= 1,8	= 2,0	= 2,0	= 2,2
色調											

※数値はDMG社内部測定値です。データはDMG社内部に保存されています。

必要事項(全て必須)をご記入いただき、お取引歯科ディーラー様または最寄りの(株)ヨシダ営業所までお申込みください。

ヨシダコード	商品名	価格
409214	ハニガムプロ ライトボディ 50ml×2本	¥
409239	ハニガムプロ モノボディ 50ml×2本	¥
409246	ハニガムプロ ヘビーボディ 50ml×2本	¥
457903	ハニガムプロ モノボディ 380mlカートリッジ×1本	¥
457892	ハニガムプロ ヘビーボディ 380mlカートリッジ×1本	¥
409253	ハニガムプロ パテソフト ベース/キャタリスト各450ml	¥

ヨシダコード	商品名	価格
445371	ハニガムプロ ファスト ライトボディ 50ml×2本	¥
445388	ハニガムプロ ファスト モノボディ 50ml×2本	¥
445395	ハニガムプロ ファスト ヘビーボディ 50ml×2本	¥
445406	ハニガムプロ ファスト モノボディ 380ml×カートリッジ×1本	¥
445413	ハニガムプロ ファスト ヘビーボディ 380ml×カートリッジ×1本	¥