

マルチに対応できるしなやか系接着充填材

ボンドフィルSB®II 接着充填キャンペーン

期間
2025年
8月21日～
9月19日
数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。

このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「ボンドフィルSBII 接着充填キャンペーン」を企画いたしました。

期間中、「ボンドフィルSBII」のセットと単品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。



ボンドフィルSB®II セット

標準価格 27,000円 204610850

液材	1本(8mL)
キャタリストV	1本(0.7mL)
粉材(マルチ)	1本(3g)
粉材(オペーシャス)	1本(3g)
ディースプライマー	1本(3mL)
スポンジ(LS)	1箱
ダッペンスタンド(3穴)	1個
ディスポチップカップ	20枚
ディスポチップ(曲)	1本
ディスポチップ並列(ピンク)	1ケース(10本入り)
ディスポチップ並列LL(紫)	1ケース(10本入り)

ご注文数

個

高い接着性と良好な封鎖性

「スーパーボンド®」の重合機構を応用した充填材

「柔軟性を併せ持った接着充填材の有効活用術～
『ボンドフィルSB®II』の特性を活かした臨床～」
鹿児島大学 村口 浩一先生 南 弘之先生

デンタルマガジン191号掲載記事はこちらから▶



『歯科充填用材料I(光重合型複合レジン)』が適用!

充填用材料(1窩洞につき)	単純	複雑
歯科充填用材料I 光重合型複合レジン (複合レジン系)	11	29

「ボンドフィルSBII」は充填での使用用途において、『歯科充填用材料I(光重合型複合レジン)』の保険適用が可能です。
粉材の改良により筆塗りでの操作性が向上し、複雑窩洞や隅角部へも充填しやすくなりました。

粉材はシェードの選択が不要!

充填前




マルチ
(厚さ1mm)



「マルチ」は様々な歯冠色に対応します。
白歯部・前歯部・くさび状欠損など1色で充填できます。



オペーシャス
(厚さ1mm)

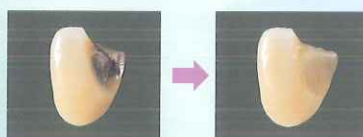

「オペーシャス」は金属遮蔽性があります。
前装冠のリペアや着色歯の充填に便利です。



液材

8mL 標準価格 6,600円
204610852

ご注文数

個



粉材(マルチ)

3g 標準価格 2,850円
204610853

ご注文数

個



粉材(オペーシャス)

3g 標準価格 2,850円
204610854

ご注文数

個

セットと単品を特別価格にてご提供!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。
●掲載商品の標準価格は2025年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

●ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。
●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

短い硬化待ち時間

「ボンドフィルSBI」は硬化待ち時間が短いので、充填後の即日研磨も容易になり、チェアタイムの短縮が可能になりました。

硬化待ち時間



※LED照射器 (光量1,000mW/cm²以上) の場合

高い接着性

「スーパーボンド」の重合機構を応用した充填材です。「キャタリストV」の成分である「TBB」の働きにより、水分や空気と反応し高い接着性と辺縁封鎖性を発揮します。

微小引張接着強さ (MPa)


適用部位	歯面処理材	ボンドフィルSBI	
		照射あり	照射なし
エナメル質	ティースプライマー	25	25
象牙質	ティースプライマー	42	48

※ヒト歯に対する接着強さ (37℃24hr水中浸漬後)
(サンメディカル社試験による)

しなやかな硬化体特性

複雑な応力が加わる部位への適用においても、適度な柔軟性により、充填物の脱離や破折を防ぎます。

3点曲げ試験

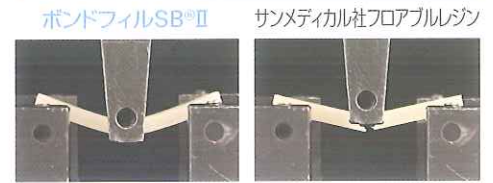

「ボンドフィルSBI」は従来のコンポジットレジンよりも柔軟性に優れた特性を持っています。

こんな症例にお困りではありませんか？

くさび状欠損部の充填

側方咬合圧が加わる歯頸部の充填には、適度な柔軟性がある「ボンドフィルSBI」を使用することで、脱離や破折を防ぎます。



54| くさび状欠損



形成後、「ティースプライマー」にて前処理



「ボンドフィルSBI(マルチ)」を充填



硬化後、形態修正・研磨

切端咬耗部の充填

咬合によって強い応力が集中する切端部の充填には、高い接着性と適度な柔軟性がある「ボンドフィルSBI」を使用することで、チッピングを防ぎます。



321|123 の切端咬耗



「ティースプライマー」にて前処理



「ボンドフィルSBI(マルチ)」を充填



硬化後、咬合調整・研磨

前装部のリペア

金属や陶材、硬質レジンが混在する前装部破折の修復には、高い接着性と適度な柔軟性がある「ボンドフィルSBI」が適しています。



6| 硬質レジン前装部の破折



アルミナサンドブラスト処理後
「M&Cプライマー」にて前処理



「ボンドフィルSBI(オーバーパス、マルチ)」を積層充填し、照射



硬化後、形態修正・研磨

●販売名 ボンドフィルSBI ●一般名 歯科充填用アクリル系レジン ●医療機器登録番号 305AKBX00045000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)
●販売名 ティースプライマー ●一般名 歯面処理材 ●医療機器登録番号 222AFBX00100000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

■「ボンドフィルSBI」はサンメディカル株式会社の登録商標です。
■「ティースプライマー」はサンメディカル株式会社の商標です。

製造販売 サンメディカル株式会社
滋賀県守山市古高町 571-2 〒524-0044

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020 (フリーコール)
＜歯科医療従事者様専用＞

www.dental-plaza.com