

トクヤマ マルチシャイン

新発売キャンペーン

期間 2025.9/22(月)~12/19(金)

キャンペーン内容

トクヤマ マルチシャイン
(32錠)×6箱

標準医院価格3,300円

患者様用リーフレット
(1錠封入)×10ディスプレイ用
のぼり×1ディスプレイ用
リーフレットスタンド×1

ディスプレイイメージ



上記セットを特別価格にてご提供!

※特別価格については、お届け歯科商店様にお問い合わせください。

※価格は2025年9月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」にしたがって厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス ☎ 0120-54-1182

本 社 〒110-0016 東京都台東区東1-38-9

[受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00] (土日祝日を除く)

トクヤマ マルチシャイン キャンペーン [20707]

お届け歯科医院名


WEBにもいろいろ情報載っています▶

トクヤマデンタル



トクヤマ マルチシャイン


はマルチにご使用
いただける洗浄剤です。

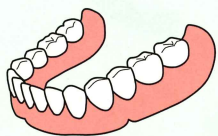


総義歯



部分床義歯

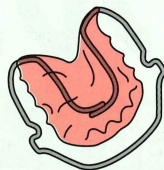

矯正用リテーナー

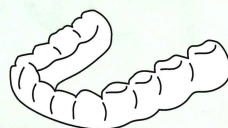

マウスガードなど

硬質裏装材トクヤマ リベースシリーズ/軟質裏装材ソフリライナーシリーズで裏装された義歯の洗浄にも使用可能

トクヤマ マルチシャインの特長

洗浄効果を高める、きめ細かな泡立ち

きめ細かな泡立ちで、洗浄力を強化。



汚れを素早く、しっかり洗浄

浸漬時間5分でしっかり洗浄。

就寝中のつけおき洗浄も可能で、生活スタイルに合わせて洗浄時間が選べます。

※全ての菌を除菌できるわけではありません



除菌率
99.99%



食事を邪魔しない控えめな香りづけ

洗浄直後でも食事の邪魔をしない控えめな香りを採用。



使用方法

1



150~200mL程度の水に1錠
入れてください。

ぬるま湯(40℃程度)がより効果的です。

2



マウスガード、リテーナー等にも使える!

すぐに入れ歯全体を浸してください。

洗浄時間は5分程度です。

1晩程度であれば漬け置きも可能です。

ひどい汚れは浸漬後にスポンジなどで軽くこするとより効果的です。

3



洗浄後は水でよくすすいで
ください。

残った洗浄液は捨ててください。



歯科医療機関専売品

入れ歯洗浄剤

トクヤマ マルチシャイン

- 用途: 入れ歯、矯正用リテーナー、マウスガードの洗浄
- 液性: 中性 ■ 内容量: 6箱(1箱: 2.8g×32錠)
- 標準医院価格: ¥3,300(税抜) ※1箱単価 ¥550(税抜)
- 希望患者価格: ¥700(税抜)/1箱