

エステライトユニバーサルフロー 新規導入キャンペーン

Tokuyama
Global Hit!!!!
2025 数量限定
10/1 水
12/19 金

世界各国でご愛用いただいている、トクヤマデンタルのコンポジットレジンを是非お試しください！

Medium A3



適度な流動性で、
汎用的に使える



エステライトユニバーサルフロー ミディウム A3
1.8mL (3.0g) 標準医院価格 ¥4,700

Super Low A3



流動性を抑え、
付形性に優れる



エステライトユニバーサルフロー スーパーロー A3
1.8mL (3.0g) 標準医院価格 ¥4,700


※1) 0.1g 37℃ 2分間静置（水平） ※2) 0.03g 37℃ 1分間静置（垂直）

上記組み合わせを **特別価格** でご提供

※特別価格につきましては、お届け歯科商店様へお問い合わせください。

限定
ガイド
付き

A3シェードで幅広い色調に適応

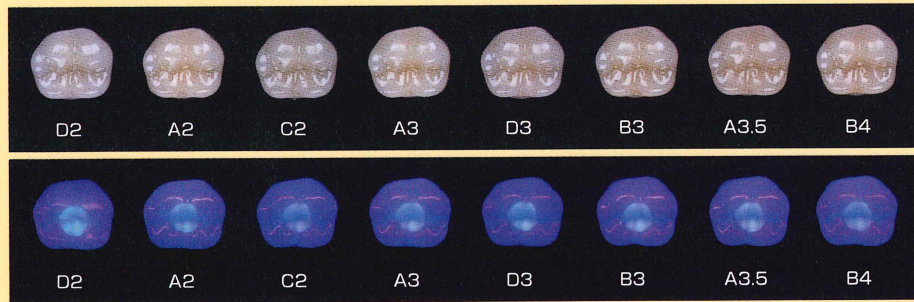

（ブラックライト照射にて充填箇所を確認）

エステライトユニバーサルフロー シェード対応表

色調	白濁	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	B3	B4
Super Low/A3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Medium/A3	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1) 0.1g 37℃ 2分間静置（水平） ※2) 0.03g 37℃ 1分間静置（垂直）

その他のシェードも、
幅広い色調適合性あり！
詳しくはこちらより➡



エステライトユニバーサルフロー 歯科充填用コンポジットレジン（管理医療機器）認証番号228AFBZX00080000

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。※価格は2025年9月現在の標準医院価格です。※消費税は含まれておりません。※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

エステライトユニバーサルフロー 新規導入キャンペーン 注文書

貴歯科医院名

お名前

エステライトユニバーサルフロー
キャンペーン

[キャンペーンコード：13743]

セット

ご住所 〒

お届け歯科商店名

TEL

()

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00（土日祝日を除く）

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

●札幌TEL011-812-5690 ●仙台TEL022-717-6444 ●東京TEL03-3835-7201 ●名古屋TEL052-932-6851 ●大阪TEL06-6386-0700 ●福岡TEL092-412-3240

ESTELITE UNIVERSAL FLOW 徹底解剖 —色調適合性の原理—


高光拡散性

Q どうして色が合うの？


A 光拡散性の技術を応用することで色調適合性を高めています。
コンポジットレジンの中で光が拡散するため、窩洞のマージンラインが見えにくく、周囲の歯質と色がよくなじみます。

光の反射・拡散のイメージ

正反射

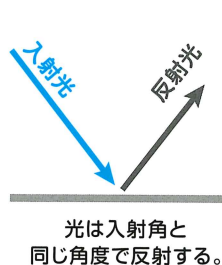


拡散反射

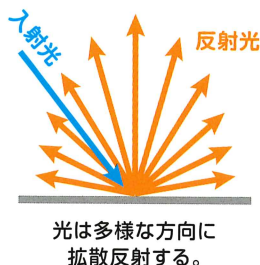


コンポジットレジンにおける光拡散性のイメージ

光拡散性が低いCR

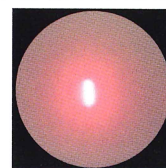

レーザー光の輪郭がはっきり見える

光拡散性が高いCR

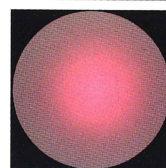


レーザー光の輪郭がぼやけて見える

※厚み0.3mmの硬化体にレーザー光をあて、反対側から観察した様子




フィラー構成

独自の技術により、フィラーを一から生成。粒径・組成のコントロールを可能に。

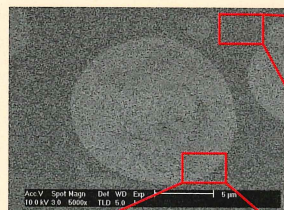

スーパナノ球状フィラー

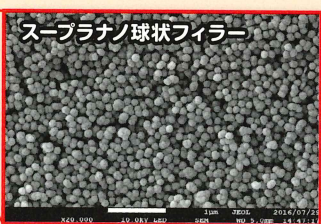


有機無機複合フィラー (スーパナノ球状フィラー配合)



直径200nmのスーパナノ球状フィラーと該球状フィラーを用いた有機無機複合フィラーで構成。
この両者のフィラーを組み合わせることにより、操作性(押し出し感、ペーストの切れ)及び審美性(色調適合性、研磨性)に優れたペーストを実現。

高いフィラー充填率と微細な球状粒子により、高強度と光沢の持続性を両立しました。

■摩耗後の表面性状の違い

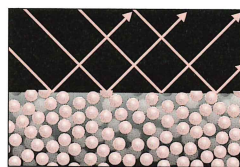

エステライトユニバーサルフローの表面 (イメージ)

優れた耐摩耗性と平滑な摩耗面により長期間光沢を持続します。



粉砕フィラー型マテリアルの表面 (イメージ)

鋭角部を持つフィラーの露出や脱落により、光沢が失われやすくなります。

臨床例



1術前



2ボンディング処理、充填 (Medium A3)



3仕上げ、研磨、完成

[写真提供] 東京都台東区 大谷歯科クリニック 大谷一紀先生



1術前



2ボンディング処理、充填 (Super Low A2)



3仕上げ、研磨、完成

[写真提供] 東京都 日本大学歯学部教授 宮崎真至先生

色調 [Super Low : 全6色 Medium : 全12色 High : 全7色]

	CE	BW	A1	A2	A3	A3.5	A4	A5	B3	OPA2	OPA3	OPA4
Super Low			●	●	●	●	●	●				
Medium	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
High			●	●	●	●				●	●	●

フロー性は3種類

Super Low



水平

垂直

Medium



水平

垂直

High



水平

垂直

標準医院価格 各 ¥4,700/1本 [3本パック] A2, A3 各 ¥12,300/3本