

ヒューフレディ 矯正キャンペーン!

対象期間: 2025. 10/21(火) ▶ 12/19(金)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

日頃のご愛顧に感謝し、矯正製品のキャンペーンを開催いたします。

この期間中は、対象製品を**特別価格**にてご提供いたします。

是非ご活用ください。

ワイヤー
ベンディング
コンテスト
開催決定!!

※詳細は裏面をご覧ください

製品の特徴

Production of Precision 厳密な生産

ひとつの製品を仕上げる為、ヒューフレディグループ製矯正製品は30種類以上の工程が施されます。

Immunity Steel™ Alloy イミューニティスチール

ヒューフレディグループが独自の製法で開発したイミューニティスチールは、クロムとカーボンを主成分とする合金の鍛造仕上げなので耐久性が強く、オートクレーブにも対応しています。

Orbit Joint オービットジョイント

刃の先端のズレやジョイントのがたつきがなく、スムーズなカッティングアクションが持続する特殊製法です。※定期的にジョイント部に潤滑剤を挿してください。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC


※上記製品左から678-702、678-500、678-800、678-502

掲載製品 ● カッター ● ユーティリティプライヤー ● ワイヤーフォーミングプライヤー ● クリアコレクション

【販売名/一般名称/医療機器届出番号】 ■ プライヤー/歯科矯正用プライヤー/13B3X10195G12101 ■ プライヤー(緩衝材付)/歯科矯正用プライヤー/13B3X10195G12102 ■ リンガルプライヤー/歯科矯正用プライヤー/13B3X10195G12103

● 医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)【商標について】 以下はヒューフレディグループまたはその関連会社の商標です: HU-FRIEDY, Immunity Steel

カッター

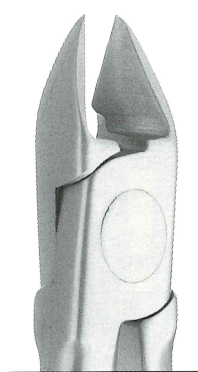


スリム

スリムマイクロカッター ★

678-500 25,200円

くりぬかれた形状のヘッドは従来品(678-110)と比べ13%スリムになり、より容易にエラスティック除去が可能。
【切断許容径】.008"-.012"

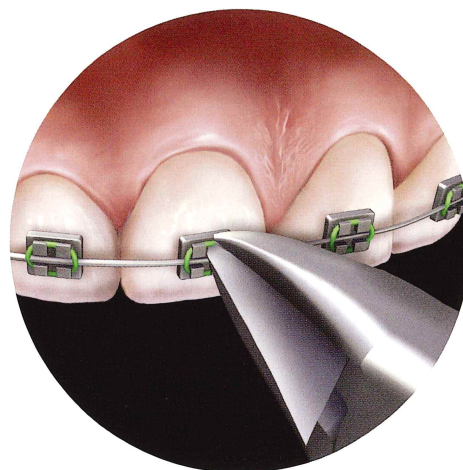

エラスティック切断の唇側面観




オービットジョイントにより
カッターの刃先がしっかりと合い、
ジョイント誤差を抑え
高い機能性とスムーズな
開閉動作が持続します。



マイクロカッター

678-110 25,200円


コンパクトな作業部が特徴
【切断許容径】-.012"

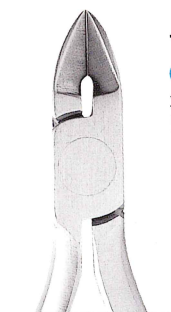

ハードワイヤーカッター 15°

678-103 25,200円


オフセット15°で届きにくい部位
でも容易に切断が可能
【切断許容径】-.022" x .028"

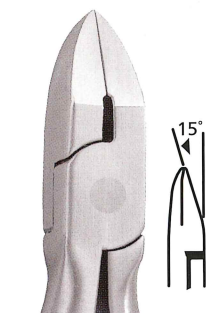

マイクロミニピン& リガチャーカッター 15°

678-109 25,200円


オフセット15°スリムカッター
【切断許容径】-.012"

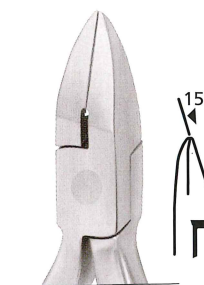

マイクロミニピン& リガチャーカッター ★

678-107 25,200円


スリムタイプで狭いエリアでの
作業が容易
【切断許容径】-.012"

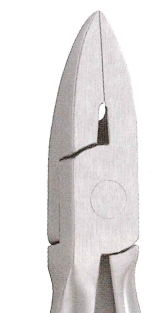

マイクロミニピン& リガチャーカッター ロング

678-107L 25,200円

スリムタイプで狭いエリアでの
作業が容易
【切断許容径】-.012"
※678-107の長ハンドルタイプです。

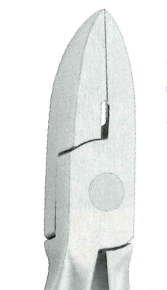

ミニピン&リガチャーカッター

678-106 25,200円

スリムタイプのピンカッター
【切断許容径】-.012"



ピン&リガチャーカッター

678-105 25,200円


【切断許容径】-.015"





スリムディスタルエンドカッター
フラッシュカット&ホールド

678-113 30,500円

従来品(678-111)よりヘッドが50%スリムになり、
カットポイントが見やすく、より優れた操作性を発揮。
切断されたワイヤーを把持するホールドタイプで、
ロールワッヂやガーゼ等を使用せずフラッシュカットが可能。
【切断許容径】.012"-.021" x .025"
シリコンインサート×3入
(カッター装着分を含む)

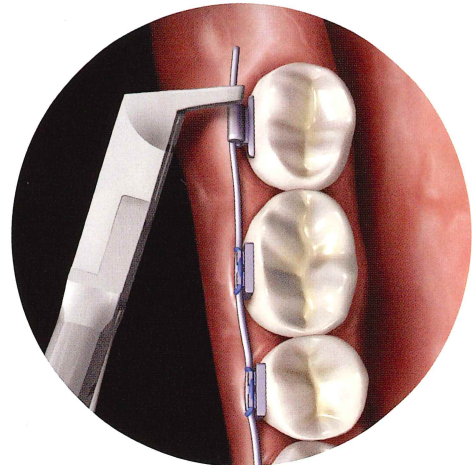


バックルチューブ内に挿入された
アーチワイヤーを切断している咬合面観

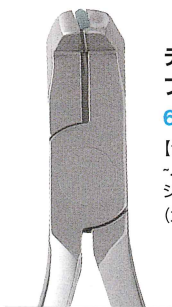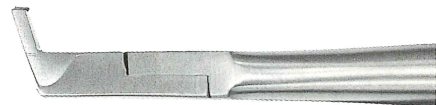

ディスタルエンドカッター
フラッシュカット&ホールド

678-111 30,500円

【切断許容径】
-.020" ホールド/- .030" 切断
シリコンインサート×3入
(カッター装着分を含む)

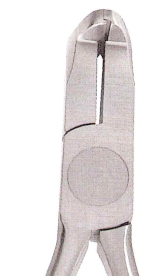

ユニバーサルディスタルエンド
カッター ホールド ★

678-101 25,200円

【切断許容径】.012"-.021" x .025"

ユニバーサルディスタルエンド
カッター ホールド ロング

678-101L 25,200円

【切断許容径】.012"-.021" x .025"
※678-101の長ハンドルタイプです。



ディスタルエンドカッター
フラッシュカット

678-102 25,200円


【切断許容径】-.021" x .025"




リンガル
ピン&リガチャーカッター

678-701 39,900円

【切断許容径】-.012"

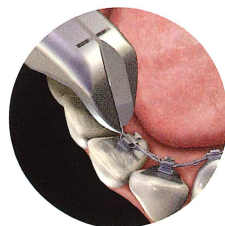


リガチャーワイヤーの過剰部分を
切断している咬合面観

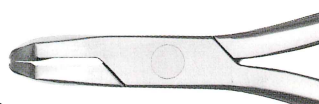


リンガル
ディスタルエンドカッター

678-700 39,900円

【切断許容径】-.018"

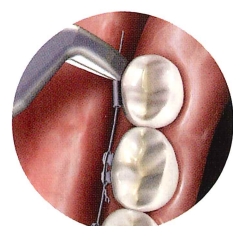

リンガルチューブ遠心部に出た過剰な
ワイヤーを切断している咬合面観

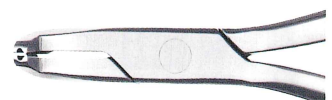


ユーティリティプライヤー

スリム

ウルトラスリムワインガルトプライヤー ★

678-501 22,100円

従来品(678-202)と比べ20%スリムになり、ギザがついたコンパクトなヘッドが確実にワイヤーを把持。限られたスペースでも指先の延長のように操作でき、容易にアーチワイヤーをバックルチューブやブラケットスロットに通すことが可能。【ワイヤー使用許容径】~.030"

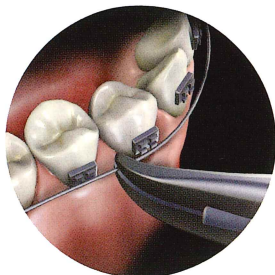


アーチワイヤーをブラケットスロットに挿入している頬側面観

スリムワインガルトプライヤー

678-202 22,100円

20°アングル付
【ワイヤー使用許容径】~.030"

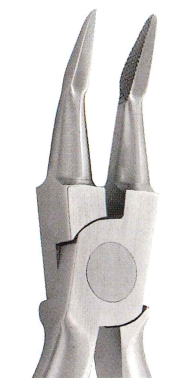

ホーププライヤー 直

678-203 22,100円


ワイヤーやピン等の着脱に適した多目的プライヤー
【ワイヤー使用許容径】~.030"



ホーププライヤー オフセット

678-204 22,100円

40°アングル付。ワイヤーやピン等の着脱に適した多目的プライヤー
【ワイヤー使用許容径】~.030"

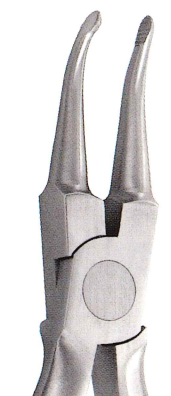

アドヒーズブリムービングプライヤー ★

678-206 22,100円

ブラケットディボンディング後の歯面に残った接着剤除去用
ブレード×1本、1/4パッド×2個、六角レンチ×1本入


スリムバンドリムービングプライヤー

678-503 22,100円

白歯バンド撤去用
従来品(678-207、678-208)よりヘッドが21%スリムになり、先端によりテーパーがついたことで、より大白歯へ到達し易く、歯肉を傷つけにくく、患者さんに与える不快感を軽減。



バンドを除去している頬側面観

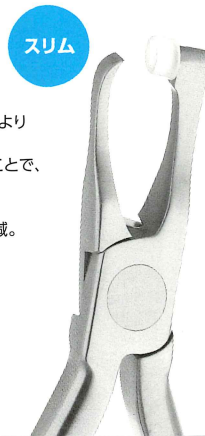

バンドリムーバー ロング

678-207 22,100円

白歯バンド撤去用
交換用パッド1/4×1、交換用パッド3/16×1



バンドリムーバー ショート

678-208 22,100円

白歯バンド撤去用。ショート
交換用パッド1/4×1、交換用パッド3/16×1



モジュールセパレーティングプライヤー

678-210 29,400円


歯間分離用モジュール装着用



リガチャータイピングプライヤー コーン

678-211 29,400円


コーンタイプ、リガチャーワイヤー結紮用
【ワイヤー使用許容径】~.015"

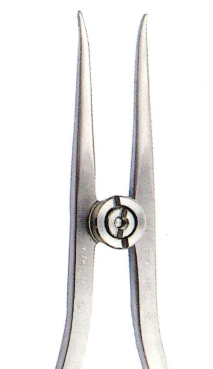

タイピングプライヤー スタイナー

678-222 31,500円

スタイナータイプ、リガチャーワイヤー結紮用
【ワイヤー使用許容径】~.015"

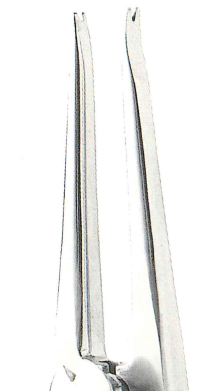

ブラケットリムーバー 直

678-219 22,100円

メタル、プラスチック、セラミック等すべての素材のブラケットディボンディングに適用





ブラケットリムーバー
アングル

678-220L 22,100円


前歯・臼歯部用ブラケット
ディボンディングに適用



クラウン&バンド
カンタリングプライヤー

678-221 22,100円

バンド調整用

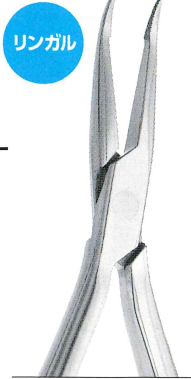

リンガル

リンガル ウィンガルトプライヤー ★

678-702 36,800円

【ワイヤー使用許容径】-.030"



アーチワイヤーを
ブラケットスロットに
挿入している頬側面観


リンガル ウィンガルトプライヤー 90°

678-702-90 36,800円

【ワイヤー使用許容径】-.030"




リンガル

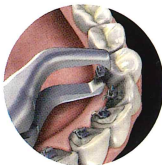


ブラケットと
ディボンディング
している咬合面観

リンガル ブラケット
リムービングプライヤー

678-703 36,800円

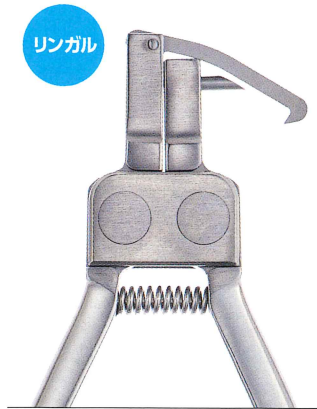

リンガル

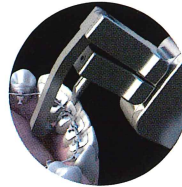

ディボンディングプライヤーの
一方のフック型アームが舌側の
ブラケット下部に届くようにあてます。



もう一方のくさび型チップをブラケットと
歯面の接着境界に差し込むようにしながら、
タイウイングの下にアームのフックをひっかけます。
プライヤーを握ると、くさび型チップが
歯牙とブラケットの接着境界に挿入され、
ブラケットを剥離します。

リンガル ディボンディングプライヤー

678-709 39,900円

スプリングの反発力を応用して、舌側矯正用
ブラケットを最小限の力でスムーズに除去。
患者さんの快適性を損なうことなくブラケットを
素早くディボンディング可能。



使用方法はこれから
ご覧いただけます。
(英語)

ワイヤーフォーミングプライヤー



バードビークプライヤー

678-304 22,100円

ラウンドワイヤーの
ループ成形用
【屈曲許容径】-.030"



バードビークプライヤー
カッター付 ★

678-325 22,100円

ワイヤーのバンドやカットが
一本で可能
【屈曲許容径】-.022" x .025"



オメガグループフォーミング
プライヤー

678-303 22,100円

3段階(.045", .060", .075")の
作業部でオメガグループを正確に
フォーミング
【屈曲許容径】-.022" x .025"
予備用交換用ブレード×1枚入




ツイードループ
フォーミングプライヤー
ツイード

678-306 22,100円


3段階(.055", .075", .090")の
作業部で正確にフォーミング
【屈曲許容径】-.022" x .025"




ワイヤーフォーミングプライヤー

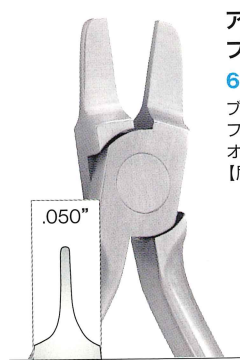

**アーチベンディング
プライヤー ツイード**
678-307 22,100円
ブレード幅.050"。
ファースト、セカンド、サード
オーダーバンド用
【屈曲許容径】-.022" x .025"

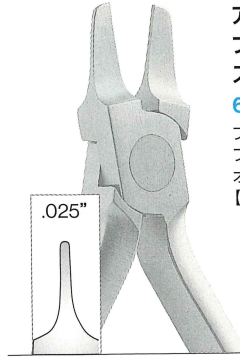

**アーチベンディング
プライヤー ツイード
スリムタイプ**
678-307S 22,100円
ブレード幅.025"。
ファースト、セカンド、サード
オーダーバンド用
【屈曲許容径】-.022" x .025"

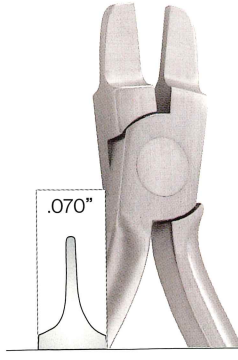

**レクタングル
アーチベンディング
プライヤー ツイード**
678-308 22,100円
ブレード幅.070"。
ファースト、セカンド、サード
オーダーバンド用
【屈曲許容径】-.022" x .025"




**ホローチョップ
カンタリングプライヤー**
678-310 22,100円
あらゆる種類のアーチワイヤーの
微妙なカーブの付与が可能
【屈曲許容径】-.030"



アダムスプライヤー
678-320 22,100円
アダムススクリップの製作や
調整に適用
【屈曲許容径】-.040"




**NiTiバンダー
3プロング**
678-322 22,100円
NiTi含む全ての
アーチワイヤーに適用
【屈曲許容径】-.020"

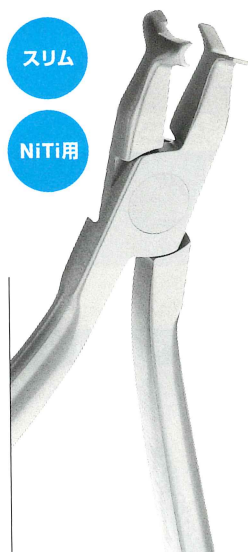

スリム
NiTi用
スリムハンマーヘッドNiTiプライヤー ★
678-502 22,100円
熱処理せずにNiTiワイヤーを曲げる事が可能。
従来品(678-327)と比べヘッドが10%スリムになり、
更に広い視野を確保し、患者さんの不快感を軽減。
【屈曲許容径】-.025"

図1 NiTiワイヤーを遠心から歯肉側に曲げている咬合面観
〈図1〉 舌側面方向に曲げている頬側面観
〈図2〉 ワイヤー屈曲図(P.12参照)

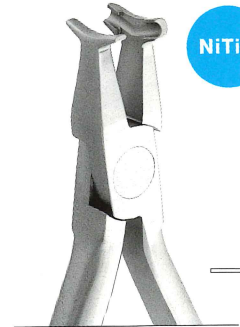

NiTi用
**ハンマーヘッド
NiTiバンダー**
678-327 22,100円
NiTiワイヤー加熱なしで
バンド可能
左右のシンチバック適用
【屈曲許容径】-.025"

A. NiTiワイヤーを遠心から
歯肉側に曲げている咬合面観

B. 舌側面方向に曲げている頬側面観



リングル
NiTi用
リングル ハンマーヘッドNiTiプライヤー
678-704 36,800円
【屈曲許容径】-.025"

678-704 678-704SER


**リングル ハンマーヘッドNiTiプライヤー
ギザ付**
678-704SER 36,800円
【屈曲許容径】-.025"

リングルチューブ遠心から
出たNiTiワイヤーを
曲げている咬合面観



**トーキングプライヤー
020キー付(.016" x .018")**
678-328-20 22,100円
【屈曲許容径】-.018"
キー×1本入

**トーキングプライヤー
021キー付(.018" x .022")**
678-328-21 22,100円
【屈曲許容径】-.022"
キー×1本入

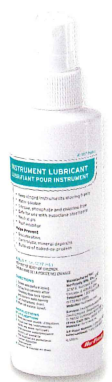


**IMS潤滑スプレー
236ml**
ILS 3,200円
ヒンジ部の動きを
スムーズにします。


クリアコレクション (アライナー 矯正用インスツルメント)



クリアコレクションの
使い方を動画で
CHECK!!
※キャンペーン対象品以外の
製品動画も含まれます。

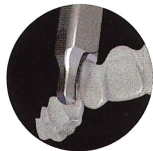

先端幅
約3.2mm

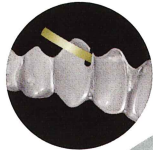


クリアコレクション
ティアドロッププライヤー ★

678-800 25,200円

CPAの辺縁に使用することで、
エラストックをかける際の
涙滴状ホールをあけることができます。
このホールを付与することにより、
患者さん自身でエラストックを
より簡単に交換することができます。

先端幅
約8mm

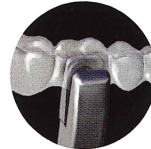


クリアコレクション
ホールパンチプライヤー ★

678-803 25,200円

CPAの辺縁に半月型のくりぬきを作り、
リンガルボタンやブラケットなどを併用する際の
接着位置を確保します。
また、装着時に歯肉にあたる部分のトリミングに
使用することも可能です。

先端幅
約6.5mm

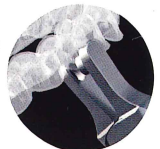


クリアコレクション
ペティートパンチプライヤー

678-805 25,200円

エラストックをかけるためのリンガルボタンの
接着位置を確保するために、アライナーの辺縁部に
直径4.5mmの半月状のスペース(くりぬき)を
作るためのインスツルメントです。

先端幅
約4.4mm

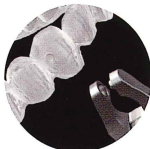


クリアコレクション
スポットプライヤー

678-804 25,200円

小さな個々の歯牙の移動やアライナーの
保持力を高める点接触を作成するための、
ごく小さな丸いくぼみを付与します。

先端幅
約3.6mm


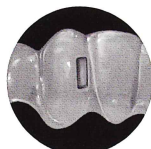


クリアコレクション
バーティカルプライヤー ★

678-801 25,200円

CPAのそれぞれの歯牙に対して、頬側・
舌側の近心・遠心に垂直的なくぼみを付与します。
このくぼみによりローテーションコントロールを
促進します。

先端幅
約5.3mm

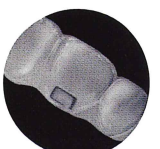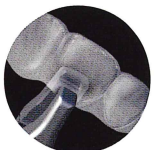


クリアコレクション
ホリゾンタルプライヤー ★

678-802 25,200円

CPAのそれぞれの歯牙に対して、頬側・
舌側の辺縁に水平的なくぼみを付与します。
このくぼみによりトルクコントロールを促進します。



先端幅
約4.5mm

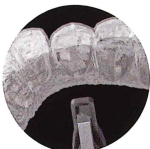



クリアコレクション
クロックワイズウェッジプライヤー

678-808 25,200円

特定の歯牙に対して頬側面とその反対側の舌側面の
隅角で、アライナーに楔形のくぼみを作ることに
より、回転応力を生じさせるために使用される
インスツルメントです。時計回りに回転させる
際に使用されます。



先端幅
約4.5mm

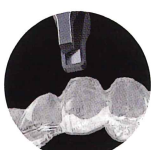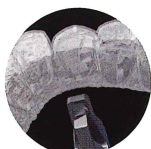


クリアコレクション
カンタークロックワイズウェッジプライヤー

678-807 25,200円

特定の歯牙に対して頬側面とその反対側の舌側面の
隅角で、アライナーに楔形のくぼみを作ることに
より、回転応力を生じさせるために使用される
インスツルメントです。半時計回りに回転させる
際に使用されます。

先端幅
約3.4mm

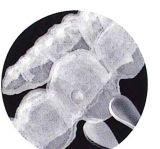

クリアコレクション
イレイサープライヤー

678-811 25,200円

CPA用プライヤーやその他のインスツルメントにより
付与された不要なくぼみを元に戻す、または取り除く
ために設計されています。

	商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
カッター	スリムマイクロカッター	678-500	25,200	
	マイクロカッター	678-110	25,200	
	ハードワイヤーカッター 15°	678-103	25,200	
	マイクロミニピン&リガチャーカッター 15°	678-109	25,200	
	マイクロミニピン&リガチャーカッター	678-107	25,200	
	マイクロミニピン&リガチャーカッター ロング	678-107L	25,200	
	ミニピン&リガチャーカッター	678-106	25,200	
	ピン&リガチャーカッター	678-105	25,200	
	スリムディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド	678-113	30,500	
	ディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド	678-111	30,500	
	ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールド	678-101	25,200	
	ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールドロング	678-101L	25,200	
	ディスタルエンドカッターフラッシュカット	678-102	25,200	
	リングガル ピン&リガチャーカッター	678-701	39,900	
	リングガル ディスタルエンドカッター	678-700	39,900	
ユーティリティブライヤー	ウルTRASリムワインガルトブライヤー	678-501	22,100	
	スリムワインガルトブライヤー	678-202	22,100	
	ホープブライヤー 直	678-203	22,100	
	ホープブライヤー オフセット	678-204	22,100	
	アドヒーズリムービングブライヤー	678-206	22,100	
	スリムバンドリムービングブライヤー	678-503	22,100	
	バンドリムーバー ロング	678-207	22,100	
	バンドリムーバー ショート	678-208	22,100	
	モジュールセパレーティングブライヤー	678-210	29,400	
	リガチャータイングブライヤー コーン	678-211	29,400	
	タイングブライヤー スタイナー	678-222	31,500	
	ブラケットリムーバー 直	678-219	22,100	
	ブラケットリムーバー アングル	678-220L	22,100	
	クラウン&バンドカンタリングブライヤー	678-221	22,100	
	リングガル ワインガルトブライヤー	678-702	36,800	
	リングガル ワインガルトブライヤー 90°	678-702-90	36,800	
	リングガル ブラケットリムービングブライヤー	678-703	36,800	
	リングガル ディボンディングブライヤー	678-709	39,900	

	商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
ワイヤーフォーミングブライヤー	バードビークブライヤー	678-304	22,100	
	バードビークブライヤー カッター付	678-325	22,100	
	オメガループフォーミングブライヤー	678-303	22,100	
	ツイードループフォーミングブライヤー ツィード	678-306	22,100	
	アーチベンディングブライヤー ツィード	678-307	22,100	
	アーチベンディングブライヤー ツィードスリムタイプ	678-307S	22,100	
	レクタンギュラーアーチベンディングブライヤー ツィード	678-308	22,100	
	ホローチョップカンタリングブライヤー	678-310	22,100	
	アダムスブライヤー	678-320	22,100	
	NiTiバンダー 3プロング	678-322	22,100	
	スリムハンマーヘッドNiTiブライヤー	678-502	22,100	
	ハンマーヘッドNiTiバンダー	678-327	22,100	
	リングガル ハンマーヘッドNiTiブライヤー	678-704	36,800	
	リングガル ハンマーヘッドNiTiブライヤーギザ付	678-704SER	36,800	
	トーキングブライヤー 020 キー付 (.016 x .018)	678-328-20	22,100	
	トーキングブライヤー 021 キー付 (.018 x .022)	678-328-21	22,100	
クリアコレクション	IMS潤滑スプレー 236ml	ILS	3,200	
	ティアドロップブライヤー	678-800	25,200	
	ホールパンチブライヤー	678-803	25,200	
	ペティートパンチブライヤー	678-805	25,200	
	スポットブライヤー	678-804	25,200	
	パーティカルブライヤー	678-801	25,200	
	ホリゾンタルブライヤー	678-802	25,200	
	クロックワイズウェッジブライヤー	678-808	25,200	
	カンタークロックワイズウェッジブライヤー	678-807	25,200	
	イレイサーブライヤー	678-811	25,200	

現在一部の製品につきましては、ご発注を多くいただいているため、お届けまで時間を要する製品もございます。在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。


キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載商品の標準価格は2025年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格はセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

矯正ワイヤー
ベンディングコンテスト
開催決定

1本のワイヤー(シングルワイヤー)のみを使用して
作品を完成してください!!
ワイヤーの材質の指定はシングルなら何でも可!!
作品提出締切は12月19日(金)まで。

応募についての
詳細はこちらから

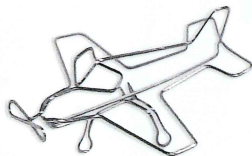

※過去の入賞作品

■ 歯科医院名

■ お名前

■ ご住所 〒

TEL

【歯科商店名】