

**DIRECTA**

ラクスエーター ユーザー様 限定キャンペーン

2026年 1/21 (水) から 3/20 (金) まで

ペンタイプも通常タイプも対象!

Luxator®

スウェーデンの歯科医師によってデザインされたラクスエーターシリーズに耐久性を追求したチタンコーティング

ラクスエーター・Pシリーズ

ラクスエーターシリーズにペンタイプが登場!!

- 歯根膜への挿入が容易
- 生体親和性が高いチタンコーティング
- シャーピング不要

! 不適切な使用法によるブレードの破損や折れ及び、
シャーピングによるコーティングの剥がれは保証の対象になりません。

商品名

ラクスエーター・プラス
Pシリーズ

医療機器届出番号 13B1X00133000007



■ 品番 P1

標準価格 ~~25,000~~ 円 (税別)

ブレード幅: 3mm

形状: ストレート

色: ダークグリーン 全部位 (残根 / 根尖 / 口蓋側 / 臼歯遠心)

■ 品番 P2

標準価格 ~~25,000~~ 円 (税別)

ブレード幅: 3mm

形状: カーブ

色: ライトブルー 全部位 (残根 / 根尖 / 口蓋側 / 臼歯遠心)

■ 品番 P3

標準価格 ~~25,000~~ 円 (税別)

ブレード幅: 3mm

形状: コントラアングル

色: ダークブルー 舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心

■ 品番 P4

標準価格 ~~25,000~~ 円 (税別)

ブレード幅: 4mm/1.5mm

形状: デュアルエッジ

色: パープル 残根

■ ■ ■ 品番 PK4 標準価格 ~~90,000~~ 円 (税別) 4本セット (P1、P2、P3、P4)

マレットが使用できます

Luxator®

スウェーデンの歯科医師によってデザインされた高品質なスウェーデン鋼使用

ラクスエーター・プラス

ラクスエーター・プラスによる抜歯の使用感*

- ・無理のない抜歯ができる
- ・骨損傷が最小限の歯周靱帯切断ができる
- ・インプラントのための良好な骨組織の保全が可能になる
- ・抜歯窩の損傷が最小限である
- ・術後の痛みと腫れの経過が良好である
- ・力に頼らずに抜歯が可能である

* 当社実施アンケート結果より

商品名

ラクスエーター・プラス

医療機器届出番号 13B1X00133000007

■ K4 (スタンダード4本) 標準価格 ~~82,000~~ 円 (税別)
4本セット (3C 3S 5C 5S) + シャーピングツール 1本 / 解説 CD-ROM 付き■ SK4 (ショートモデル4本) 標準価格 ~~75,000~~ 円 (税別)
4本セット (S2S S3C S3S S3CA) + シャーピングツール 1本 / 解説 CD-ROM 付き■ K7 (スタンダード7本) 標準価格 ~~142,000~~ 円 (税別)
7本セット (2S 3C 3S 3CA 3IC 5C 5S) + シャーピングツール 1本 / 解説 CD-ROM 付きシャーピングツール
(ラクスエーター・プラス専用)単品 標準価格 ~~23,000~~ 円 / 本 (税別)
2S、3C、3S、3CA、3IC、5C、5S、S2S、S3C、S3S、S3CA単品 1S、DE3、DE5 標準価格 ~~25,000~~ 円 / 本 (税別)3S チタン 標準価格 ~~25,000~~ 円 / 本 (税別)2S チタン 標準価格 ~~26,000~~ 円 / 本 (税別)DE3 チタン 標準価格 ~~28,000~~ 円 / 本 (税別)3A チタン 標準価格 ~~28,000~~ 円 / 本 (税別)シャーピングツール 標準価格 ~~4,500~~ 円 / 本 (税別)




ラクスイーターシリーズに 耐久性を追求したチタンコーティング

■ 特徴

- ・ 歯根膜への挿入が容易
- ・ 生体親和性が高いチタンコーティング
- ・ シャーピング不要

【ラクスイーター・プラスの使用方法】

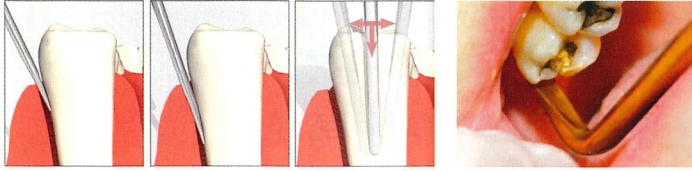

1. 歯の長軸方向に
対して真直ぐに
挿入します
2. 歯に沿わせて
歯槽骨を圧迫
しながら歯周
靱帯を切り進
めていきます
3. 根長の3分の
2程度切断し
ていくと楔効
果により歯を
脱臼できます

3A チタンの使用例

—— シャーピング不要 ——


品番	ブレード幅	形状	シャンク部	色	推奨使用部位
3S チタン	3mm	ストレート	約 74mm	グレー	全部位 (頬側/舌側/舌側/口蓋側/臼歯遠心)
2S チタン	2mm	ストレート	約 74mm	グリーン	残根 / 根尖
DE3 チタン	3/1.5mm	ストレート	約 74mm	グレー	残根
3A チタン	3mm	アングル	約 74mm	パープル	舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心

3A チタンの先端部

26,000円/本(税別) 26,000円/本(税別) 28,000円/本(税別) 28,000円/本(税別)

3mm 1.5mm

！ 注意事項

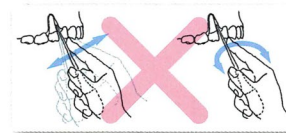

エレベーターのように使用できません
不適切な使用法によるブレードの破損や折れ、
及びシャーピングによるコーティングの剥がれは
保証の対象になりません。

本製品は鋭い刃先を持っています。
取扱にはご注意ください

* オートクレープ対応 (135℃)

* DE3,DE5 は段差をつけた特徴的な形状で、より安定した挿入を実現させるとともにスリップのリスクも減少させます。

品番	ブレード幅	形状	シャンク部	色	推奨使用部位
1S	1mm	ストレート	約 74mm	ライトグリーン	残根 / 根尖
2S	2mm	ストレート	約 74mm	グリーン	残根 / 根尖
S2S	2mm	ストレート/ショート	約 64mm	グリーン	残根 / 根尖
3C	3mm	カーブ	約 74mm	ブラック	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心)
S3C	3mm	カーブ/ショート	約 63mm	ブラック	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心)
3S	3mm	ストレート	約 74mm	グレー	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心)
S3S	3mm	ストレート/ショート	約 64mm	グレー	全部位 (残根 / 根尖 / 舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心)
3CA	3mm	コントラアングル	約 73mm	ブルー	舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心
S3CA	3mm	コントラアングル/ショート	約 62mm	ブルー	舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心
3IC	3mm	インバーテッドカーブ	約 74mm	ライトブルー	舌側 / 口蓋側 / 臼歯遠心
5C	5mm	カーブ	約 72mm	ブラウン	大白歯
5S	5mm	ストレート	約 74mm	ライトブラウン	大白歯
S5S	5mm	ストレート/ショート	約 64mm	ライトブラウン	大白歯
DE3	3/1.5mm	デュアルエッジ	約 74mm	グレー	残根
DE5	5/3mm	デュアルエッジ	約 74mm	ライトブラウン	残根

25,000円/本(税別) 23,000円/本(税別) 23,000円/本(税別) 23,000円/本(税別) 23,000円/本(税別) 23,000円/本(税別) 23,000円/本(税別) 23,000円/本(税別)

K7 SK4 K7 SK4 K7 SK4 K4 K7 K4 K7

3mm 1.5mm 5mm 3mm

■ ご注文シート ご注文は FAX でお申し込みください FAX 03-3635-1060

歯科医院名	お電話番号	ご住所
	メールアドレス	
メルマガ配信希望 有 ☐ 無 ☐		
お取引様名	支店名	ご担当者様名
ご注文の商品名、品番 (ご記入ください)		

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

商品の内容、価格、仕様、デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL : <https://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所