

# エンドレスキュー

# 破折ファイル除去システム



特別  
価格

期間限定

2026.3/21<sup>±</sup>

~5/20<sup>水</sup>

破折ファイルの径が  
最大 0.49mm まで対応可能

残存歯質の保存に繋がる  
外径 0.7mm と 0.9mm の専用バー



FOLLOW ME!

公式 SNS はじめました!

最新の情報をいち早くお届けします



Facebook



Instagram



## 株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL(06)6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL(03)3835-2653 (代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL(092)575-6060 (代)

モモセ歯科商会




<https://www.momose-dm.co.jp>

お問い合わせは




(H269GK.016)

1 アクセスキャビティーの形成  
髄床底への侵襲を防ぐためにH269GK  
の先端はセーフエンドになっています

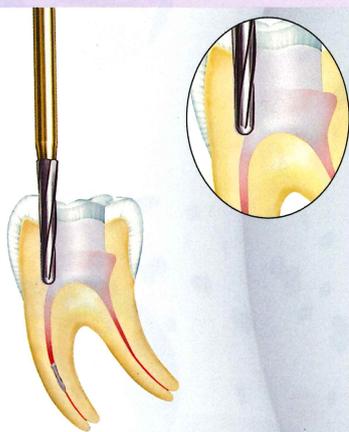


(G180A.110)

2 根管口の明示  
ショートタイプのゲーツなので根管口に  
アクセスしやすくなっています(全長28mm)

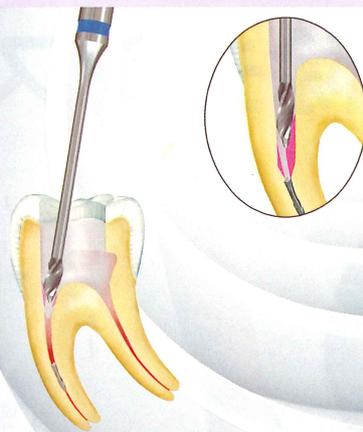


(G180.070 / G180.090)

3 破折ファイルへのアクセス形成  
破折ファイルの真上まで根管を形成します

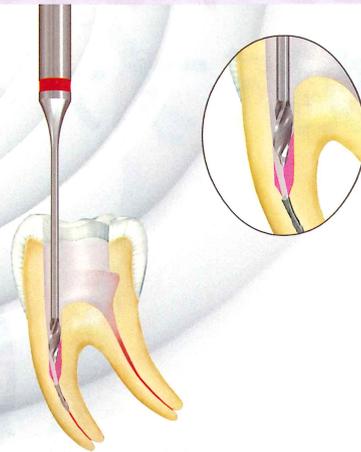

(RKP.070 / RKP.090)

4 破折ファイルの露出  
RKPの先端部は凹面形状になっているので破折ファイルの周辺歯質を  
切削しながら破折片を露出させることができます

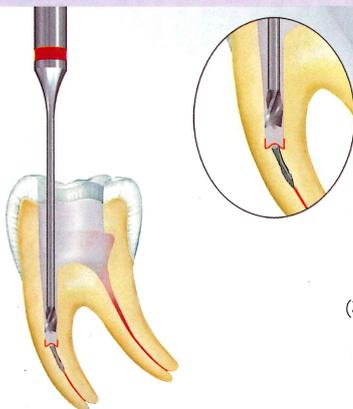

RKPの先端形状  
(破折ファイルの周辺歯質を  
削除するために  
凹面形状になっています)


5 破折片の除去  
作業部が中空のトレフィンバーを逆回転で使用  
象牙質の削りカスと破折ファイルをトレフィンバーの中で詰まらせて破折片を除去



逆回転で使用

RKTの先端形状  
(先端にブレードを  
付与しています)

### TD2413 キット内容

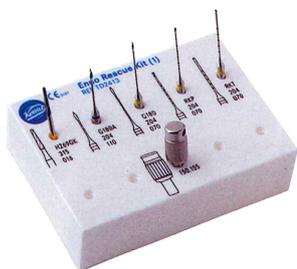

FG&CA  
エンドレスキュー キット1


品番 価格  
TD2413 18,000円

破折片の最大径 0.39mm まで対応

品番	H269GK.016	G180A.110	G180.070	RKP.070	RKT.070	150.155.000
作業長(mm)	9.0	4.0	3.0	-	-	-
最大径(mm)	1.6	1.1	0.7	0.7	0.7	-
内径(mm)	-	-	-	-	0.39	-
全長(mm)	26.0	28.0	32.0	32.0	33.0	18.0
適正回転数	100,000	800	800	300	300 逆回転/単回使用	-
標準医院価格	2,600円	1,100円	1,100円	3,700円	3,900円	6,500円

入数：1本入 イラストはほぼ実物大です ※歯質の厚みが薄いケースでご使用下さい

### TD2434 キット内容

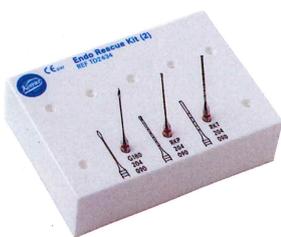

CA  
エンドレスキュー キット2

品番 価格  
TD2434 8,700円

破折片の最大径 0.49mm まで対応

品番	G180.090	RKP.090	RKT.090
作業長(mm)	3.0	-	-
最大径(mm)	0.9	0.9	0.9
内径(mm)	-	-	0.49
全長(mm)	32.0	32.0	33.0
適正回転数	800	300	300 逆回転/単回使用
標準医院価格	1,100円	3,700円	3,900円

入数：1本入 イラストはほぼ実物大です



製品動画は  
こちら



製品詳細は  
こちら

医療機器の分類：一般医療機器  
一般的名称：歯科根管内異物除去器具セット  
販売名：コメット エンドレスキュー  
届出番号：27B2X00091000051