

数量・期間限定キャンペーン!

2026.4/21(火)~6/19(金)まで

お子様にも使いやすい



トクヤマ マルチシャイン

矯正用リテーナー マウスガード 義歯等の洗浄剤

下記セットを **特別価格** にてご提供!

オリジナルデザイン!



ディスプレイ用マルチーニ (ぬいぐるみ) × 1体

+

トクヤマ マルチシャイン (32錠) × 6箱

標準医院価格 3,300円



マルチシャイン おすすめポイント

POINT 01
お子様にも使いやすい
控えめな香り

POINT 02
浸漬時間 5分
素早くしっかり洗浄

POINT 03
洗浄効果を高める
きめ細やかな泡立ち



詳細は裏面をご確認ください。

*特別価格については、お届け歯科商店様にお問い合わせください。

*価格は2026年4月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。

*一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。*数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

トクヤマ マルチシャイン(32錠)6箱+マルチーニ キャンペーン

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL

トクヤマ マルチシャイン キャンペーン [20708]

お届け歯科商店名

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」にしたがって厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス ☎ 0120-54-1182

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9 [受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00] (土日祝日を除く)

WEBにもいろいろ情報載っています!▶

トクヤマデンタル



歯科医療機関専売品

トクヤマ **マルチシャイン** は
お子さまにも使いやすい
「優しい香り」
を採用しています。



トクヤマ マルチシャインの特長

「マルチシャイン」はマルチにご使用いただける洗浄剤です。

洗浄効果を高める、きめ細かな泡立ち

きめ細かな泡立ちで、洗浄力を強化。




パッケージは表裏2種類のデザインを採用。クリニックの患者層に合わせてディスプレイいただけます。

汚れを素早く、しっかり洗浄

浸漬時間5分でしっかり洗浄。

就寝中のつけおき洗浄も可能で、生活スタイルに合わせて洗浄時間が選べます。

※全ての菌を除菌できるわけではありません

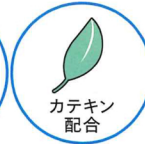

義歯患者向け



食事を邪魔しない控えめな香りづけ

洗浄直後でも食事の邪魔をしない控えめな香りを採用。



矯正用リテーナー、マウスガード患者向け

使用方法

1



150~200mL程度の水に1錠入れてください。

ぬるま湯(40℃程度)がより効果的です。

2



マウスガード、リテーナー等にも使える!

すぐに入れ歯全体を浸してください。

洗浄時間は5分程度です。

1晩程度であれば漬け置きも可能です。

ひどい汚れは浸漬後にスポンジなどで軽くこするとより効果的です。

3



洗浄後は水でよくすすいでください。

残った洗浄液は捨ててください。



ホームページに院内で
ご使用いただける
ポスターをご用意しています。

(A4サイズ × 3種)

ダウンロードはこちらから ▶

