

ボンドマー ライトレスⅡ

2-2 パック
キャンペーン

2026.7.21(火) > 8.20(木)

数量限定



ボンドマー ライトレスⅡ 2-2パック

○単品 A 液…3mL×2 ○単品 B 液…2.4mL×2

※本キャンペーン品はリフィルです。付属品(ミニブラシ、混和皿)は付属していません。

▶ ¥14,800

標準医院価格

「幅広い用途・材質」に「ひとつの操作」で！

ボンドマー ライトレスⅡは、ボンディングとプライマーの機能をあわせもつマルチユース型のボンディング材です。



【使用可能な材質】

■エナメル質 ■象牙質 ■CAD/CAMハイブリッドレジン ■ニケイ酸リチウム ■その他シリカ系
セラミックス ■ジルコニア ■アルミナ ■陶歯 ■ファイバーポスト ■ハイブリッド型硬質レジン
■コンポジットレジン ■金銀パラジウム合金 ■コバルトクロム合金 ■チタン合金 ■ニッケル
クロム合金 ■ステンレス合金 ■金合金 ■銀合金

材質によらず同一操作

待ち時間
光照射 0 秒

※ボンドマー ライトレスⅡ 歯科用象牙質接着材/歯科セラミックス用接着材料/歯科金属用接着材料(管理医療機器) 認証番号303AFBZX00024000

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。 ※価格は2026年7月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。 ※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

ボンドマー ライトレスⅡ 2-2パック キャンペーン 注文書

貴歯科医院名

お名前

ボンドマー ライトレスⅡ
2-2パック キャンペーン

[キャンペーンコード: 15307]

セット

ご住所 〒

お届け歯科商店名

TEL ()

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社 トクヤマデンタル

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求 インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00
(土日祝日を除く)

ボンドマー ライトレスⅡ

よくあるお問い合わせをご紹介します

Q1. 2種類の混和皿がありますが、違いは何ですか？

A1. 操作可能時間が異なります。

理由：混和皿の窪みの深さと広さの違いにより、溶媒の揮発する速度が変わるため。

混和皿を繰り返し使用する場合は...

ブルーラバー

操作可能時間：

混和後 1 分間




〈断面のイメージ〉

・イメージであり実寸大ではありません



窪みが浅くて
広いため
液が揮発しやすい

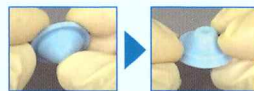

○ひっくり返して清掃可能
○アルコールで清掃してください
○オートクレープ滅菌はできません

操作時間が長く欲しい場合は...

ディスポ混和皿

操作可能時間：

混和後 3 分間



〈断面のイメージ〉

・イメージであり実寸大ではありません



窪みが深くて
狭いため
液が揮発しにくい

○ディスポなので
繰り返し使用は
できません

※本キャンペーンには混和皿は付属していません。ボンドマー ライトレスⅡセットに付属または単品にて販売をしております。

Q2. 重ね塗りやラビングをすると接着力は変わりますか？

A2. 重ね塗りをしても接着力は殆ど変わりません。

(3回重ね塗りをしても接着力が変わらないことを確認しています。)

ただし、補綴物装着時には、塗布量が多いと被膜が厚くなり、
浮き上がりの原因となりますので、補綴物に塗布する場合は被着面全体に1回うすく塗布してください。
ラビングをしても接着力の向上や、処理時間短縮等の効果はありません。

Q3. CAD/CAM冠、CAD/CAMインレーの内面処理に使用できますか？

A3. 使用できます。

なお、令和8年度診療報酬改定にて「内面処理加算 1」の保険点数がアップしました。

※「内面処理加算 1」を算定する場合は、接着性レジンセメントを用いて装着。

Q4. ボンドマー ライトレスⅡで使用されている技術
「BoSEテクノロジー」と「コンタクトキュア」とはどのような技術ですか。

A4. BoSEテクノロジーは、光照射不要でありながら、
光重合に匹敵する重合活性を誇る化学重合開始剤技術です。
コンタクトキュアとは、重合性レジンとボンディング材／プライマー
との接触界面で重合を進行させる技術です。

ボンドマー ライトレスⅡについて特設サイトにもいろいろ載っています。
ぜひ、特設サイトもご覧ください。(右QRコードからご覧いただけます)

ボンドマー ライトレスⅡ
特設サイト▼

