

1ST ANNIVERSARY SA アタッチメント for アライナー 発売1周年記念キャンペーン

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。

このたび、SA アタッチメント for アライナーの発売1周年を記念いたしまして、
「SA アタッチメント for アライナー 発売1周年記念キャンペーン」を企画いたしました。
期間中、対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

【実施期間】 数量限定

2026.7.21>>>8.20

SA アタッチメント for アライナー 単品1本を特別価格にてご提供！

■標準価格 7,700円 202430933

商品構成：単品 2.5g/1.3mL 1本
(付属品ニードルチップ(N)5個、ニードルチップキャップ5個)
色 調：U(ユニバーサル)
容 量：2.5g/1.3mL

販売名 SA アタッチメント for アライナー
一般名称 歯科矯正用レジジン材料
(高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材)
医療機器認証番号 304ABBZX00022000
医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)



関連製品のご案内

iTero lumina™

iTero Lumina Proカート

標準価格 6,760,000円 201500142

iTero Lumina Proモバイル

標準価格 6,760,000円 201500143

NIRI機能 口腔内カメラ内蔵 5D自動アップロード
アウトカムシミュレータープロ

販売名 iTeroLumina Core口腔内スキャナー
一般名称 デジタル印象採得装置歯科技工室設置型
コンピュータ支援設計・製造ユニット歯科診断用口腔内カメラ
医療機器承認番号 305008ZX00270000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 インビザライン・ジャパン合同会社



invisalign go

インビザライン Go 治療までの流れ

1 矯正相談

簡易シミュレーション



2 症例提出

写真
顔貌と口腔内

印象
口腔内スキャン
or シリコン印象

処方書
上記資料を添付



3 治療計画の策定

ドクターサイト
クリンチェック治療計画
確認と修正



4 発注

クリンチェック承認

5 受注&製造&発送

アライナー製造後
クリニックへお届け



インビザライン Go システム導入コースのご案内 受講料 52,800円(税込)

■矯正専門医でなくとも、インビザライン Go
ライセンスの取得が可能

■初診から治療完了までを想定した、
包括的かつ密度の濃い内容

【開催日時・お申込み】

右記リンクよりアクセスしていただき、
必要事項をご入力の上お申込みください。
https://www.igo-jp.com/seminar_morita
※ご使用いただくブラウザはGooglechromeを推奨しております。
※導入コースの申込受付は、開催日の約2ヶ月前に開始いたします。



友だち追加は
こちらから

クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2026年7月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販 売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

SA アタッチメント for アライナー

ボンディング材不要のアライナー矯正アタッチメント作製用材料

ボンディング材の接着操作が不要なので
スピーディーなワークフローを実現!



使用ステップ ◎ご使用に際しましては、必ず電子添文等をご確認ください。
◎適法に仕上った歯面を清掃してください。



1 被着面処理 (エッチング)
被着面のエナメル質を、リン酸エッチング材の電子添文等にしたがって、10秒間処理し、水洗、乾燥。



2 アタッチメントテンプレートへの填入^{※2}




3 アタッチメントテンプレートを歯に装着^{※2}

10秒待つことで
エナメル質と
馴染みます。

アタッチメント
テンプレート
装着後
10秒



4 光照射
歯科重合用光照射器にて硬化。^{※3}

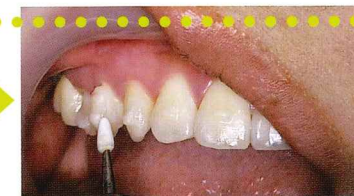

5 余剰ペーストの除去



6 アライナーの装着
硬化後、10分以上間隔をあけて、アライナーを装着。^{※2}

光照射から
10分以上あけることで
重合が進行し接着強さが
向上します。



使用ステップの
説明動画はこちら

※2 ご使用のアライナー型矯正装置の使用方法にしたがってください。
※3 電子添文等に記載の「照射時間と硬化深度について」にしたがってください。

写真提供 加須屋 真 先生 かずや歯科クリニック

SA アタッチメント for アライナーの接着のポイント

エナメル質との馴染み



SA アタッチメント for アライナー

親水性アミド系モノマー

ペースト自体の
エナメル質への馴染み

化学的な結合



SA アタッチメント for アライナー


リン酸エステル系モノマー「MDP」

ハイドロキシアパタイト
への化学的な結合

●親水性アミド系モノマー
による優れたエナメル質
への馴染みと重合硬化性の
向上

●接着性モノマー「MDP」
によりハイドロキシアパ
タイトへの化学的結合性を
付与することでエナメル
質に対する優れた接着性
を獲得

機械的な嵌合力

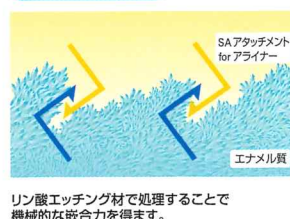

リン酸エッチング材で処理することで
機械的な嵌合力を得ます。

リン酸エッチング材

エナメル質表面の粗造化による機械的な嵌合力




K エッチャントシリンジ
(リン酸エッチング材)

適度な感応性があり、シリンジ先端にニードルチップを
つけることでエナメル質を選択的にエッチングするの
に適した製品です。

販売名 K エッチャント シリンジ 一般名称 歯科用エッチング材 医療機器認証番号 226ABZ00089000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社

アタッチメント除去時に高い識別性を確保する蛍光性

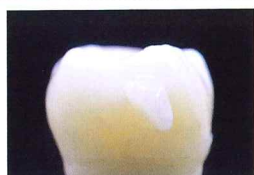

光源：蛍光灯



光源：ブルーライト

ヒト抜去歯上に
「SA アタッチメント for アライナー」
にてアタッチメントを作製

※蛍光灯及びブルーライトを光源として写真撮影
ブルーライト：LEDを光源とする近紫外線光
(波長 405 nm, 出力 70 mW)

撮影：クラレノリタケデンタル株式会社

関連商品

汎用歯科用照明器
マイクロラックスDW

標準価格 85,000円 20610021

商品構成
本体、グラスライトガイド3mm、
フィルター グラスライトガイド
マイクロラックスDW用メガネ
マイクロラックスDW用USB
充電ケーブル(電源アダプター付)



高輝度
白色LED

ブルー
ライト

販売名 マイクロラックスDW
一般名称 汎用歯科用照明器
機器の分類 一般医療機器(クラスI)
医療機器届出番号 27B1X00109000357

SA アタッチメント for アライナーのケースレポートはこちら

井上 剛 先生、高橋 真広 先生に解説いただいています!



ケースレポートは
こちら



東京科学大学大学院
医歯学総合研究科
口腔機能再構築学講座
う蝕抑制学分野
井上 剛 先生



トータル歯科 東京青井
トータル歯科・矯正歯科 湘南辻堂
高橋 真広 先生