

コラーゲン使用人工骨

ボナーク® インプラント適応骨補填材 ご愛顧キャンペーン

期間 2026年8月21日～10月20日 数量限定

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「ボナーク®ご愛顧キャンペーン」を企画いたしました。期間中、対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

Bonarc®

ボナーク。

操作性に優れたスポンジ形状




コラーゲン使用人工骨

ボナーク® ディスクタイプ

包装単位(容量) 10枚入り(約0.1mL×10枚/約1.0mL)

製品サイズ 厚さ 1.5mm 直径 9.0mm

標準価格 21,000円 201300001

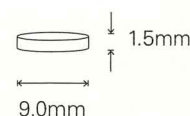

特別価格にてご提供!




コラーゲン使用人工骨

ボナーク® ロッドタイプ

包装単位(容量) ロッド1個入り(約0.6mL)

製品サイズ 厚さ 10.0mm 直径 9.0mm

標準価格 13,650円 201300002

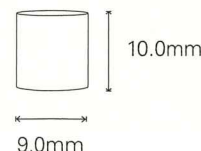

特別価格にてご提供!

特別価格のお問い合わせについては、お出りのディーラーまでお願いします。※製品生産・出荷体制の都合により、納期を要する場合がございますので予めご了承ください。

- 販売名 ボナーク ●一般的名称 コラーゲン使用人工骨 医療機器の分類 高度管理医療機器(クラスⅣ) 医療機器承認番号 301008ZX00025000 製造販売 東洋紡株式会社
- Bonarc®およびボナーク®は東洋紡(株)のコラーゲン使用人工骨を示す(登録)商標です。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2026年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 東洋紡株式会社

大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 〒530-0001

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525

東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)

<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com


Bonarc®を用いたサイナスリフト症例




術前の口腔内写真: 左上6欠損症例




術前のCT画像

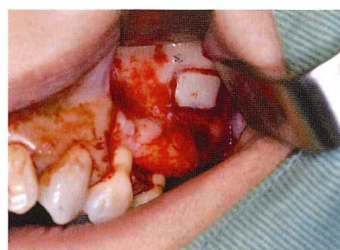

骨窓の形成

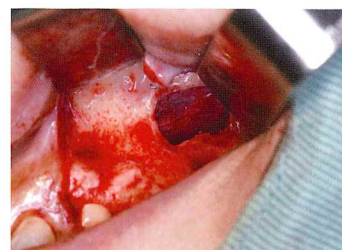

上顎洞粘膜剥離後

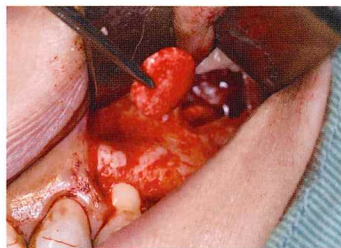

移植材の填塞: ボナークを使用。ディスクは上顎洞粘膜に沿って填塞が可能。



骨窓の復位




術直後のCT画像: ボナークはX線にて透過性が高く、造影されにくい。



術後9か月のCT画像: 骨が再生されるに従い不透過像が広がる。

症例提供: おのだ歯科医院 鉄田 豊和 院長先生


SPIインプラントとBonarc®を用いた臼歯部における抜歯後待時インプラント埋入

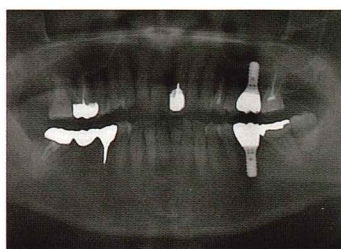


初診時のオルソパントモグラフィー




下顎右側第二小臼歯の歯根破切と線下カリエスを認める

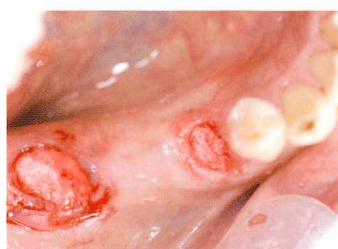


抜歯後、歯槽堤保存術(以下ARPとする)を行う。抜歯窩にボナークを辺縁骨まで充填

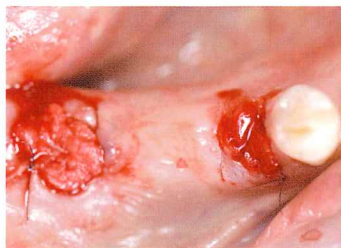


コラーゲン膜にて抜歯窩を開放創で閉鎖する。ARP後、矢状面のCBCTとオルソパントモグラフィー撮影時、ボナークはX線透過性であることが確認出来る。

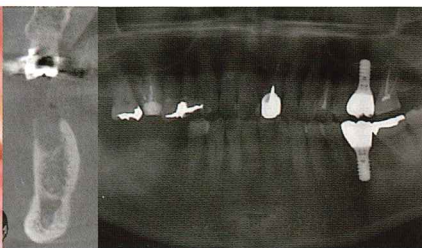


術後6ヶ月後のインプラント埋入前の口腔内写真

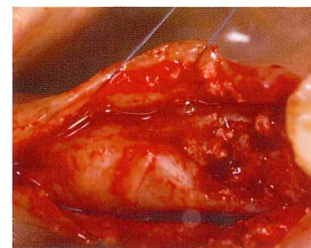


全層弁で歯肉剥離インプラント埋入前、ARP部は表層にボナークが残存しているが直下に新生骨を認める。

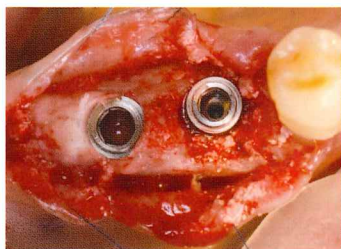

ボナークでのARP後、GBRなしでSPIインセラインプラントを埋入ISO値は平均65で初期固定を獲得できている。埋入後の矢状面CBCT、ボナークよりARPした部分がX線不透過像になっていることが確認できる。

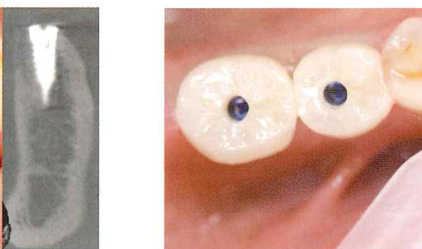

最終補綴物装着時の口腔内写真とオルソパントモグラフィー

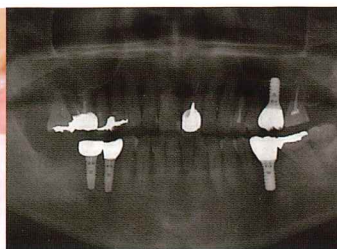

症例提供: オカダ歯科クリニック 岡田 素平太 院長先生