

歯科専売 義歯洗浄剤

フィジオクリーン

# キラリ

錠剤

義歯のヌメリ  
が気持ち悪い

汚れが落ちず  
に困っている

新しい  
義歯を作った

二酸化チタン  
触媒効果



自信をもって  
オススメできる  
洗浄剤 キラリ。

- |           |                  |                |                 |                   |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 長時間<br>発泡 | 二酸化<br>チタン<br>配合 | 温水<br>効果       | 色素<br>除去        | 除菌<br>カンジダ菌<br>細菌 |
| 脱臭        | 刺激臭<br>カット       | 総<br>入れ歯<br>対応 | 部分<br>入れ歯<br>対応 | 金属<br>対応          |

# キラリをオススメする理由

わ け



ヌメリが気持ち悪い→

## ヌメリ・臭いをスッキリ洗浄!




汚れが剥がれ落ちるイメージ

義歯のヌメリの原因はバイオフィームです。キラリ錠剤は二酸化チタンの触媒効果でバイオフィームに浸透して剥がし落とします。汚れの再付着を防ぎカンジダ菌や細菌を除菌・脱臭します。また無香料ですので、刺激臭が苦手な方にもお勧めできます。

カンジダバイオフィームの除去効果※



※第52回日本歯科理工学会「二酸化チタンを応用した義歯洗浄剤のカンジダバイオフィームに対する除去効果」(広島大学 二川浩樹ほか)より抜粋

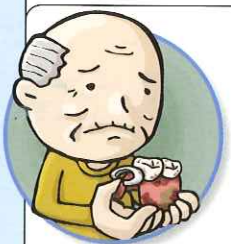

落ちにくい汚れ→

## タバコのヤニやしつこい着色汚れをしっかりと洗浄!

長時間発泡により、配合している各種成分をすみずみまで行き渡らせ、汚れをしっかりと洗浄します。40度くらいのぬるま湯で一晩浸け置きすると、より洗浄効果があります。 ※レジンや人工歯内部に入り込んだ汚れや強固な歯石には効果がありません。院内にて修理・洗浄の後にご利用ください。



洗浄後▶




新しい義歯を作った→

## 義歯を傷めない中性タイプ。

洗浄・除菌効果の高いキラリですが、義歯を痛めないpH中性に配合しています。

金属の黒ずみ化を抑え、チタンやパラジウム合金などの金属床義歯や部分義歯にも使用可能です。

洗浄後の金属への影響

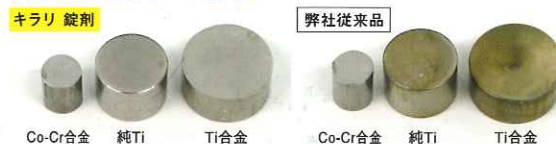

### 義歯洗浄剤 フィジオクリーン キラリ錠剤

■標準価格 30包入 (3g×30) 750円 453-570  
希望患者価格 945円(税込)  
[セット包装: 6箱入]



### 義歯洗浄容器 フィジオクリーン キラリ錠剤 入れ歯保温洗浄容器

■寸法  
外寸: W129×D94×H79mm (取手部含む)  
内寸: φ83×H60mm  
■標準価格 400円 453-571  
希望患者価格 525円(税込)

「キラリのヒミツ」と  
「入れ歯のお手入れQ&A」  
がわかる患者さん向けリーフレット



フィジオクリーンキラリ錠剤  
患者向けリーフレット  
■標準価格 30枚入 550円 453581

関連商品 (クリニック用)



フィジオクリーン プロ  
歯石用  
■標準価格 3,900円 453-551



フィジオクリーン プロ  
色素用  
■標準価格 3,900円 453-552



色素用に  
フィジオクリーン  
パワーアップライト  
■標準価格 12,200円 453-553

●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2011年8月現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりませんが、希望患者価格は税込の総額表示です。●ご使用に際しましては、製品の取扱説明書を必ずお読みください。

製造販売 **NISSIN**

西日本営業所 京都市中京区烏丸通り二条下る秋野町4丁目13番地  
京都第一生命泉屋ビル8階 〒604-0847 TEL:075-257-7255  
東日本営業所 東京都台東区台東4-14-8 〒110-0016 TEL:03-3836-3691  
www.nissin-dental.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161  
www.dental-plaza.com