

Solfy F

ソルフィー F



Solfy F

使いやすさのデザイン

使いやすさを追求したデザインと多様な機能を併せ持つ超音波スケーラー ソルフィーFは、スケーリング、ペリオでの使用はもちろん、内蔵された根管長測定機能との連動により、エンド分野での使用を大きくサポートします。また、ワイドレンジのパワーと豊富なチップラインナップにより、さまざまな臨床に対応し、効率的な治療を実現します。



New Features



効率的なオートチューニング

ソルフィーFは、各チップごとに自動的に適した周波数で駆動します。チップに適した周波数で振動させることで、そのチップの能力を効率良く引き出すことが可能です。また、歯牙に押し付けると振動が弱くなるソフトモードも選択できます。


LEDライト付ハンドピース

ハンドピース先端から照射される明るいLEDライトは、治療部位を見やすくしてより精密な治療をサポートします。また、従来のハロゲンライトに比べ、ランプの寿命が長く、熱くなることもありません。

*ライト無しハンドピースもあります。

パワーモード

Perio、Endo、Scaling、Boostの4種類のパワーモードがあり、使用用途に応じてすばやく希望のパワーを呼び出すことが可能です。

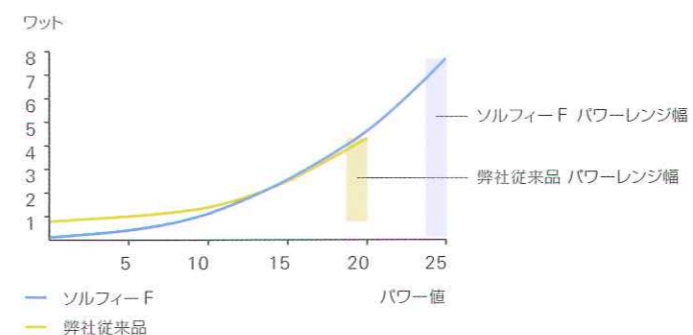

幅広い臨床に対応するワイドパワーレンジ
25段階のパワーレンジにより、ペリオ分野で使用する弱い振動から、クラウン除去などに使用する強い振動まで幅広い臨床に対応することが可能です。



Wide Tip Variation

豊富なチップラインナップ

エンド、ペリオ、スケーリングの各分野に合わせた40種類を超える専用チップをラインナップしています。これらのチップは、ソルフィーにも使用することができます。

*下に挙げているものは代表的なチップです。その他のチップに関しては別紙をご覧ください。

Perio

ペリオチップ P2

- 歯肉縁上、縁下、根分岐部のスケーリング、洗浄、清掃



ルートプレーニングチップ P5

- 歯肉縁上、縁下、根分岐部のスケーリング、洗浄、清掃



P5 歯肉縁下の歯石除去の使用例

Scaling

ユニバーサルチップ S1

- スケーリング、洗浄、清掃



スケーリングチップ S4

- スケーリング、洗浄、清掃



S4 歯肉縁上のスケーリングの使用例

Endo

ルートキャナルチップ E1

- 根管内の異物、セメントの除去
- 根管の拡大、洗浄 他



アンカーチップ E10

- 根管内の異物等の除去
- 根管の歯質の除去 他



E10 ガッタパーチャ除去の使用例

Retro Endo

レトロチップ R1

- 逆根管治療時の根管切削




レトロファイル RF2D

エンドチップM EH3に接続して
- 逆根管治療時の根管切削



RF2D 逆根管充填窩形成の使用例

Integrated Root Canal Measurement

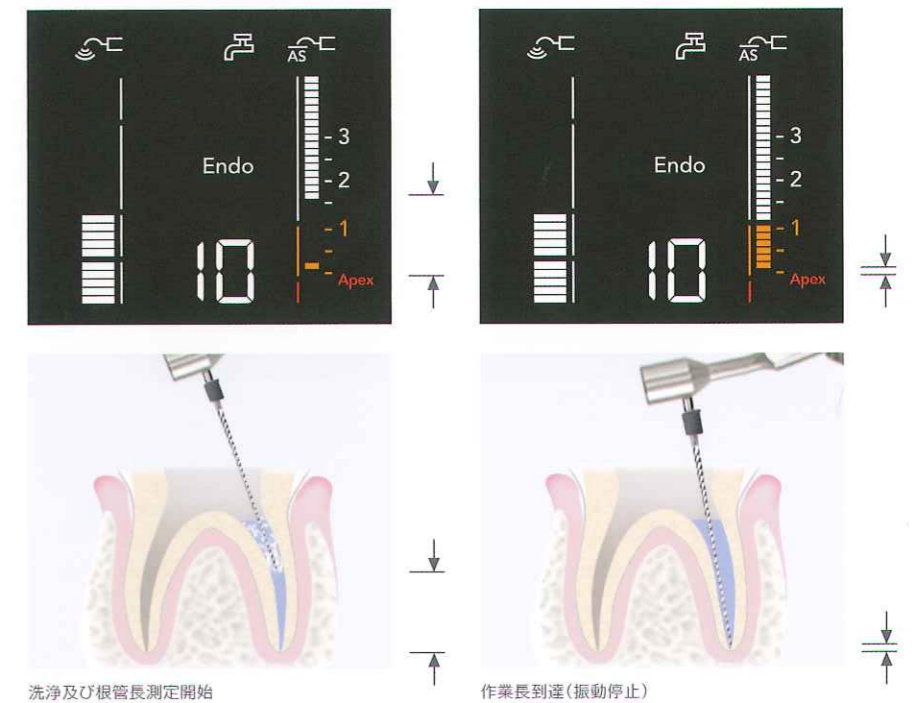

根管長測定機能

根管長測定機能使用時は、根管内に挿入されたチップやファイル先端の根管内位置が、ディスプレイに表示されます。根尖付近の繊細な動きにもリアルタイムに反応します。測定しながら洗浄・拡大することができ、より精度の高い治療を実現します。


根管長測定機能は、付属のプロープコードと対極、ファイルホルダーを使用することにより、根管長測定器として使用することも可能です。



オートアピカルストップ

アピカルストップ機能をオンにすると、あらかじめ任意に設定した作業長にチップ、ファイルの先端が到達した際、自動的に振動が停止し、オーバーインストルメントの危険性を低減します。

Handling and Navigation

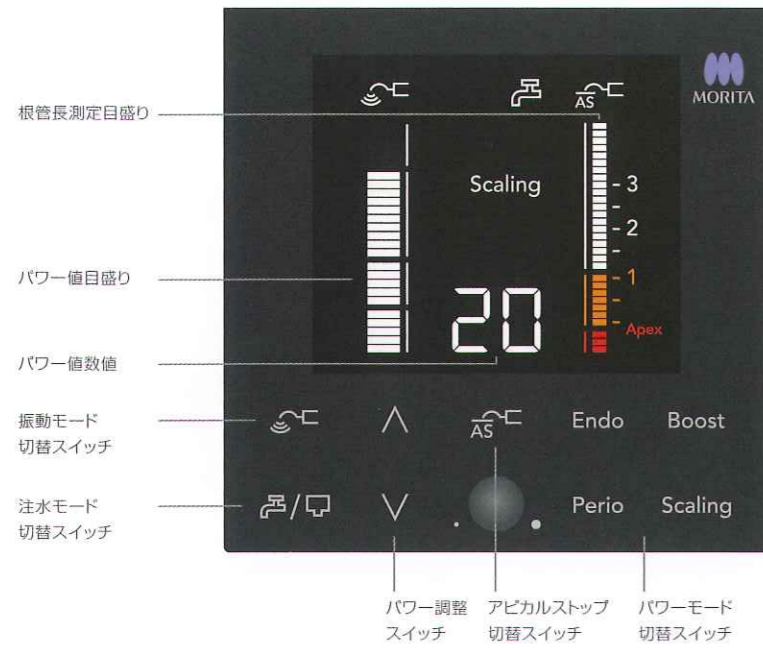

高い操作性

直感的に操作できるアイコンと見やすい液晶ディスプレイは、治療中でも認識しやすく操作ミスを防ぎます。また、操作パネルはフラットで日々のメンテナンスも容易です。



右利き、左利きの両方に対応

ハンドピースの位置を左右対称の配置に変更出来るので、左利きの方でも操作性を損なうことなく、使用することができます。

ボトル付も選択可能

煩わしい給水接続をすることなく、本体に付属するボトルに精製水などを入れて使用することが出来ます。

*ボトル付きタイプは、標準でLEDライト付きハンドピースとなります。

Specification


販売名:	ソルフィー F
型式:	SC-7000
電源電圧:	DC24V ACアダプタ: AC 100V
消費電力:	本体 40VA、ACアダプタ 63W
質量:	本体 (ボトル無し) 約450g、ハンドピース 約60g
一般的名称:	歯科用多目的超音波治療器
機器の分類:	管理医療機器 (クラスII) 特定保守管理医療機器
医療機器認証番号:	224ACBZX00016000
法定耐用年数 (償却年数):	6年

付属品: ACアダプタ、フットスイッチ、ユニバーサルチップ S1 (2本)、ルートプレーニングチップ P5 (1本)、トルクレンチ (1個)、注水ロワイヤー (1本)、チップ着脱工具 (1個)、プローブコード (1本)、ファイルホルダー (3本)、根管長テスター (1個)、対極 (5本)、チップ磨耗ゲージ (1枚)


標準価格:	ソルフィー F	248,000円 (商品コード 107903)
	ソルフィー F ライト付き	288,000円 (商品コード 107904)
	ソルフィー F ボトル、ライト付き	358,000円 (商品コード 107905)

外観寸法図 (mm):

ボトル無し

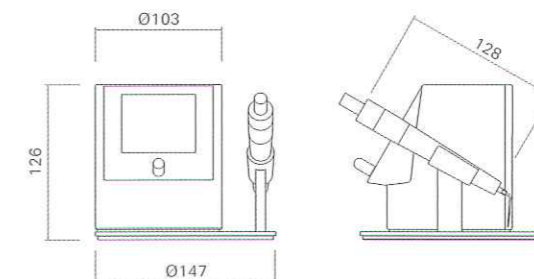

ボトル付き

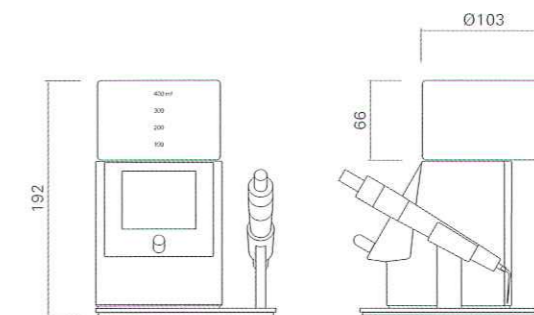

Product Design: f/p design, Germany
Interface Design: f/p design, Germany

Solfy F Tip Line Up



Perio

キュレットチップ P1



- 歯肉縁上、縁下、根分岐部の
スケーリング、洗浄、清掃

最大使用パワー値： ソルフィー F 7
ソルフィー 2
標準価格： 7,500円
商品コード： 107922 - P1

キュレットチップ P3



- 歯肉縁上、縁下、根分岐部の
スケーリング、洗浄、清掃

最大使用パワー値： ソルフィー F 5
ソルフィー 0.5
標準価格： 7,500円
商品コード： 107922 - P3

ペリオチップ P2



- 歯肉縁上、縁下、根分岐部の
スケーリング、洗浄、清掃

最大使用パワー値： ソルフィー F 7
ソルフィー 0.5
標準価格： 7,500円
商品コード： 107923 - P2

ペリオチップ P4



- 歯肉縁上、縁下、根分岐部の
スケーリング、洗浄、清掃

最大使用パワー値： ソルフィー F 10
ソルフィー 0.5
標準価格： 7,500円
商品コード： 107923 - P4

ファークーションチップ P20L



- 歯肉縁上、縁下、根分岐部の
スケーリング、洗浄、清掃

最大使用パワー値： ソルフィー F 7
ソルフィー 0.5
標準価格： 7,500円
商品コード： 107924 - P20L

ファークーションチップ P20R



- 歯肉縁上、縁下、根分岐部の
スケーリング、洗浄、清掃

最大使用パワー値： ソルフィー F 7
ソルフィー 0.5
標準価格： 7,500円
商品コード： 107924 - P20R

ルートブレイニングチップ P21L



- 歯肉縁上、縁下、根分岐部の
スケーリング、洗浄、清掃
- 歯面の清掃 (根面の滑沢、
ルートブレイニング)

最大使用パワー値： ソルフィー F 10
ソルフィー 5
標準価格： 7,000円
商品コード： 107077 - P21L

ルートブレイニングチップ P21R



- 歯肉縁上、縁下、根分岐部の
スケーリング、洗浄、清掃
- 歯面の清掃 (根面の滑沢、
ルートブレイニング)

最大使用パワー値： ソルフィー F 10
ソルフィー 5
標準価格： 7,000円
商品コード： 107077 - P21R

ルートブレイニングチップ P5



- 歯肉縁上、縁下、根分岐部の
スケーリング、洗浄、清掃

最大使用パワー値： ソルフィー F 10
ソルフィー 3
標準価格： 7,500円
商品コード： 107077 - P5

ラウンドポイント PP1



エンドチップA EH1に接続して
- 根分岐部の歯石の除去
- 歯肉縁下の洗浄
- 歯面の清掃、根面滑沢、ルート
ブレイニング

エンドチップB EH2に接続して
- 根分岐部の歯石の除去
- 歯肉縁下の洗浄
- 歯面の清掃、根面滑沢、ルート
ブレイニング

最大使用パワー値： ソルフィー F 10
ソルフィー 5
標準価格： 3本入 13,800円
商品コード： 107066

ペリオポイント PP2L



エンドチップM EH3に接続して
- 歯肉縁下、根分岐部の歯石の
除去、洗浄
- 歯面の清掃、根面滑沢、ルート
ブレイニング

最大使用パワー値： ソルフィー F 7
ソルフィー 3
標準価格： 3本入 7,000円
商品コード： 107925 - PP2L

ペリオポイント PP2R




エンドチップM EH3に接続して
- 歯肉縁下、根分岐部の歯石の
除去、洗浄
- 歯面の清掃、根面滑沢、ルート
ブレイニング

最大使用パワー値： ソルフィー F 7
ソルフィー 3
標準価格： 3本入 7,000円
商品コード： 107925 - PP2R

Endo


ルートキャナルチップ E1

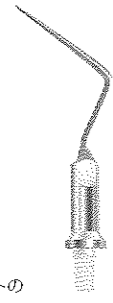

- 根管内の異物やセメントの除去
- 根管の拡大、洗浄
- 根管の歯質（軟化象牙質等）の除去
- 根管口の拡大形成、小さい窩洞の修正

最大使用パワー値: ソルフィー F 10
ソルフィー 3
標準価格: 7,000円
商品コード: 107059


エンドチップ E2

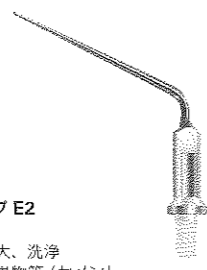

- 根管の拡大、洗浄
- 根管内の異物等（セメント、ガッタパーチャポイント、シーラー、破折片等）の除去

最大使用パワー値: ソルフィー F 6
ソルフィー 0.5
標準価格: 7,000円
商品コード: 107930 - E2


エンドチップ E3

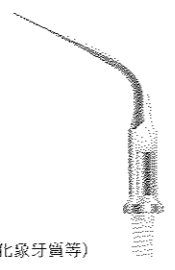

- 根管の歯質（軟化象牙質等）の除去
- 根管口の拡大形成、小さい窩洞の修正

最大使用パワー値: ソルフィー F 10
ソルフィー 3
標準価格: 7,000円
商品コード: 107930 - E3


エンドチップ E4

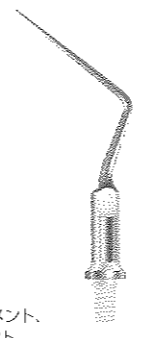

- 根管内の異物等（セメント、ガッタパーチャポイント、シーラー、破折片等）の除去
- 根管の歯質（軟化象牙質等）の除去
- 根管口の拡大形成、小さい窩洞の修正

最大使用パワー値: ソルフィー F 10
ソルフィー 0.5
標準価格: 7,000円
商品コード: 107930 - E4


超音波用ダイヤファイルダブル

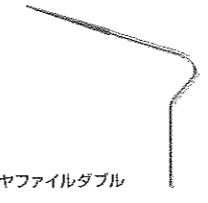

- エンドチップ M EH3 に接続して
- 根管の歯質（軟化象牙質等）の除去
- 根管口の拡大形成、小さい窩洞の修正
- 根管内の異物等（セメント、ガッタパーチャポイント、シーラー、破折片等）の除去

最大使用パワー値: ソルフィー F 10
ソルフィー 3
標準価格: 6本入 4,500円
商品コード: 249063


アンカーチップ E10

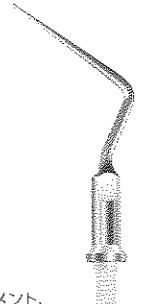

- 根管内の異物等（セメント、ガッタパーチャポイント、シーラー、破折片等）の除去
- 根管の歯質（軟化象牙質等）の除去
- 根管口の拡大形成、小さい窩洞の修正

最大使用パワー値: ソルフィー F 5
ソルフィー 0.5
標準価格: 9,500円
商品コード: 107926

ラウンドチップ E20D

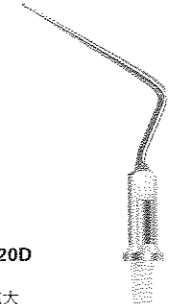

- 歯根破折部の拡大
- 根管内の異物等（セメント、ガッタパーチャポイント、シーラー、破折片等）の除去
- 根管の歯質（軟化象牙質等）の除去
- 根管口の拡大形成、小さい窩洞の修正

最大使用パワー値: ソルフィー F 13
ソルフィー 4
標準価格: 9,500円
商品コード: 107927

ダイヤモンドポイント S EP1D



- エンドチップ A EH1 に接続して
- 歯の根管の拡大
- 歯の切削、小さい窩洞の修正

最大使用パワー値: ソルフィー F 10
ソルフィー 5
標準価格: 3本入 5,500円
商品コード: 107076 - EP1D

ダイヤモンドポイント L EP2D




- エンドチップ A EH1 に接続して
- 歯の根管の拡大
- 歯の切削、小さい窩洞の修正

最大使用パワー値: ソルフィー F 7
ソルフィー 5
標準価格: 3本入 5,500円
商品コード: 107076 - EP2D

Retro Endo


レトロチップ R1

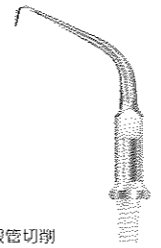

- 逆根管治療時の根管切削

最大使用パワー値: ソルフィー F 10
ソルフィー 5
標準価格: 8,500円
商品コード: 107928 - R1


レトロチップ R2

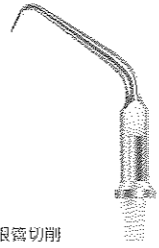

- 逆根管治療時の根管切削

最大使用パワー値: ソルフィー F 10
ソルフィー 5
標準価格: 8,500円
商品コード: 107928 - R2


レトロチップ R3L

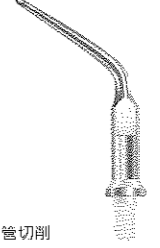

- 逆根管治療時の根管切削

最大使用パワー値: ソルフィー F 10
ソルフィー 5
標準価格: 8,500円
商品コード: 107928 - R3L

レトロチップ R3R

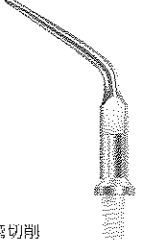

- 逆根管治療時の根管切削

最大使用パワー値: ソルフィー F 10
ソルフィー 5
標準価格: 8,500円
商品コード: 107928 - R3R

レトロファイル RF1D



- エンドチップ M EH3 に接続して
- 逆根管治療時の根管切削

最大使用パワー値: ソルフィー F 7
ソルフィー 0.5
標準価格: 3本入 12,500円
商品コード: 107929 - RF1D


レトロファイル RF2D



- エンドチップ M EH3 に接続して
- 逆根管治療時の根管切削

最大使用パワー値: ソルフィー F 7
ソルフィー 0.5
標準価格: 3本入 12,500円
商品コード: 107929 - RF2D


レトロファイル RF3LD

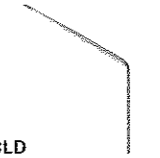

- エンドチップ M EH3 に接続して
- 逆根管治療時の根管切削

最大使用パワー値: ソルフィー F 7
ソルフィー 0.5
標準価格: 3本入 12,500円
商品コード: 107929 - RF3LD

レトロファイル RF3RD

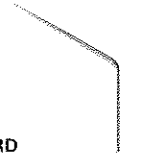

- エンドチップ M EH3 に接続して
- 逆根管治療時の根管切削

最大使用パワー値: ソルフィー F 7
ソルフィー 0.5
標準価格: 3本入 12,500円
商品コード: 107929 - RF3RD

ソルフィーウルトラソニックファイル



- エンドチップ A EH1 に接続して
- 根管の拡大、洗浄、形成
- 根管内の異物除去
- サイズは # 10 ~ # 40、アソート

- エンドチップ B EH2 に接続して
- 根管の拡大、洗浄、形成
- 根管内の異物除去

最大使用パワー値: ソルフィー F 6~10
ソルフィー 1.5~3
標準価格: 6本入 各1,900円
商品コード: 107056 - 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ASS

超音波用エンドファイルシングル



- エンドチップ M EH3 に接続して
- 根管の歯質（軟化象牙質等）の除去
- 根管口の拡大形成、小さい窩洞の修正
- 根管内の異物等（セメント、ガッタパーチャポイント、シーラー、破折片等）の除去

最大使用パワー値: ソルフィー F 10
ソルフィー 3
標準価格: 6本入 3,500円
商品コード: 249060

超音波用エンドファイルダブル



- エンドチップ M EH3 に接続して
- 根管の歯質（軟化象牙質等）の除去
- 根管口の拡大形成、小さい窩洞の修正
- 根管内の異物等（セメント、ガッタパーチャポイント、シーラー、破折片等）の除去

最大使用パワー値: ソルフィー F 10
ソルフィー 3
標準価格: 6本入 3,500円
商品コード: 249061

超音波用ダイヤファイルシングル



- エンドチップ M EH3 に接続して
- 根管の歯質（軟化象牙質等）の除去
- 根管口の拡大形成、小さい窩洞の修正
- 根管内の異物等（セメント、ガッタパーチャポイント、シーラー、破折片等）の除去

最大使用パワー値: ソルフィー F 10
ソルフィー 3
標準価格: 6本入 4,500円
商品コード: 249062


Endo Tips

エンドチップ A EH1



標準価格: 8,500円
商品コード: 107054

エンドチップ B EH2

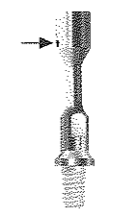

標準価格: 8,500円
商品コード: 107070

エンドチップ M EH3



標準価格: 11,700円
商品コード: 107071

Scaling

ユニバーサルチップ S1

- スケーリング、洗浄、清掃

最大使用パワー値： ソルフィー F 20
ソルフィー 6
標準価格： 7,000円
商品コード： 107051



ストレートチップ S2

- 歯石（主に歯周ポケット）の除去
- 洗浄（窩洞、根管、盲のう、歯周ポケット）
- 根管内の異物等（セメント、ガッタパーチャポイント、シーラー、破折片等）の除去

最大使用パワー値： ソルフィー F 20
ソルフィー 6
標準価格： 7,000円
商品コード： 107058



スケーリングチップ S3

- スケーリング、洗浄、清掃（主に裂溝）

最大使用パワー値： ソルフィー F 20
ソルフィー 6
標準価格： 7,000円
商品コード： 107920 - S3



スケーリングチップ S4

- スケーリング、洗浄、清掃（主に裂溝）

最大使用パワー値： ソルフィー F 16
ソルフィー 4
標準価格： 7,000円
商品コード： 107920 - S4



フラットチップ S11

- 広い歯面のスケーリング、洗浄、清掃（タバコのヤニ等の汚染物の除去）

最大使用パワー値： ソルフィー F 20
ソルフィー 6
標準価格： 7,000円
商品コード： 107921 - S11



フラットチップ S12

- 広い歯面のスケーリング、洗浄、清掃（タバコのヤニ等の汚染物の除去）

最大使用パワー値： ソルフィー F 20
ソルフィー 6
標準価格： 7,000円
商品コード： 107921 - S12



ソルフィーポイント SP1

エンドチップA EH1に接続して
- 歯石（主に歯肉縁下）の除去
- 小さい窩洞の修正
- 歯面の清掃

エンドチップB EH2に接続して
- 歯石（主に歯肉縁下）の除去
- 小さい窩洞の修正
- 歯面の清掃

最大使用パワー値： ソルフィー F 15
ソルフィー 6
標準価格： 6本入 1,500円
商品コード： 107065



Others

リムーバルチップ S20

- 鑄造修復、セメント、アマルガム等の除去

最大使用パワー値： ソルフィー F 22
ソルフィー 7
標準価格： 7,000円
商品コード： 107052



超音波メスチップ S30

- 歯周組織（歯肉、歯根膜、歯そう骨）の切開・切除

最大使用パワー値： ソルフィー F 22
ソルフィー 7
標準価格： 19,800円
商品コード： 107078



イリゲーションコネクタ P30

クリーンウォッシングニードルを接続して使用
- 歯周ポケット洗浄

最大使用パワー値： ソルフィー F 10
ソルフィー 6
標準価格： 3,400円
商品コード： 107068



クリーン・ウォッシングニードル

イリゲーションコネクタP30に接続して使用

27G ソフト 20本入
標準価格：4,000円 商品コード： 515034
30G ソフト 20本入
標準価格：4,000円 商品コード： 515035
27G ハード 100本入
標準価格：12,000円 商品コード： 515036



*ここに掲載のチップは、ソルフィーFとソルフィー双方に使用できます。

販売名：ソルフィー F 一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ）特定保守管理医療機器 医療機器認証番号：224ACBZX00016000
一般的名称：電動式歯科用ファイル 機器の分類：管理医療機器（クラスⅡ） 医療機器認証番号：22000BZX01628000 製造販売：マニー株式会社 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 〒321-3231

発売 株式会社 **モリタ** 大阪本社：大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525 東京本社：東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
製造販売・製造 株式会社 **モリタ製作所** 本社工場：京都府京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533 T 075. 611 2141 久御山工場：京都府久世郡久御山町市田新珠城190 〒613-0022 T 0774. 43 7594
www.dental-plaza.com

Diagnostic and Imaging Equipment

Treatment Units

Handpieces and Instruments

Endodontic System

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries



発売

株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

製造販売・製造

株式会社 **モリタ製作所**

本社工場 京都府京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533 T 075. 611 2141
久御山工場 京都府久世郡久御山町市田新珠城190 〒613-0022 T 0774. 43 7594

Morita Global Site: www.morita.com

More Infos about Products: www.dental-plaza.com

Catalog Design: f/p design, Germany

ご使用に際しましては、製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください。
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

PUB: NO. M207.1830-1-000.1303.67,000GK-KO