



NEX NiTi ファイル

切削効率と柔軟性のバランスを考慮したNiTiロータリーファイル。初めてご使用される方も効率よく根管の拡大形成が行えます。

術者が考える理想のSEQUENCEを選択できる豊富なラインナップ

テーパー	サイズ (#)												長さ
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
.08													19mm
.06													21mm
													25mm
													31mm
.04													21mm
													25mm
													31mm
.02													21mm
													25mm
													31mm

Aセット クラウンダウン法

歯冠側から始まり、根尖側で終わる根管形成

フルレンジステックと比較して

- ・ファイル先端が根管壁に比較的拘束されにくい
- ・破折のリスクが比較的低い
- ・レッジやトランスポーテーションがおきるリスクが比較的高い
- ・根管の彎曲に追従しにくい



フレア形成用ファイル

ストレートラインアクセスを作るため、根管口付近の張出している象牙質を削除し、ファイルがまっすぐに入るようにするファイルです。



Bセット フルレンジステック

ファイルを作業長まで到達させながら行う根管形成

クラウンダウン法と比較して

- ・ファイル先端が根管壁に比較的拘束されやすい
- ・破折のリスクが比較的高い
- ・根管形成が比較的きれいにできる
- ・根管の彎曲に追従しやすい
- ・ファイルの交換回数が少ない



グライドパス用ファイル

NiTiロータリーファイルの破折を予防するために、予備拡大を行うファイルです。



効率良く根管の拡大形成が行えるファイル

コア断面


鋭利な三角形の断面をもつ刃部で、効率よく根管を拡大形成。

ブレード

切削片を根尖方向に押し出さない独自のピッチ構造。

先端部

刃を持たない安全形状の先端部。

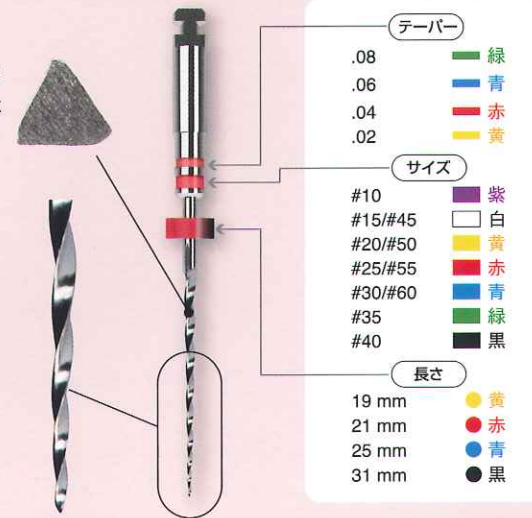

使用頻度の高いファイルはお得な「バリューパック10」

使用頻度の高いファイル (13形態26種類*) については、お得な10本包装の「バリューパック10」をご用意いたしました。

- バリューパック10 (10本包装) : 希望医院価格9,500円
- 5本包装 : 希望医院価格5,900円

*バリューパック10の形態については最終画面でご確認ください。

使用回数を確認できる「セーフティメモディスク」 近日発売

別売のセーフティメモディスクは、ファイルの使用回数の目安としてご使用いただけます。ファイルを使用するごとに*1枚ずつつぎり、8枚全てがなくなったらファイルを交換してください。

*負荷のかかる拡大形成に使用した場合は、2~3枚ちぎってください。

根管の拡大形成のSTEP

STEP1

アクセス~アウトライン

STEP2

ストレートラインアクセス

STEP3

ネゴシエーション (穿通性の確認)

STEP4

グライドパス (予備拡大)

STEP5

NEX NiTi ファイルによる根管形成
 ・クラウンダウン法の場合
 ・フルレンジステックの場合



STEP6

根尖部の拡大

STEP1 アクセス~アウトライン




STEP2 ストレートラインアクセス

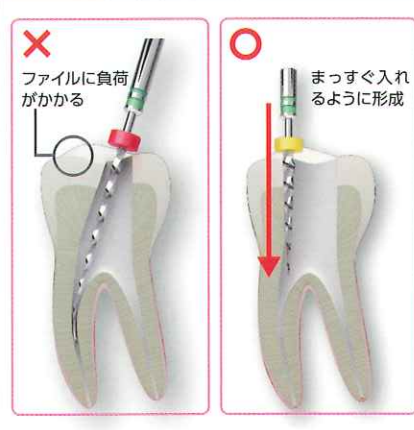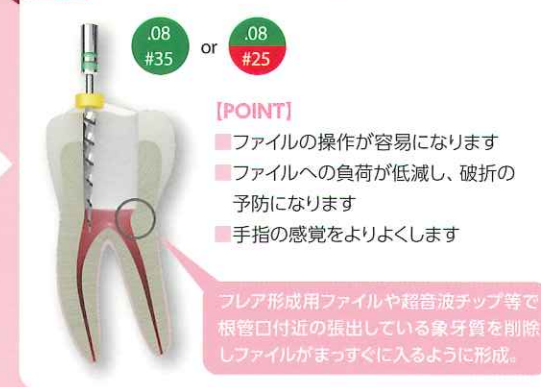


STEP3 ネゴシエーション (穿通性の確認)



STEP4 グライドパス (予備拡大)

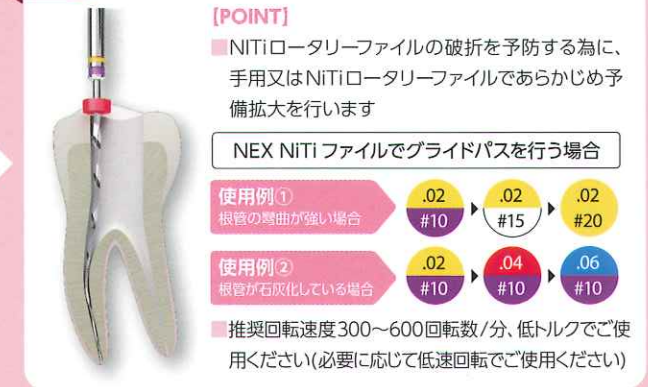


STEP5 Aセット クラウンダウン法

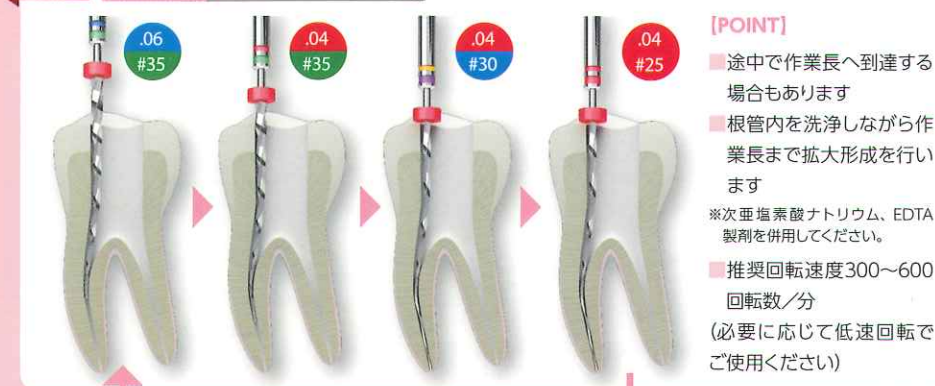

STEP6 根尖部の拡大



STEP5 Bセット フルレンジステック

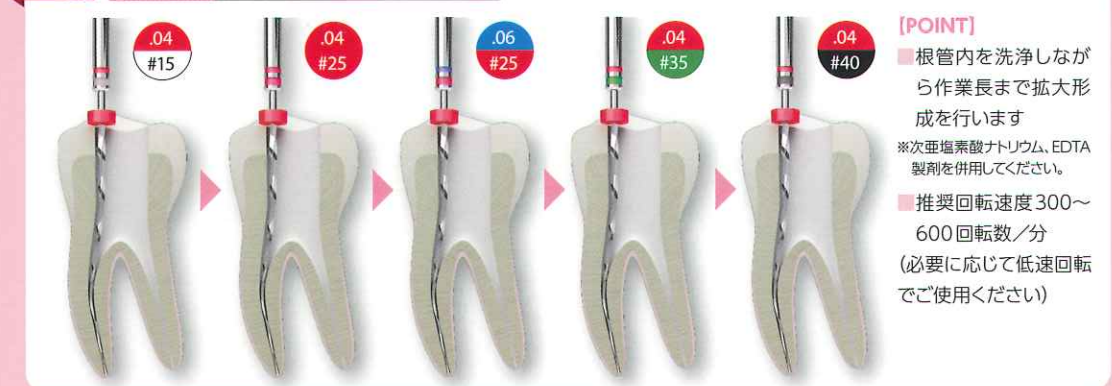

■作業長まで到達しない場合は最初のファイルに戻って作業を繰り返します。



覆髄材 ジーシー NEX MTAセメント

包装・希望医院価格●0.9g 1函(0.3g×3包)=9,000円、3.0g 1函(0.3g×10包)=21,000円
管理医療機器 225AKBZX00062000
粉末のみです。液は日本薬局方 注射用水をご使用ください。



歯科用NiTiロータリーファイル ジーシー NEX NiTi ファイル

セット包装・希望医院価格●アソートセットA 1函:6本入(＃35/08*、＃35/06、＃35/04、＃30/04、＃25/04、＃40/04 各1本入)=各5,900円、アソートセットB 1函:6本入(＃25/08*、＃15/04、＃25/04、＃25/06、＃35/04、＃40/04 各1本入)=各5,900円21mm または25mm ※印は長さ19mmです。
単品包装・希望医院価格●1函:5本入(単一形態)=各5,900円、バリューパック10 1函:10本入(単一形態)=各9,500円(バリューパック10は 囲みの形態となります。)

テーパー	サイズ(＃)										長さ	
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		60
.08												19mm
.06												21mm
												25mm
												31mm
.04												21mm
												25mm
.02												31mm
												21mm
												25mm

■ 囲みはバリューパック10もご用意しています。
＃10/06、＃10/04、＃10/02、
＃15/04、＃15/02、＃25/06、
＃25/04、＃30/04、＃35/06、
＃35/04、＃40/06、＃40/04、
＃40/02(長さはいずれも21mm
または25mm)

Aセット クラウンダウン法

テーパー	サイズ(＃)			
	15	20	30	40
.08				
.06				
.04				

Bセット フルレンジテクニック

テーパー	サイズ(＃)			
	15	20	30	40
.08				
.06				
.04				

管理医療機器 225AABZX00077000
製造販売元 株式会社 ジーシー デンタルプロダクツ

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※製品の仕様および外観は、改良のためお断りなく変更することがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の実測データは、2013年8月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。



ガターパーチャポイント(カラーコード) ジーシー ガターパーチャソフトポイント

種類●3種=.02、.04(NEX用)、.06(NEX用)

テーパー	サイズ(＃)	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90
		.02										
.04(NEX用)、.06(NEX用)												

包装・希望医院価格●
.02 1函:120本(＃30-＃80各形態別)=2,740円、1函:60本(＃90)=2,740円、組合せ包装 1函:120本(＃30-＃55各20本)=2,740円
.04(NEX用)、.06(NEX用) 1函:60本(＃25-＃45各形態別)=2,740円、組合せ包装 1函:60本(＃25-＃45各12本)=2,740円
管理医療機器 221AABZX00076000
製造販売元 大成歯科工業株式会社



歯科用根管長測定器 ルートナビ

寸法●W60mm×D60mm×H86.5mm
重量●76g(単4電池含まず)
セット内容●本体、ルートナビプローブ(1.8m 1本)、ルートナビ ファイルクリップ(3本)、ルートナビ リップフック(3本)、乾電池(単4電池 3本)、ルートナビ テスター(1個)
希望医院価格●99,500円
管理医療機器 特定保守管理医療機器 224ALBZX00015A01
製造販売元 株式会社 ナカニシ

近日発売

NEX MTAブロック



練り上がったMTAセメントを一定量採取・デリバリーできる便利なブロックです。

NEX NiTiスタンド



14本のファイルを自由に収納できるスタンドです。

セーフティメモディスク



ファイルの使用回数を確認するためのディスクです。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3-2-14 東京都板橋区蓮沼町76-1

DIC(デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

http://www.gcdental.co.jp

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286