

ガターパーチャ ソフトポイント 〈NEX用〉


NEX NiTiファイルに対応した .04テーパーと.06テーパー新登場!

加圧に対する変形性に優れ、より緊密な根管封鎖が可能

根管充填においては、根管内におけるシーラーの比率を減少させ、ガターパーチャの比率を高めることが、長期の封鎖性の向上に有効であるといわれています。ガターパーチャソフトポイントは、ガターパーチャの比率を高めるために重要な加圧に対する変形性に優れています。

●根尖へのフィット感が良く、抵抗感がより得やすい


●伸びが良く、アクセサリーポイントと一体化しやすい

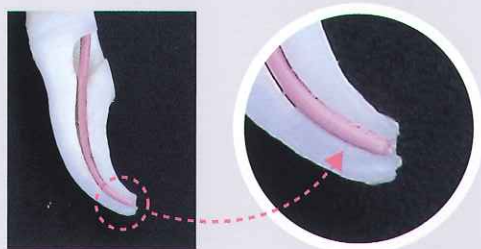

常温ではコシがあり、体温付近では変形しやすい

ガターパーチャソフトポイントは常温ではコシがありますが、37℃の雰囲気下で両端を把持して引き伸ばすと、大きな伸びが観察されます。また、加圧に対して変形しやすいばかりでなく、戻ったり、ちぎれたりしにくい特性をもっているため、彎曲根管などのスプレダーを挿入しにくい症例でも、より根尖に近い部位まで到達し、良好な適合状態が期待できます。

●体温付近でガターパーチャソフトポイントは伸びが良く、彎曲根管にも適しています

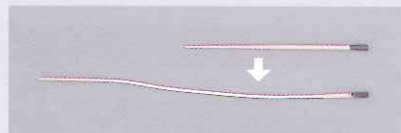

シーラーとの馴染みが良好

ガターパーチャソフトポイントはシーラーとの馴染みも良好です。

試験方法

板状に成型したガターに直径3mmの穴の空いたアルミシールを貼り付け、その上に内径4mmのガラス管を設置しガラス管内にユージノールを含有するシーラーを充填した。24時間37℃湿度100%雰囲気下でシーラーを硬化させ、剪断応力をかけた後の接着面を観察し評価を行った。



接着面には凝集破壊が観察され、ソフトポイントとシーラーの馴染みが良好であることがわかります。

明瞭な高いX線造影性


ガターパーチャソフトポイントは従来品と同等の高いX線造影性があります。

アルミニウムに対するX線不透過率

A GC従来品	596%
B ガターパーチャソフトポイント	603%

試験方法

JIS T6515 歯科用根管充填ポイントのX線不透過試験に準じて実施した。

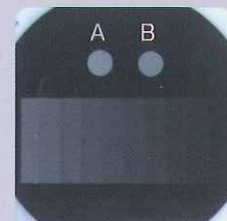

1mm厚円盤に成型したガターパーチャソフトポイントのX線造影性

溶解剤による優れた除去性

溶解剤に対する馴染みが良く、根管内からの除去が容易です。



覆髄材 ジーシー NEX MTAセメント

包装・希望医院価格●0.9g 1函(0.3g×3包)=9,000円、3.0g 1函(0.3g×10包)=21,000円
管理医療機器 225AKBZX00062000
粉末のみです。液は日本薬局方 注射用水をご使用ください。



歯科用NiTiロータリーファイル ジーシー NEX NiTi ファイル

セット包装・希望医院価格●アソートセットA 1函:6本入(#35/08*, #35/06, #35/04, #30/04, #25/04, #40/04 各1本入)=各5,900円、アソートセットB 1函:6本入(#25/08*, #15/04, #25/04, #25/06, #35/04, #40/04 各1本入)=各5,900円21mmまたは25mm ※印は長さ19mmです。
単品包装・希望医院価格●1函:5本入(単一形態)=各5,900円、バリューパック10 1函:10本入(単一形態)=各9,500円(バリューパック10は 囲みの形態となります。)

テーパー	サイズ (#)										長さ	
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		60
.08												19mm
.06	●											21mm
	●	●										25mm
	●	●	●									31mm
.04	●	●	●									21mm
	●	●	●	●								25mm
.02	●	●	●	●								21mm
	●	●	●	●	●							25mm
												31mm

■ 囲みはバリューパック10もご用意しています。
#10/06, #10/04, #10/02, #15/04, #15/02, #25/06, #25/04, #30/04, #35/06, #35/04, #40/06, #40/04, #40/02(長さはいずれも21mmまたは25mm)

Aセット クラウンダウン法

テーパー	サイズ (#)			
	15	20	25	30
.08				
.06				●
.04			●	●

Bセット フルレンジステクニック

テーパー	サイズ (#)			
	15	20	25	30
.08				●
.06			●	●
.04	●	●	●	●

管理医療機器 225AABZX00077000
製造販売元 株式会社 ジーシー デンタルプロダクツ

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※製品の仕様および外観は、改良のためお断りなく変更することがあります。
※掲載の価格とジーシー 研究所測定参考データは、2013年8月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。



ガッターパーチャポイント (カラーコード) ジーシー ガッターパーチャソフトポイント

種類●3種=.02, .04 (NEX用), .06 (NEX用)

テーパー	サイズ (#)	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90
		.02		●	●	●	●	●	●	●	●	●
.04 (NEX用), .06 (NEX用)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

包装・希望医院価格●
.02 1函:120本(#30-#80各形態別)=2,740円、1函:60本(#90)=2740円、組合せ包装 1函:120本(#30-#55各20本)=2,740円
.04 (NEX用), .06 (NEX用) 1函:60本(#25-#45各形態別)=2,740円、組合せ包装 1函:60本(#25-#45各12本)=2,740円

管理医療機器 221AABZX00076000
製造販売元 大成歯科工業株式会社



歯科用根管長測定器 ルートナビ

寸法●W60mm×D60mm×H86.5mm
重量●76g(単4電池含まず)
セット内容●本体、ルートナビプローブ(1.8m 1本)、ルートナビ ファイルクリップ(3本)、ルートナビ リップフック(3本)、乾電池(単4電池 3本)、ルートナビ テスター(1個)
希望医院価格●99,500円
管理医療機器 特定保守管理医療機器 224ALBZX00015A01
製造販売元 株式会社 ナカニシ

近日発売

NEX MTAブロック



練り上がったMTAセメントを一定量採取・テリパリーできる便利なブロックです。

NEX NiTiスタンド



14本のファイルを自由に収納できるスタンドです。

セーフティメモディスク



ファイルの使用回数を確認するためのディスクです。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3-2-14 東京都板橋区蓮沼町76-1

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

http://www.gcdental.co.jp

支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722

●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286