

GC

アルジネート印象材・石こう自動練和器

スーパーらくねる Fine

使い始めたその日から、
簡単操作で均一な仕上がり。



高機能、かつ診療空間にマッチする
シンプルなデザイン。

アルジネート印象材・石こう自動練和器
スーパーらくねる Fine




扉はスケルトンタイプで視認性の高さがポイントのデザイン。
どなたでも簡単に操作できます。

簡単

簡単操作
セットして
スタートキーを
押すだけ。

STEP 1

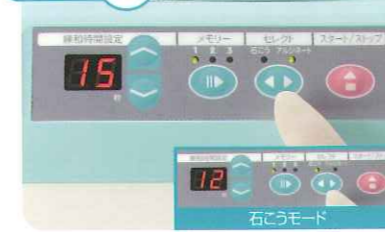

アルジネート/石こうの練和モードを選びます。

STEP 2



練和時間をセットします。

STEP 3



練和カップに、水→粉末の順に入れ、フタを
確実にロックします。

STEP 4




練和カップをセットします。

STEP 5



スタートキーを押して練和開始。

STEP 6

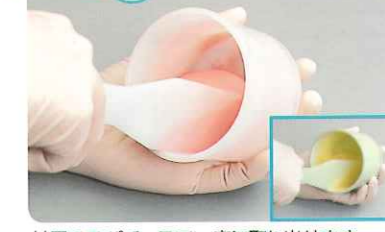

付属のスパチュラで一度に取り出せます。

均一

なじませ不要
ムラのない
仕上がり。

それぞれの特性に合わせた練和モードと、
ブレードの形状が、事前に水と粉末をなじ
ませる手間を省きました。




アルジネート印象材の練和カップ

練り上がりの比較検証

手練り

スーパーらくねる Fine

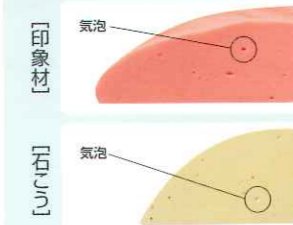

練和の立ち上がり時に
充分攪拌され、さらに可
変式回転(2段階回転方
式)のパワフルな加速と
遠心力により、短時間
で気泡のない均一な練
和ができます。

2WAY

アルジネート印象材
&
石こう
これ1台で練和OK!



石こう

専用計量器での混水比と練和時間

アルジネート印象材 (アローマファインミキサータイプ)				石こう (ニューフラストーン)			
水	+	粉末	練和時間	水	+	粉末	練和時間
1杯	+	1杯	15秒	1杯	+	1杯	12秒
2杯	+	2杯	15秒	2杯	+	2杯	15秒
3杯	+	3杯	20秒	3杯	+	3杯	15秒

水1杯は40ml、粉末1カップは8.4gです。

水1杯は12ml、粉末1カップは約25gです。

スーパーらくねる Fine 製品仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	380VA
ヒューズ	10A×2個(φ6.4×30mm)
回転方式	自転、公転方式
設定時間	10秒～60秒 (アルジネートモード、石こうモード各3メモリー)
練和容量	アルジネート印象材 アルジネート共用粉末計量器1杯～3杯 (水を含む総重量上限90g)
	石こう ストーン共用粉末計量器2杯～4杯 (水を含む総重量上限135g)
寸法	幅260mm×奥行260mm×高さ340mm
重量	21.5kg



- 付属品
- ・練和カップ (アルジネート用/石こう用)各2個
- ・専用スパチュラ (アルジネート用/石こう用)各1本
- ・アルジネート共用計量器 (水/粉末)各1個
- ・ストーン共用計量器 (水/粉末)各1個
- ・六角レンチ (4mm)

包装・希望医院価格●本体1台・付属品=¥272,000

スーパーらくねる 歯科用印象材混和器(歯科技工用真空攪拌器)
一般医療機器 13B1X00155000022

関連製品

印象材

自動練和器専用アルジネート印象材

アローマファインミキサータイプ



水とのなじみやすさを大幅に向上させた、自動練和器専用のアルジネート印象材です。

包装・希望医院価格

- 1函:粉末5kg
- シンプルバック 1kg×5袋=¥21,200
- ジーシー アローマファイン ミキサータイプ
- 管理医療機器 219AFBZX00193000

寒天印象材

アローマロイドTM



コシの強さとすぐれたチキントロピー性が、精度の高い印象採得を実現します。

包装・希望医院価格

- 1瓶:シリジタイプ 90本入(5/16インチ)=¥5,760
- 1函:シリジタイプ 60本入(5/16インチ)=¥3,960
- 1函:カートリッジタイプ 48本入=¥5,290
- ※ ストレージ温度60℃～63℃
- ジーシー アローマロイド 管理医療機器 219AFBZX00062000

カートリッジタイプ寒天印象材用コンディショナー

ジーシー ツインコンディショナー TC-I



2つのコンディショニング槽でそれぞれ独立して使用(各6本、合計12本)できるカートリッジタイプ寒天印象材用のコンディショナーです。

包装・希望医院価格

- 本体1台 = ¥86,000

石こう

模型用硬石こう

ニュープラストーン

アルジネート、寒天印象材との相性にすぐれた硬石こうのスタンダードです。



色調

- 3色=ホワイト、ライトグレー、パールイエロー
- 包装・希望医院価格
- 1函:シンプルバック3kg=¥2,750
- 18kgバック(パールイエローのみ)=¥13,970
- 1缶:18kg(パールイエロー、ホワイトのみ)=¥14,250
- ジーシー ニュープラストーン 一般医療機器 13B1X00155000010

模型用硬石こう

ニュープラストーンLE

超硬石こうと同じ「硬化膨張率0.08%」を実現したダストフリータイプです。



色調

- 3色=パールイエロー、ホワイト、パールベージュ
- 包装・希望医院価格
- 1函:シンプルバック3kg=¥2,750
- 18kgバック=¥13,970
- 1缶:18kg(パールイエロー、パールベージュのみ)=¥14,250
- ジーシー ニュープラストーン LE 一般医療機器 13B1X00155000013

※掲載の価格とジーシー研究所測定の見積データは、2013年1月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品添付の
使用説明書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3-2-14 東京都板橋区蓮沼町76-1

DIC(デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

http://www.gcdental.co.jp

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286