

GC

動揺歯固定接着材

G-FIX

ジーシー G-フィックス

動揺歯固定が簡単に！

1 ペースト
光照射 10 秒*

※LED照射器の場合。



NEW

歯冠色に近似した
「TC (トゥースカラー)」
追加発売!

簡単操作

動揺歯固定が簡便に! 1ペースト、光照射10秒!

※ LED照射器の場合です。他の照射器をご使用の場合は裏表紙をご覧ください。



歯面清掃

エッチング材の塗布

水洗・乾燥

レジンペーストの築盛

完了

必要に応じて形態修正・研磨、咬合調整を行います。

計量は不要!

エッチング材、レジンペーストの計量は不要です。

操作が簡単!

エッチング材はシリンジから直接歯面へ塗布。
レジンペーストもシリンジから直接必要量のみ築盛できます。



エッチング材

レジンペースト

常温保存可能です。


固定のタイミング

- 初診時:
 - ・ 外傷があり、歯の安静がすぐに必要な場合
 - 歯周基本治療終了後:
 - ・ 初期治療中の歯の移動を見極めてから
 - ・ ナイトガード装着のタイミングと同じ考え方
 - ・ 最終的にも固定が必要となる歯に対して試しを行う
 - 歯周外科治療時:
 - ・ 外科治療を行う場合には積極的に暫間固定をする
- 暫間固定のタイミングはエックス線検査、咬合の検査、咬合調整などを行ったうえで、患者さんの要望も確認しながら総合的に判断する必要があります

壊れにくい特性

新開発高靱性モノマー採用により
動揺歯の固定に適した柔軟性と粘靱性を付与

新規に開発した高靱性モノマーにより、動揺歯の固定という過酷な状況下でも、壊れにくい特性があります。

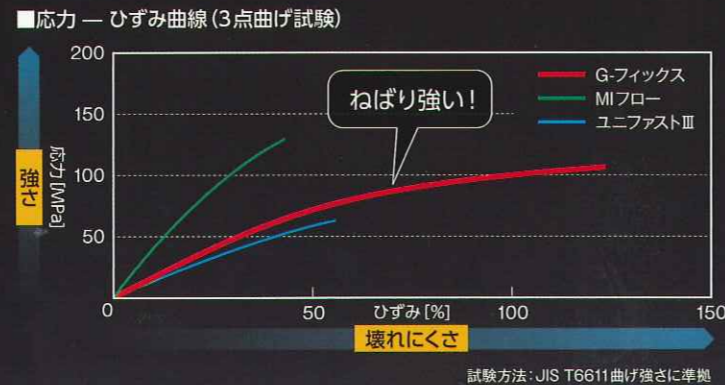

患者さんにやさしい

嫌なニオイがない

PMMA系レジン、特有の刺激臭と、粘膜に触れるとビリビリするなどの刺激がありますが、G-フィックスはコンポジットレジン充填と同様に患者さんへ不快感を与えません。

ナノフィラーによる滑沢な表面性状



「G-フィックス」は700nmのナノフィラーを配合することで、硬化後は滑沢な面が得られます。プラークが付きにくく、変色が抑えられます。



高い接着力

「リン酸エステルモノマー」配合により
高い対エナメル接着性を発揮

補綴修復物にG-フィックスを接着させる場合は、必ず以下の前処理材をご使用ください。
■ 金銀パラジウム合金 → ジーシーメタルプライマー-II
■ セラミックス&レジン → ジーシーセラミックプライマー-II

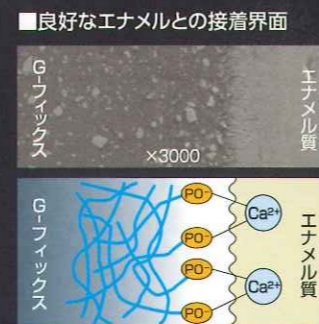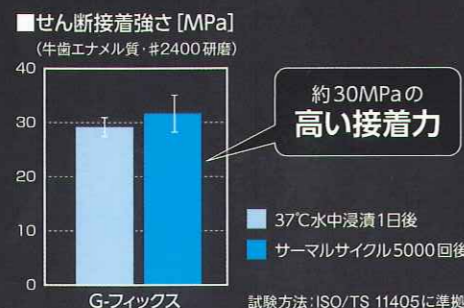

選べる2色

新色「TC(トゥースカラー)」登場!

「クリア」に続いて「TC(トゥースカラー)」が新たに加われました。歯間離開が気になる患者さんの症例などには、歯冠色に近似した「TC(トゥースカラー)」を選択できるようになりました。

■模型上での色調比較



動揺歯固定接着材

ジーシー G-フィックス

新品 TC (トゥースカラー) 追加発売!

管理医療機器 224AABZX00104000

色調

●2色=クリア、TC (トゥースカラー) **NEW**

包装・希望医院価格

●1歯レジンペースト2.7g(2mL)2本、エッチング材4.8g(3.6mL)1本、
 フリリングチップⅢプラスチック4個、フリリングチップ用キャップ1個、フリ
 ングチップニードルタイプ20個、テクニカルチャート1枚=各¥15,000

単品包装

色調

●2色=クリア、TC (トゥースカラー) **NEW**

包装・希望医院価格

●1歯：レジンペースト2.7g (2mL) 1本、フリリングチップⅢプラス
 チック2個、フリリングチップ用キャップ1個=各¥6,000



歯科用エッチング材

ジーシー エッチャント

包装・希望医院価格

●1歯：エッチャント4.8g (3.6mL) 1本、
 フリリングチップニードルタイプ20個
 =¥3,900

管理医療機器 221AABZX00184000



※エッチング材の単品包装は、
 ジーシー エッチャントをご用意ください。

関連製品

LED可視光線照射器

G-ライト プリマII Plus

包装・希望医院価格

●G-ライト プリマII Plus 一式
 =¥205,000

一般医療機器 特定保守管理医療機器
 13B1X00155000203



NEW

金属接着用プライマー

ジーシー メタルプライマーII

包装・希望医院価格

●1歯：液5mL1本、筆(Na7) 1本
 =¥7,180

管理医療機器 20700BZZ00632000



セラミック接着用プライマー

ジーシー セラミックプライマーII

包装・希望医院価格

●1歯3mL 1本=¥4,750

管理医療機器 221AABZX00190000



NEW

テクニカルチャート

1. 歯面清掃



研磨ペーストをブラシ又はカップにとり、歯面を清掃し、接着部位の
 ブラークを取り除きます。

2. 歯面処理



エッチング材はエナメル質の接着部位に
 広く塗布し、30秒間充分に処理します。隣接
 面だけでなく唇側面と舌側面も含め、図に
 示すように広い範囲に塗布して、充分に歯
 面処理することをお勧めします。その後、水
 洗・乾燥を行います。

※エッチング材での歯面処理後、乾燥した歯面が白く改質し
 ていない場合は再度歯面処理操作を繰り返してください

3. 動揺歯の固定



動揺歯の接着面にレジンペーストを
 築盛します。隣接面だけでなく唇側
 面と舌側面にも築盛して、歯を覆う
 ように固定することをお勧めします。

水平面観



《築盛の目安》
 幅は切縁の2分の1、高さは歯間
 乳頭の上を数mm空けて築盛しま
 す。この範囲内で接着面を大きくと
 ることが築盛の目安です。

4. 光照射



可視光線照射器により照射し、重
 合します。

G-フィックス 光照射時間

照射器	ハロゲン	LED*	キセノン
光照射時間	20秒	10秒	6秒

※G-ライト プリマII PlusはF3モード×2回(3秒×2回)の
 照射時間


5. 形態修正・研磨・咬合調整



通法に従い、形態修正・研磨を行
 います。また、咬合調整を行います。

ポイント

※多数歯を固定する場合

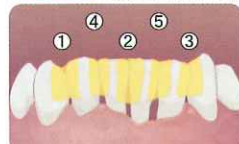

多数歯を固定する場合、レジン
 ペーストの重合収縮による応力
 を緩和するために、上に示すよ
 うな順序で2歯ずつ固定するこ
 とをお勧めします。

※動揺歯固定では、大きな動揺、強い咬合、ブラキシズムなどの影響や被
 着面の状態により脱離することがありますのでご注意ください。とくにメ
 タル、セラミック修復物を伴うケースではプライマーを用いても脱離す
 ることがありますのでご注意ください。このような場合にはワイヤーなど
 補強線の併用をお勧めします。

ご使用に際しては、必ず製品の
 添付文書をお読みください。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
 ※掲載の価格とジーシー研究所測定の見積データは、2014年1月現在のものです。
 ※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ

東京都文京区本郷3丁目2番14号

愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

http://www.gcdental.co.jp

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286