

Hydent[®] Sticks

Color Transfer and Tissue
Marking Applicators



HAKUSUI

ハイデント
スティック

歯科適合試験用アプリケータ




ACCURATE FAST PATIENT FRIENDLY

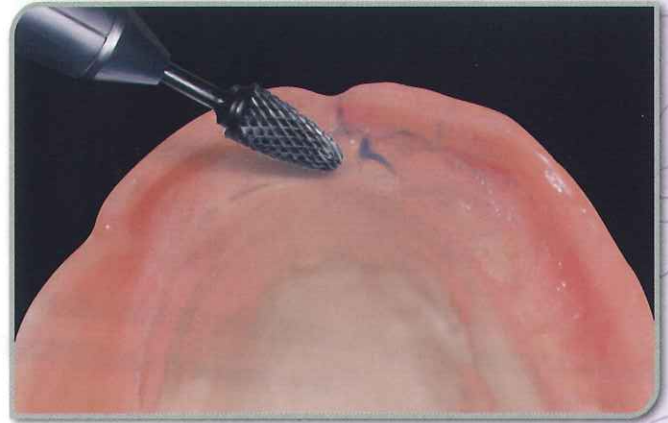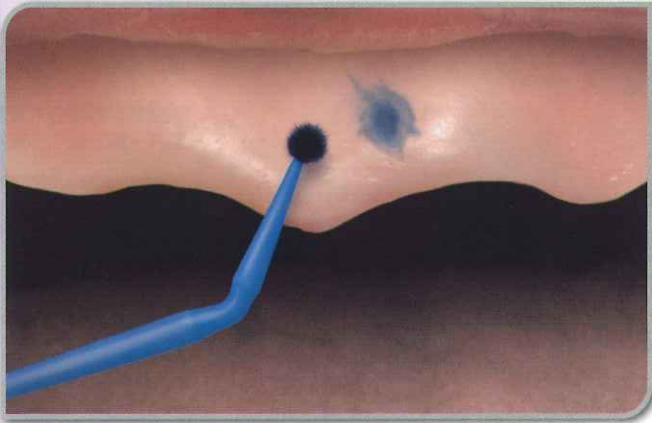

義歯の調整をよりスピーディー、簡便、安全にする色転写と粘膜マーキング用のアプリケータ。
義歯の不適合部位を精確に、手早く、やさしく、衛生的に濃紫色にくっきり転写します。



Hygienic & Safer

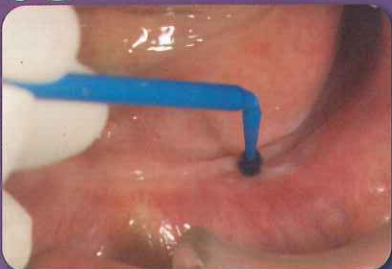

Precise Transfer




 **Pascal**[®]
International, Inc.

口腔内から義歯を取り出します。

歯肉・口蓋部の患部を湿らせます。(唾液又は水で)

ハイデントの先端を患部に軽く接触させます。

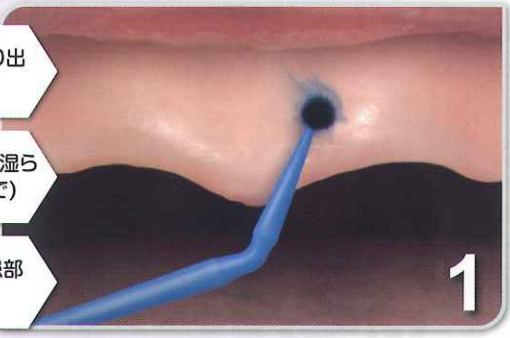

1

濃紫色が粘膜に描記!



2

義歯を口腔内にセットし咬合させた後、取り出します。

濃紫色が義歯上にくっきり転写!



3

濃紫色が転写された部位をバー等で削合します。



4




在宅診療に最適でコンパクト!



衛生的な DISPOSABLE

ピンポイントで塗布が可能!

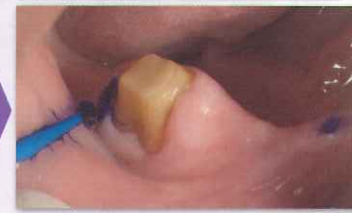

垂れずに奥までしっかり到達!

くっきり見やすい濃紫色!



スピーディ&精確な転写!

クリニカルケース CLINICAL CASE



曲げられ柔軟なアプリケーター **Bendable**



粘膜のマーキングにも最適 **Distinct**



一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020225011

Pascal
International, Inc.
パスカル社(アメリカ)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>

臨床写真提供: かじはら歯科医院 梶原 公彦 先生

臨床写真提供: 松川歯科医院 松川 敏久 先生