



ニュージプストーン

強度、硬度、精度、価格のバランスに優れた当社のベストセラー商品。
用途で選べる6色バリエーション。



歯科用硬質石膏ニュージプストーンは、 歯科模型用として、使い易く、 各種用途に適しています。

「アイボリーイエロー」「ピンク」「ブルー」「グリーン」「ホワイト」「グレー」の6色をご用意いたしておりますので用途に応じて色調をお使い分けいただけます。

特 長

- 1 高強度、高硬度です。
- 2 滑らかな模型が得られます。
- 3 高精度の模型が得られます。
- 4 シリーズ6色あります。

用 途

- 1 インレー用模型等の製作用
- 2 クラウン用模型等の製作用
- 3 ブリッジ用模型等の製作用
- 4 局部義歯用模型等の製作用
- 5 総義歯用模型等の製作用
- 6 矯正用模型等の製作用

用法・用量

- 1 粉末100gに対して水24mlが標準です。操作に支障のない限り水量を少なくすると、より強度、硬度の大きい模型が得られます。
- 2 練和時間は、真空機械練和では30秒、手練和では60秒が適切です。
- 3 印象等への注入の際、パイプレーターなどを用いると、気泡のない模型が得られます。

物理的性質

試験項目 Test Items	測定値(注) Values determined
混水比(水/粉) Water/Powder ratio (W/P)	0.24
硬化時間(分) Setting time (min)	10
線硬化膨張<2時間後>(%) Linear setting expansion <2hr>	0.20
圧縮強さ<1時間後>(MPa) Compressive strength <1hr>	49

試験方法:JIS T6605による (タイプ2)
Test Method:Based on JIS T6605

(注)測定値は、弊社での代表的な値であり規格値ではありません。

色 調

- 1 アイボリーイエロー
- 2 ピンク
- 3 ブルー
- 4 グリーン
- 5 ホワイト
- 6 グレー

包 装

3kg箱入(3kgアルミ)×6/PC
5kg箱入(2.5kgアルミ×2)×4/PC(アイボリーイエローのみ)
18kgバッグインボックス



サンエス石膏株式会社

大阪本社 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
大阪営業所 TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

東京営業所 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F
TEL.03-5283-6201 FAX.03-5283-6205

中部営業所 〒489-0983 瀬戸市苗場町113
TEL(0561)82-9185(代) FAX(0561)85-4179

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>
E-mail : headquarter@san-esugypsum.co.jp

サンエス石膏

検索

一般医療機器 届出番号27B2X00022000012 製造販売元:サンエス石膏株式会社

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ