


## DENTASEPT® SH

# エス エイチ



エスエイチ  
Dentasept® SHは、医療器具・  
歯科ユニット・椅子等の表面  
洗浄・除菌にご使用いただける  
泡状の洗剤です。

品番：DEN1863326  
入り数：1ケース/12本 (750ml/本)

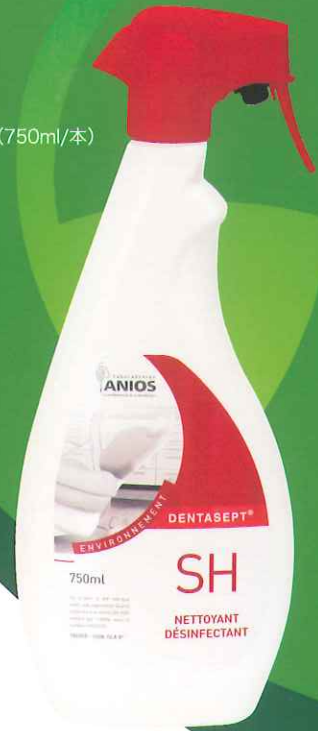

### 特長

- ✓ アルコールフリーで器具の材質を選びません。
- ✓ 無香料、無着色、アレルギー促進物質は含んでおりません。
- ✓ 泡状のフォームですので、壁面にもつかいやすく、無駄もありません。
- ✓ 洗浄・除菌効果に優れ、広範囲にお使いいただけます。

### 効果

緑膿菌、黄色ブドウ球菌はもとより、B、C型肝炎ウイルス、HIVウイルス、インフルエンザウイルス、ロタウイルスにも効果を発揮します。

効能範囲	種類	所要時間	参考症例
細菌	細菌	2分	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、尿路感染症、敗血症、緑膿菌感染症、心内膜炎、黄色ブドウ球菌、サルモネラ
	結核菌	15分	結核菌
	酵母菌	5-20分	酵母菌(5分)、コウジカビ(20分)、カビ(15分)、趾間菌(15分)
ウイルス	ウイルス	1-15分	HIVウイルス(1分)、ヘルペス(1分)、B型肝炎ウイルス(1分)、C型肝炎ウイルス(1分)、ロタウイルス(1分)、インフルエンザウイルス(H1N1)(2分)、ノロウイルス(15分)

### 主成分

ジデシルジメチルアンモニウム塩化物、陽イオン界面活性剤、ポリヘキサメチレンピグアナイド塩酸塩、両性界面活性剤

### 容量

- ・ 750ml気泡性スプレーボトル

### ご使用になる前に


安全のため、グローブをご使用ください。

### その他ご注意ください

- ・ +5°C～+35°Cで保管してください。
- ・ お子様の手の届かないところで保管してください。
- ・ 直射日光の当る場所に保管しないでください。

### 使用方法

- 1 Dentasept® SHを直接スプレーするか不織布等にとって、洗浄・除菌します。

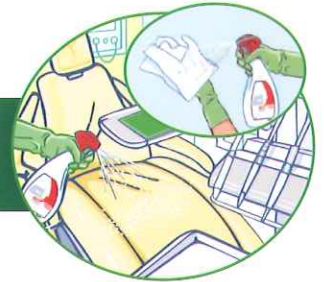

- 2 エリア全体が除菌されるよう不織布等でよく拭取ります。



- 3 5分間放置してください。  
※ご使用後は、粘膜に接触する可能性が高い医療器具でない限り洗い流す必要はありません。

