

Heraeus Kulzer

Mitsui Chemicals Group

CHARISMA®

歯科充填用コンポジットレジン

カリスマ クラシック

Charisma Classic

カリスマ フロー

Charisma Flow



CRはどれも同じではありません。

カリスマ クラシック テクニックによらない色合わせが実現。

シェードマッチ

新しいフィラー技術によって、天然歯に良くなじみ、しかも天然歯同様に発色する性質を実現しました。



新しいマイクロガラス®IIフィラーテクノロジー



A3でB3もC3も対応可能。

周りの色を反映し天然歯となじむ特性を有しているため、幅広いシェードに対応。日常臨床においてA1、A2、A3、A3.5、A4シェードでほぼ対応可能です。

MicroglassIIフィラー効果により、幅広いシェードに対応します。 A3 ⇒ B3, C3



光重合後の色調変化が少ない。

光重合後の色調変化が少ないので、シェードマッチングが大変容易です。



操作性に何を期待しますか？

クラシックは滑らかに伸びて、コシがあるためしっかりと充填できます。



カリスマ フロー 幅広い症例に対応できる操作性を実現。

CHARISMA


フローは流動性が最も重要。

フローは流動性を高めながらも垂れにくくすることで、操作性良く使用できます。2種類のフローにより幅広い臨床に対応できます。



漏れが気になりませんか？

余剰レジンが自然に戻る機構(セルフバック機構)によって、漏れを防ぎます。

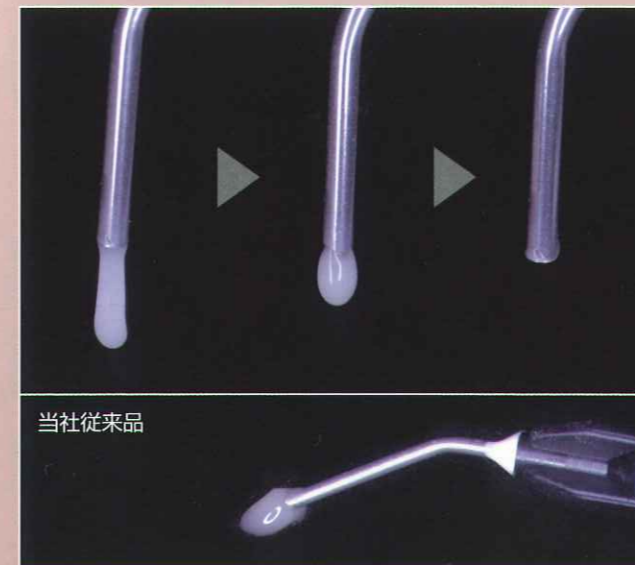

なぜ今23Gノズルが必要？

専用ノズルを用いて、MI治療による極小窩洞にも対応します。



軽度着色歯にフローだけで対応可能。

軽度着色窩洞においても適度なマスキングを有するため、そのまま自然な仕上がりになります。

V級窩洞天然歯症例





テクニックによらない色合わせが実現できます。

周りの色を反映してなじむ特性を有しているため、幅広いシェードに対応します。

マ クラシック Ⅲ級窩洞 (単層充填可能)



充填前



カリスマ クラシック充填



研磨



研磨後

マ ローフロー (低流動性) + カリスマ クラシック 併用 Ⅳ級窩洞



充填前



カリスマ ローフロー充填



築盛



研磨後

マ ローフロー (低流動性) Ⅴ級窩洞



流動性) II級窩洞



カリスマ ローフロー充填



カリスマフロー充填後



研磨後

ー(高流動性)+カリスマ クラシック併用 III級窩洞



メディアムフロー充填(23Gノズル)



築盛



研磨後

ー(高流動性) III級窩洞




フローの物性向上により、ペーストとの併用が可能。

カリスマ クラシック

審美性ととも優れた物性(少ない重合収縮、曲げ強さ、圧縮強さ)を兼ね備えています。


重合収縮率(24時間後)

約20%以上改善。

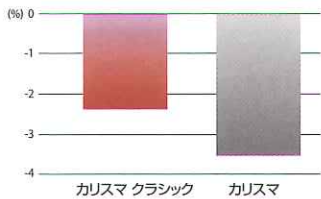


曲げ強さ

さらに曲げ強さがアップ。

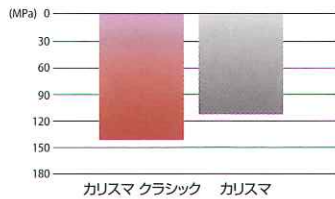

弾性率

臼歯に耐える強さ。

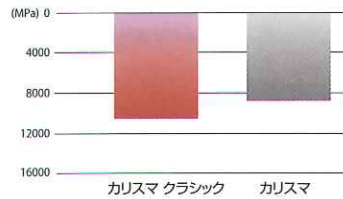

X線造影性

適度なX線造影性により予後の診断、経過観察が可能です。




カリスマフロー カリスマクラシック

カリスマ フロー

操作性が良く前歯、臼歯部に幅広く対応できます。


曲げ強さ

ペースト同等の強さ。

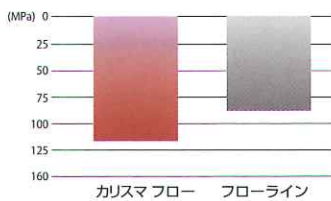


圧縮強さ

耐久性がさらに向上。

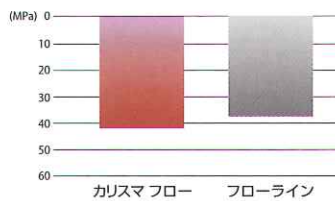

ピッカース硬度

咬合圧に耐える強さ。

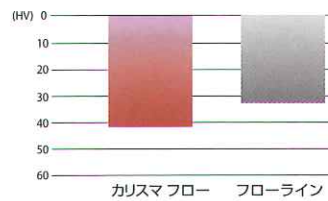

製品案内

歯科充填用コンポジットレジン

カリスマ クラシック


シェード:9色

A1,A2,A3,A3.5,A4,OA2,OA3,B2,B3

内容:シリンジ(4g)×1本

販売名:カリスマ クラシック
 一般的名称: 歯科充填用コンポジットレジン
 分類: 管理医療機器
 認証番号: 226ABBZX00066000

商品コード	商品名	標準価格(円)
45439	カリスマクラシック 4G A1	3,300
45440	カリスマクラシック 4G A2	3,300
45441	カリスマクラシック 4G A3	3,300
45442	カリスマクラシック 4G A3.5	3,300
45443	カリスマクラシック 4G A4	3,300
45445	カリスマクラシック 4G B2	3,300
45446	カリスマクラシック 4G B3	3,300
45448	カリスマクラシック 4G OA2	3,300
45449	カリスマクラシック 4G OA3	3,300
45452	カリスマクラシックシェードガイド	1,430

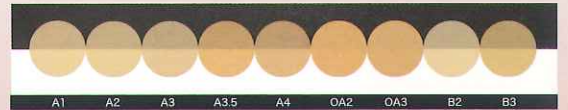

歯科充填用コンポジットレジン

カリスマ フロー: ミディアムフロー/ローフロー

シェード:6色 A1,A2,A3,A3.5,A4,OM

内容:シリンジ(2.6g/1.5mL)×1本


付属品:
 ミディアムフロー: 20Gノズル3本、23Gノズル2本、ノズルキャップ1個、シェードガイド1枚
 ローフロー: 20Gノズル5本、ノズルキャップ1個、シェードガイド1枚

販売名:カリスマフロー
 一般的名称: 歯科充填用コンポジットレジン
 分類: 管理医療機器
 認証番号: 226AFBZX00058000



別売:
 カリスマフロー
 20Gノズル 20イリ(ノズルキャップ1個付)
 カリスマフロー
 23Gノズル 20イリ(ノズルキャップ1個付)

商品コード	商品名	標準価格(円)
45453	カリスマフロー ミディアムフロー 2.6G A1	3,800
45454	カリスマフロー ミディアムフロー 2.6G A2	3,800
45455	カリスマフロー ミディアムフロー 2.6G A3	3,800
45456	カリスマフロー ミディアムフロー 2.6G A3.5	3,800
45457	カリスマフロー ミディアムフロー 2.6G A4	3,800
45458	カリスマフロー ミディアムフロー 2.6G OM (OM:オベークミディアム)	3,800
45459	カリスマフロー ローフロー 2.6G A1	3,800
45460	カリスマフロー ローフロー 2.6G A2	3,800
45461	カリスマフロー ローフロー 2.6G A3	3,800
45462	カリスマフロー ローフロー 2.6G A3.5	3,800
45463	カリスマフロー ローフロー 2.6G A4	3,800
45464	カリスマフロー 20Gノズル 20イリ	800
45465	カリスマフロー 23Gノズル 20イリ	800

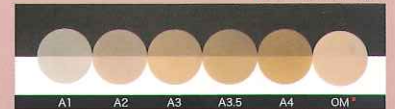

*シェードガイドは、現品を厚さ1mmで光重合した写真。*上記シェードは、印刷のため、現品と若干異なることがあります。

お問い合わせ、ご用命は

製造販売元

ヘレウス クルツァー ジャパン 株式会社

本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
 札幌営業所: 〒003-0825 札幌市白石区菊水元町五条2-9-1 TEL.090-7555-8560
 仙台営業所: 〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102 TEL.022-371-1007
 名古屋営業所: 〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-18 TEL.052-935-5451
 大阪営業所: 〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-14 TEL.06-6233-2500
 福岡営業所: 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 TEL.092-472-0720
 フリーダイヤル: 0120-230-331 (受付時間: 10:00~16:00/土・日・祝日を除く)
<http://www.heraeus-kulzer.co.jp/>