

インプリント™ 4 印象材

ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器

3M™ ESPE™ 圧排ペースト

NEW!



Designed for  
speed  
control and precision

よりスピーディでスマートな印象採得!

- 印象材の口腔内保持時間を大幅に短縮!
- 高精度と撤去のし易さを両立した、日本向けの製品を特別に開発!
- コンパクトで、折りたたみ・持ち運びができる自動練和器新発売!
- 圧排糸に代わる圧排ペースト新発売!



3M ESPE

# 精度の高い印象採得を短時間で!

高い精度! もっと短時間で! 幅広い症例に使い易く!

新発売のインプリント™ 4 印象材は、

歯科医師にも患者さんにも喜ばれる印象材を実現しました。



臨床写真提供: 東京都ご開業 土屋 賢司 先生

インプリント™ 4 印象材は、

視認性・快適性も考慮した製品です。

鮮やかなペーストカラーでマージンの視認が容易です。  
爽やかなミントの香りで患者さんの不快感を和らげます。






## 印象撤去が容易なソフトレー ボディ

インプリント™ 4 印象材 ソフトレー ボディは、ヘビー ボディに比べ弾性歪みが高く、撤去しやすいトレー材です。一方で永久歪みは従来品と同等で、高精度な印象採得が可能です。単冠やブリッジの症例に適しています。


### ■ ソフトレー ボディでクラウンの印象を採得



1 圧排糸を挿入した支台歯。

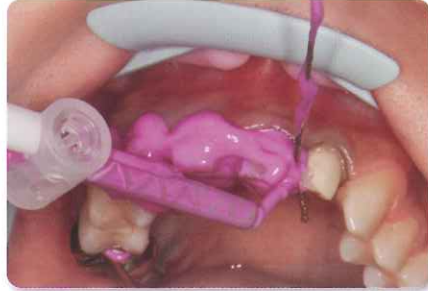

2 ライト ボディを口腔内に注入する。

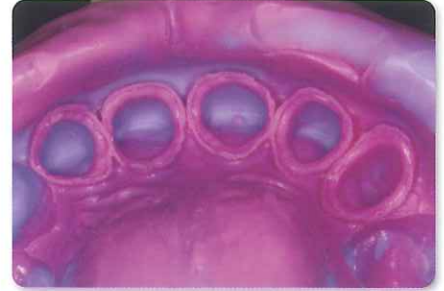

3 ソフトレー ボディは弾性歪みが高く撤去が容易に行える。



## インプラントに適したヘビー ボディ

インプリント™ 4 印象材 ヘビー ボディは、インプリント™ II 印象材以降、インプラントに広く採用されているヘビー ボディの特性を引き継ぎ、インプラント、ロングスパンブリッジやフルマウスの症例に適しています。


### ■ ヘビー ボディでインプラントの印象を採得



1 トランスファーコーピングを固定。




2 流動性の低いレギュラー ボディを注入。トランスファーコーピングの周りにとどまる。

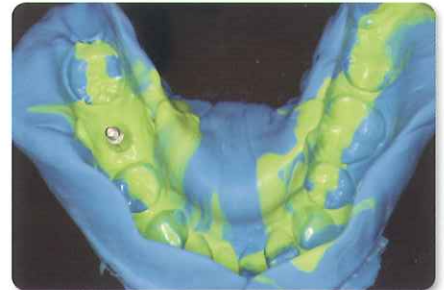

3 ヘビー ボディ、レギュラー ボディによる連合印象1回法の印象面。



## 症例による使い分け

| 製品        | トレー材  |   | ウォッシュ材  |   |
|-----------|---|---|---|---|
|           | インプリント™ 4 印象材 ヘビー ボディ   | インプリント™ 4 印象材 ソフトレー ボディ   | インプリント™ 4 印象材 レギュラー ボディ   | インプリント™ 4 印象材 ライト ボディ   |
| 症例        |  |  |  |  |
|           | シヨアA硬度：71   | シヨアA硬度：56   | 流動性：普通  | 流動性：非常に高い   |
| クラウン&ブリッジ | ○   | ◎   | ◎   | ◎   |
| インプラント    | ◎   | ○   | ◎   | ◎   |

3M ESPE 社内データ

- 単冠やブリッジの症例にはソフトレー ボディをお勧めします。
- インプラント、ロングスパンブリッジや、フルマウスの症例にはヘビー ボディをお勧めします。
- ウォッシュ材は症例・治療部位により流動性を基準として使い易いものをお選びください。



インプラントと支台歯の共存する症例ではヘビー ボディとライト ボディの組み合わせも可能です。



臨床写真提供：東京都ご開業 藤田 大樹 先生



# 3M™ ESPE™ 圧排ペースト

複雑な圧排作業を楽にする圧排ペーストです。より確実な印象採得のためにご使用ください。

- 歯肉溝に挿入する先端部が細く、丸いため挿入し易い。
- 塗布後は水洗で洗浄可能（ペーストは水溶性）
- 歯肉圧排糸との併用も可能。
- 縁下でのマージン形成時、クラウンセット時等にも使用可能。




狭い歯肉溝へも  
楽にアクセス




レストラティブ ディスペンサーでご使用ください。  
(他社製品でも使用可能)

歯肉溝に挿入しやすい

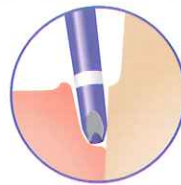


製品原寸大

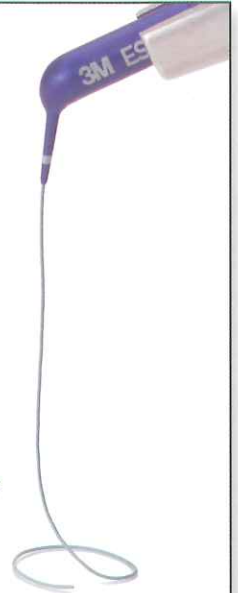

## 使用方法



レストラティブ ディスペンサーに  
セットして試し出しをします。

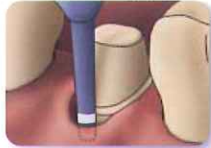

洗浄・乾燥した歯肉溝に製品先端  
の白いラインを目安に挿入します。



ペーストを注入します。



歯肉圧排糸との併用も可能です。



注入後2分おきます。



流水によりペーストを洗い流します。

# ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器

軽量・コンパクトデザインの印象材自動練和器です。折り畳んで収納できる省スペースタイプ。

- 気泡を巻き込まない均一な練和をスピーディに行える。
- 持ち運びできるハンドグリップ付き。必要な時だけ取り出して使用可能。
- 操作は簡単。カートリッジをセットしてスタートボタンを押すだけ。
- 3M™ ESPE™ の全てのペンタ™ 印象材製品を使用可能。  
(ペンタミックス™ 2、ペンタミックス™ 3 印象材自動練和器のカートリッジは使用できません)

## 印象材を半額でご使用いただけます (mL単価)

ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器で使用する、インプリント™ 4 ペンタ™ 印象材製品は、50mLカートリッジに換算すると7.2本分の大容量。mL当たりの価格が半額で、またカートリッジ交換の手間を短縮でき、材料の無駄もなく経済的にご使用いただけます。



7.2  
本分

インプリント™ 4 印象材  
ペンタ™ ソフトトレー ボディ (360mL)

インプリント™ 4 印象材  
ソフトトレー ボディ (50mL)

## 印象材のコスト比較 (円/mL)

インプリント™ 4 印象材  
ソフトトレー ボディ

72円

インプリント™ 4 印象材  
ペンタ™ ソフトトレー ボディ

36円



簡単操作で均一な  
練和をスピーディに!

吐出スピード: 1.6mL/秒  
フルアーチ印象時の練和は  
25秒程度



軽量で  
院内の持ち  
運びも簡単!

重量: 6.7kg

ハンドグリップ付き

## 折りたたむためのコンパクト設計

A4サイズに収まる省スペース収納

※このカタログを折りたたんだ  
状態がA4サイズ





## 製品仕様



インプリント™ 4 印象材  
ペンタ™ ソフトトレー ボディ

内容 ベースペースト 300mL 2本  
キャタリストペースト 60mL 2本  
製品番号：71550  
希望医院価格 26,000円



インプリント™ 4 印象材  
ペンタ™ ヘビー ボディ

内容 ベースペースト 300mL 2本  
キャタリストペースト 60mL 2本  
製品番号：71484  
希望医院価格 30,000円



インプリント™ 4 印象材  
ソフトトレー ボディ

内容 50mL 2本  
ギャラン™ ミキシングチップ グリーン 5本  
製品番号：71551  
希望医院価格 7,200円  
リフィルパック  
内容 50mL 10本  
製品番号：71556  
希望医院価格 24,800円



インプリント™ 4 印象材  
ヘビー ボディ

内容 50mL 2本  
ギャラン™ ミキシングチップ グリーン 5本  
製品番号：71555  
希望医院価格 7,800円  
リフィルパック  
内容 50mL 10本  
製品番号：71531  
希望医院価格 28,800円



インプリント™ 4 印象材  
レギュラー ボディ

内容 50mL 2本  
ギャラン™ ミキシングチップ イエロー 5本  
3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ 5本  
製品番号：71557  
希望医院価格 7,500円



インプリント™ 4 印象材  
ライト ボディ

内容 50mL 2本  
ギャラン™ ミキシングチップ イエロー 5本  
3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ 5本  
製品番号：71558  
希望医院価格 7,500円



ペンタミックス™ ライト  
印象材自動練和器

ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器  
60Hz 西日本用  
製品番号：77908  
希望医院価格 98,000円  
ペンタミックス™ ライト 印象材自動練和器  
50Hz 東日本用  
製品番号：78000  
希望医院価格 98,000円  
ペンタミックス™ ライト カートリッジ  
内容 カートリッジ 1個  
製品番号：77944  
希望医院価格 9,000円



3M™ ESPE™ 圧排ペースト

3M™ ESPE™ 圧排ペースト トライアルパック  
内容 3個  
製品番号：56940  
希望医院価格 1,500円  
3M™ ESPE™ 圧排ペースト レギュラーパック  
内容 25個  
製品番号：56941  
希望医院価格 11,800円  
3M™ ESPE™ 圧排ペースト バリューパック  
内容 100個  
製品番号：56942  
希望医院価格 45,000円

## 関連製品



レストラティブ  
ティスベンサー

内容 1個  
製品番号：5707SD  
希望医院価格 7,500円



ペンタ™ ミキシングチップ  
レッド

内容 50個  
製品番号：77949  
希望医院価格 5,800円



ギャラン™ ミキシングチップ  
グリーン

内容 50本  
製品番号：71450  
希望医院価格 14,400円



ギャラン™ ミキシングチップ  
イエロー

内容 50本  
製品番号：71542  
希望医院価格 14,400円



ギャラン™ ミキシングチップ  
口腔内注入チップ

内容 50個  
製品番号：71462  
希望医院価格 4,550円



3M™ ESPE™  
イントラオーラル シリンジ

内容 20本  
製品番号：71505  
希望医院価格 5,000円

販売名：インプリント 4 印象材 認証番号：225AKBZX00168000 / 販売名：インプリント 3 印象材 認証番号：220AKBZX00165000 / 販売名：インプリント II 認証番号：21500BZY00451000  
販売名：ペンタミックス ライト 印象材自動練和器 届出番号：13B1X10109000256 / 販売名：3M ESPE 圧排ペースト 届出番号：13B1X10109000253 / 販売名：ペンタ ミキシングチップ レッド 届出番号：13B1X10109000127  
販売名：ギャラン ミキシングチップ 届出番号：13B1X10109000210 / 販売名：3M ESPE イントラオーラル シリンジ 届出番号：13B1X10109000254 / 販売名：トレードヒープ 届出番号：13B1X10109000118  
販売名：レストラティブ ティスベンサー 届出番号：13B1X10109000161  
希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。掲載の情報は、2014年6月現在のものです。 3M、ESPE、インプリント、ペンタ、ペンタミックス、ギャランは、3M社またはその関連会社の商標です。

詳しい情報は… **Let's Access!**

3M ESPE 歯科用製品ホームページ

3M 歯科

<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

検索

**3M ESPE**

スリーエム ヘルスケア株式会社  
歯科用製品事業部

Please Recycle. Printed in Japan.  
Copyright © 2014 3M. All Rights Reserved.  
DEN-1098-BN(0614100)PN

当事業部取扱製品のお問い合わせは

3M ESPE コールセンター

**0120-332-329**

※受付時間/9:00~17:00 月~金 (土・日・祝を除く)

※フリーダイヤルが繋がらない場合は、03-6409-3157をご利用ください。