

ディスポーザブル滅菌バッグ (セルフシールタイプ)

# アシュアー プラス

高性能の内部インジケータを付属しており、  
バッグ内部の処理状態を確認できます。



粘着シールの剥離紙は内部インジケータとして  
使用でき、内部の処理状態を確認できます。

内部インジケータの使用はCDC(米国疾病管理予防センター)が推奨しています。  
インジケータの品質が向上し、滅菌の確実性が高まりました。

# 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。

1 83×165mm



バースタンドや  
リーマーなどに

2 70×254mm



タービンや  
コントラアングルに

3 89×254mm



基本セットなどの  
インストゥルメントに

4 140×279mm




鉗子やスリーウェイ  
シリンジなどに

5 178×330mm



トレー(1枚)に

多層フィルムと医療グレードの丈夫なシートで  
滅菌後の汚染を防ぎます。

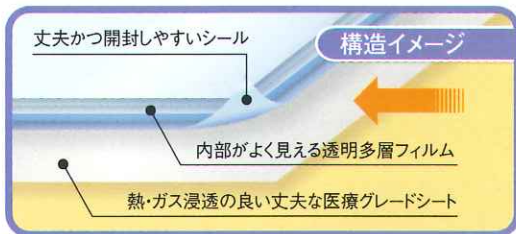

インジケータの品質が向上し、  
滅菌の確実性が高まりました。

時間、温度、蒸気 3つの  
条件がそろって色が変わる  
マルチパラメーターです。

(ISO11140-1のクラス4に準拠)



7 305×457mm



外科用インストゥルメントケースや複数のカセットなど  
大型のものに

6 254×381mm



厚みのあるカセットなどに

	サイズ	品番	入数	標準価格	商品コード
1	83×165mm (3¼"×6½")	83000	200枚	3,200円	620010
2	70×254mm (2¾"×10")	83003	200枚	3,200円	620011
3	89×254mm (3½"×10")	83005	200枚	3,200円	620012
4	140×279mm (5½"×11")	83010	200枚	5,300円	620013
5	178×330mm (7"×13")	83015	200枚	7,700円	620014
6	254×381mm (10"×15")	83020	200枚	12,000円	620015
7	305×457mm (12"×18")	83025	100枚	8,200円	620016

## 取り扱いについて



内部インジケータをはがして  
滅菌バッグの中に入れ、封をします。



オートクレーブ滅菌または、  
エチレンオキシドガス滅菌します。



滅菌が完了するとインジケータの  
色が変わります。  
オートクレーブ滅菌は茶色になります。



ご使用の際は、封入したときと  
反対側から開封して下さい。

※滅菌バッグのインジケータは、エチレンオキシドガス滅菌の場合ゴールドになります。

●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2014年7月23日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

使用上の注意 ケミクレーブ、乾熱滅菌では、ご使用いただけません。

製造 サルトン社

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525  
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161

[www.dental-plaza.com](http://www.dental-plaza.com)

●この印刷物は、環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。

PUB No.M207.2070-1-000.1407.21.500N-10