

ペーストアルジネート印象材自動練和システム

# トクヤマ APシステム

歯科用印象材混こう器

歯科用アルギン酸塩印象材

トクヤマ APミキサーⅢ

トクヤマ AP-1



**アルジネートオートミックス  
印象採得の効率化に!**



練和はスイッチを押すだけ  
ペーストタイプのアルジネート印象材自動練和システムです。

特長 **1**

作業時間を大幅に短縮

計量、練和不要

粉と水の計量が不要です。  
また、練和物を直接トレーに盛り付けることができるので、スパチュラワークもほとんど必要ありません。  
さらに、印象材用シリンジに簡単に注入することができます。

■印象採得1回あたりの作業時間比較



茨城県鹿嶋市開業 田中晃伸先生 小林正憲先生 著  
「アルジネート印象材自動練和システム(APミキサーII)の臨床における有用性」より  
(自動練和器は当社データによる)

特長 **2**

無駄が少なく経済的

目で見ながら必要量

必要な量だけ盛り付ける事ができるので、無駄が少なく廃棄物量を削減できます。  
外筒、攪拌子は繰り返し使用できます。

特長 **3**

簡単練和・盛付

吐出スイッチを押すだけ

スイッチを押すだけで、気泡の巻き込みがほとんどないアルジネート印象材の練和物をトレーへ簡単に盛り付けられます。



気泡が無くキレイ!

※吐出したアルジネート印象材硬化後の断面

特長 **4**

作業環境の改善

ペーストパックによる印象材

ペーストタイプの印象材なので粉が飛び散る事も無くなり、スタッフの作業環境が大幅に改善されます。

特長 **5**

使い易い場所へ


練和には水を必要としないので設置場所の自由度が広がります。

ホームページで使用方法やメンテナンス等、動画で見ることができます。  
URL: <http://www.tokuyama-dental.co.jp/>




印象材の稠度は5段階で調節可能

加圧印象に応用可能な〈レンジ1〉から、流動性が必要な2回法のウォッシュ印象等に応用可能な〈レンジ5〉まで、症例に応じて調節が可能です。

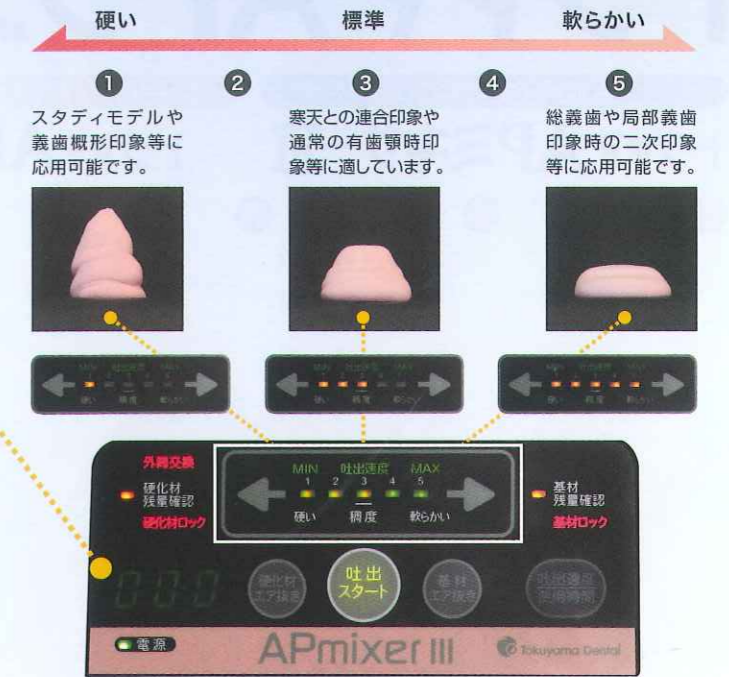


※写真は説明のため全点灯表示にしています。

■加圧した時の稠度

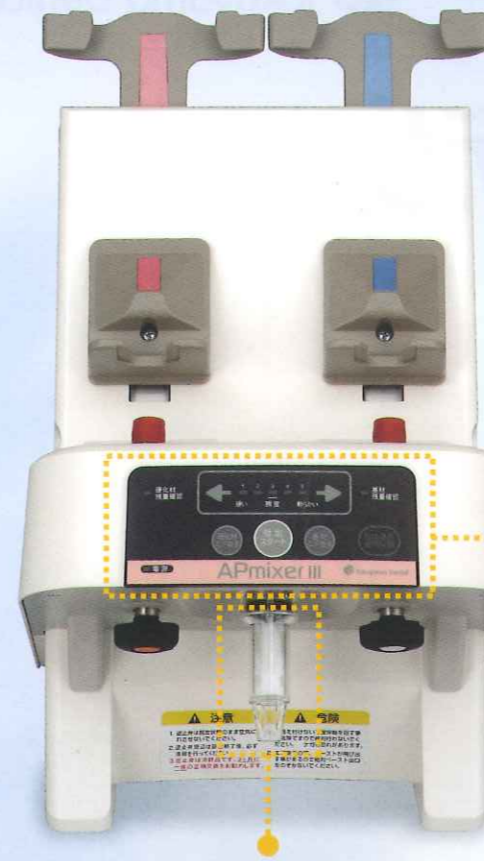

ペーストミキシング部の清掃は簡単です。  
外筒、攪拌子は繰り返し使用できます。

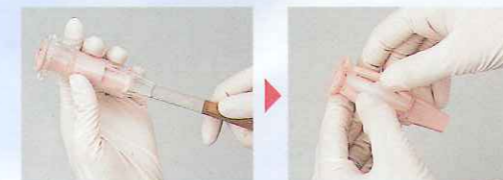

歯科用アルギン酸塩印象材

トクヤマAP-1 特長

滑沢な印象面

自動練和により常に安定した物性の練和物を得ることができます。  
気泡の巻き込みがほとんどなく滑沢な印象面が得られます。

緻密な模型表面

硬石膏、超硬石膏を問わず、緻密な模型表面が得られます。

硬化特性

AP-1は硬化時間の異なるファースト、ノーマル、スローの3タイプがあります。

■操作余裕時間<sup>※1</sup>

ファースト	ノーマル	スロー
45秒	1分	1分10秒

■口腔内保持時間<sup>※2</sup>

ファースト	ノーマル	スロー
2分	2分30秒	3分30秒

※1 室温23℃に設置した器械で稠度レンジ3において、作動スイッチを押して(練和開始)から硬化が始まるまでの経過時間。

※2 室温23℃に設置した器械で稠度レンジ3において、作動スイッチを押して(練和開始)から印象材撤去が可能になるまでに印象材が硬化するまでの時間。



歯科用印象材混こう器

## トクヤマ APミキサーⅢ

■仕様 (一般医療機器) 届出番号08B2X00011000114

電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
電源入力	150W(1.5A)
ヒューズ	5A
吐出比(基材/硬化材)	1/1~6/1(重量比)
外形寸法	幅265×奥行355×高さ375mm
重量	12kg

■製品構成 標準医院価格… ¥413,000

セット構成	単品価格
● APミキサーⅢ本体 …………… 1台	
● 外筒 …………… 5個	¥2,000
● 攪拌子 …………… 5個	¥1,500
● アクセサリーボックス …………… 1個	¥800
● 清掃棒 …………… 1本	¥900
● 乾燥防止キャップ …………… 1個	¥1,200
● APミキサー交換用逆止弁 …………… 4個	¥2,000
● スワイザー …………… 1個	¥700
別売 ● ヒューズ 5A(2本入) …………… 1個	¥600
● 保管材 …………… 1本	¥3,500



歯科用アルギン酸塩印象材

## トクヤマ AP-1

ペースト

■仕様 (管理医療機器) 認証番号220AFBZX00071000

種類	ノーマル、ファースト、スロー
色調/香り	ピンク/ブルーベリー

■製品構成 標準医院価格… ¥27,500

セット構成	単品価格
● 基材 8L(1L×8袋)	¥2,200 / (1L)
● 硬化材 2L(1L×2袋)	¥6,600 / (1L)



アルギン酸塩印象材用接着材

## トクヤマ アルジボンド

標準医院価格… ¥3,800/セット



金属トレー、レジントレーを問わず使用できるトレー用接着材です。硬化したアルジネート印象材との接着材としても使用できます。

包装 ボンド 1本=液 30mL (単品: ¥2,700/1本)  
レジントレープライマー 1本=液 20mL (単品: ¥2,000/1本)

アルギン酸塩印象材用接着材

## メタルトレーボンド

標準医院価格… ¥2,500



維持の少ない金属トレー内面に一層塗布することにより、アルジネート印象材をトレー面から剥がれにくくします。

包装 1本=液 100mL

アルギン酸塩印象材用清掃材

## トクヤマ APトレークリーナー

標準医院価格… ¥6,200



トクヤマ AP-1 を収縮軟化させるタイプの液体トレークリーナーです。

包装 1本=液 2000mL

※このパンフレットの内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。価格は2012年6月現在のものです。消費税は含まれておりません。

## 株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス

0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:30(土・日祭日は除く)

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201  
名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240

ホームページ <http://www.tokuyama-dental.co.jp>

■ご用命は



●この印刷物は、環境にやさしい「水なし印刷」  
「植物性インキ」を使用しています。