

## ポリシングペースト

## POLISHING PASTE

1号



## フルーツミックスミントフレーバー

- ◎フッ素 900ppm 配合で歯質強化が期待できます。
- ◎ラミネートチューブ入りのため乾燥しにくく、必要量だけ取り出せます。
- ◎スケーリング、ルートプレーニング後の歯面研磨に。
- ◎歯冠部の着色除去に。

PMTC用として  
仕上げ用にファイン  
**Fine**

3号

PMTC用として  
研磨用にハード  
**Hard**

ポリシングペースト 1号	製品名	ポリシングペースト 3号
7.8 μm	研磨材平均粒子径	50.8 μm
プロピレングリコール、パラベン、黄色4号、香料	指定成分	プロピレングリコール、パラベン、青色1号、香料
100g 中 フッ化ナトリウム 0.1989g	有効成分	100g 中 フッ化ナトリウム 0.1989g
歯を白くする。う蝕の発生及び進行の予防	効能・効果	歯を白くする。う蝕の発生及び進行の予防
レモンイエロー／フルーツミックスミント	性状（色／風味）	ブルーグリーン／フルーツミックスミント
30mL	容量	30mL
¥1,200 (税別)	参考医院価格	¥1,200 (税別)

## フッ化ナトリウム配合医薬部外品歯磨類

**ポリシングペースト1号(ファイン)  
3号(ハード)**

ポリシングペーストは、効率のよい研磨剤とフッ化ナトリウムを配合し、研磨剤の粒度の異なる2種類のペーストを使い分けて歯を磨き上げることにより、歯の審美性の向上と積極的なむし歯予防を行う、プロフェッショナル用に適した歯磨剤です。

フッ素900ppm配合で歯質の強化、操作性にも優れたペーストです

研磨基剤は“ケイソウ土”



- ◎ ラミネートチューブ入で乾燥しにくく、使いやすい。
- ◎ 粘着性を付与しているので使用中にペーストが飛散しにくく、歯面への付着性や拡がりが良好です。
- ◎ 洗浄性をそこなわない適度な流動性を有しています。
- ◎ フッ素900ppm配合で歯質強化が期待できます。



ポリシングペーストの研磨基剤は珪藻土(ケイソウ土)。珪藻の化石からなる堆積岩で、その粒子は丸みを帯びており歯面を傷つけにくく、より滑らかに磨き上げることができます。

「ポリシングペースト」の  
研磨剤“ケイソウ土”

## ポリシングペーストのブラーク付着抑制効果

出典：鈴木克政ら：研磨ペーストを用いたブラーク付着抑制効果について、小児歯科学雑誌38巻・3号



### ① 染め出し後 ② PCR 0

被験者：歯科衛生士実習生32名

歯垢染色剤にて染め出し、完全にブラークを除去し、この状態を「PCR 0」とした。なお、各部位の評価はO'Leary等のブラークコントロールレコード算出法に準じた。

### ③ ポリシング

次に、左右どちらか片側をポリシングペースト1号及び、3号を用いて歯面研磨を行い、24時間いっさいの口腔清掃を禁止した。なお、日常の食生活に関しては規制しなかった。

### ④ 24時間後


24時間後に再び全額を歯垢染色しブラークコントロールレコードを算出した。結果この例では、左側をポリシングペーストにて研磨したが、24時間経過後においてもほとんど歯垢付着が見られなかった。以上のように、ポリシングペーストによる処理により、未研磨の部位と比較して、有意にその後のブラーク付着が抑制されることが示唆された。

## ※1 ブラークは病原性バイオフィルム

※1: ケインテッセンス出版「歯科衛生士」2003 Vol.27 P.58-2より

う蝕および、歯周病疾患の予防にはブラークの除去がきわめて重要ですが、このう蝕の発現には非水溶性バリアーである不溶性グルカンが大きく関与しています。このグルカンバリアーを持つアクティブなブラーク(病原性バイオフィルム)は通常のブラッシングだけでは十分な除去ができません。そこで、より入念な professional mechanical tooth cleaning=PMTC が重要となってきます。

## PMTCによる物理的・機械的な除去が必要です

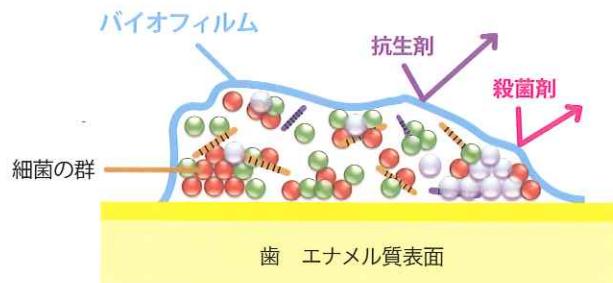

## ビーブランド製品のオーラルケアシステム



医薬部外品歯磨類  
ポリシングペースト1号・3号



フッ化物配合歯磨剤  
キャナリーナ100SY・SC・SR



フッ化物配合歯磨剤  
キャナリーナ900Pw



フッ化物歯面塗布剤  
フルオール・ゼリー歯科用2%



フッ化物洗口剤  
ミラノール顆粒11%

[発売元]

(株)ビーブランド・メディコーデンタル

大阪営業所：大阪市東淀川区西淡路5-20-19  
TEL:06-6370-4182 FAX:06-6370-4184

東京営業所：東京都千代田区神田錦町1-14  
TEL:03-3295-6926 FAX:03-3295-6927

[製造販売元]

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824  
TEL:0748-52-2323