

マウスガード製作用シート

Mouth Guard

半透明

# マウスガード(丸形)

丸形シートを使用する成型器に対応!!



厚み(mm)	直径(mm)	色/性質	枚数	標準価格
1.0	120	半透明/軟質	12	¥2,200
1.5			12	¥2,500
2.0			24	¥5,000
3.0			24	¥5,200
3.8			12	¥2,800

【材 質】エチレン酢酸ビニル(EVA)

## マウスガード ハード(丸形)



厚み(mm)	直径(mm)	色調/性質	枚数	標準価格
2.3	120	半透明/軟質	5	¥1,800

【材 質】エチレン酢酸ビニル(EVA)

※軟質ですが通常品よりも若干硬めです。

## 歯科咬合スプリント用材料 スプリント(丸形)

一般医療機器 医療機器届出番号:23B1X10001B04001  
販売名:スプリントa

常温重合レジンとの接着性を有し、オクルーザルスプリントの製作に適しております



厚み(mm)	直径(mm)	色/性質	枚数	標準価格
0.5	120	透明/硬質	10	¥950
0.8				¥1,100
1.0				¥1,250
1.5				¥1,600
2.0				¥1,800

【材 質】ポリエチレンテレフタレート(PET)

## マウスガード シザーズ

マウスガードの細かな部分も狙い通りカット!!



### 【用途】

マウスガード成形時のジスクのカット

包装単位 1本 標準価格 ¥6,500

## ウレタンビッグ

歯科用ゴム製研磨材 ウレタン系ビッグポイント

一般医療機器 23B1X10001C09008




### 【用途】

軟性裏装材、マウスガード、スプリント、金属、アクリルレジン研磨(荒～中研磨)

回転数	15,000rpm以下
包装単位	10本入/箱
標準価格	¥3,600

## マウスガードホイール

マウスガード用 仕上げ研磨ホイール

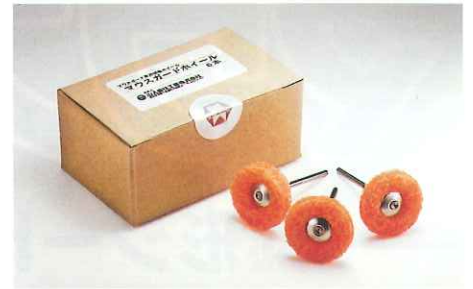

### 【用途】

マウスガードの仕上げ研磨。マウスガードフィニッシャー(マウスガードの艶出し材)の前処理にご使用ください。

最大回転数	6,000rpm
包装単位	6本入/箱 標準価格 ¥2,000

## マウスガードフィニッシャー マウスガード艶出し材



### 【用途】

マウスガードの艶出し。

### 【使用方法】

マウスガードフィニッシャーを綿棒などを用いて、マウスガードに塗布してください。

※軸が紙製の綿棒をご使用ください。

(カラー綿棒、軸部がプラスチック製の綿棒は、色移り、溶解の恐れがあります。)

※使用後は、食品添加物として認められている成分に由来するオレンジの香りがしばらく残ります。(保存環境によりますが、通常、室内で放置し、1週間から10日ほどで消えます。)

包装単位	30ml	標準価格 ¥2,200
	100ml	標準価格 ¥5,800

### ■形態修正後の艶出し

※ご使用前に充分な研磨を行い、出来る限り表面を滑らかにしてください。



成形後、マウスガードシザーズ(ハサミ)等を用い、外形に沿ってカットします。



カーバイドバーを用い、カット面を形態修正します。



ウレタンビッグを用い研磨します。



マウスガードホイールを用いて研磨し、さらに滑らかにします。



綿棒を用いてマウスガードフィニッシャーを塗布します。



山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~ (お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております)

www.yamahachi-dental.co.jp/

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp>

E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)