

yuyama

EMC適合
JIS C 1806-1:2001

改正薬事法対応商品

135°C
3分滅菌

丸カスト
18x2_{cm} 専用

手軽な使いやすさが自慢の
スライドドア式オートクレーブ。



自動高圧蒸気滅菌器

YS-A-C006J

自動高圧蒸気滅菌器 (スライドドアタイプ)

丸カスト
18x2
cm 専用

手軽な使い易さが自慢のオートクレーブ。



1 使い手に優しい工夫を施しました

- イラストキーで滅菌法に準拠したワンタッチ運転が可能です。
- 給水タンクの注水口を前方に配置し、注水をしやすくしています。
- 貯水タンク容量を大きく(4.4ℓ)とり、水の補充回数を少なく済ませます。

2 安心設計がさらに進化しました

- 滅菌法の内容に満たない設定不備は、エラー表示します。
- 温度が過剰上昇した場合には、警告表示でお知らせします。
- 閉閉音の小さい電磁弁の使用で、動作音を小さく抑えています。

震度7でも倒れない秘密。～ユヤマクレーブは最新かつ細心の耐震対策を施しています。



地震大国、日本。記憶に新しいところでも、阪神淡路大震災や中越地震など、痛ましい被害を生んだ大規模な地震が思い起こされます。医療現場ではその使用が常に欠かせないオートクレーブこそ、耐震対策が求められるのではないのでしょうか。ユヤマクレーブでは、最下部に耐震専用金具(右写真)を取り付け、JQA公認の耐震マットをオプションでご用意。実験では、震度7に至る阪神淡路大震災の本物の揺れを再現しても微動だにしませんでした。(左写真)



これは便利! 予約滅菌機能も装備!

予 約




予約滅菌機能を装備していますので、長期にわたる休診直後の業務もスムーズに行えます。予約日は当日を含めて6日分まで可能です。



●イラストキー



●設定不備はエラー音で告知

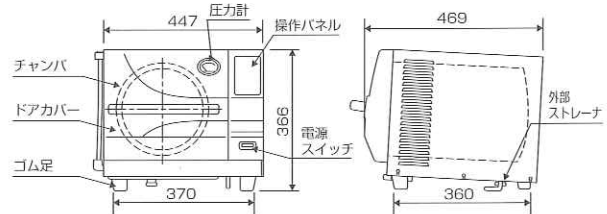

■仕様	型 式 / YS-A-C006J
外 形 寸 法	幅447×高さ366×奥行469mm (但し、部分突起物を除く)
チャンバ寸法	直径246×奥行360mm 16.5 リットル (但し、チャンバ入口直径205mm)
滅 菌 温 度	135/121/115°C、及び液体滅菌121°C (但し、115°C~136°C迄 1°C単位で設定可能)
滅 菌 時 間	標準設定 3/20/30分/30分 (135/121/115°C及び液体滅菌 121°C) (但し、3~60分迄 1分単位で設定可能)
乾 燥 時 間	初期設定30分 (但し、0~95分迄 5分単位で任意時間設定可能)
圧 力 計	0~0.4Mpa
予 約	6日
安全弁吹出圧力	0.24Mpa
給水タンク容量	4.6リットル
液体滅菌容量	500ℓ(別売) 滅菌びん、最大3本
安 全 装 置	安全弁、漏電ブレーカー、過熱防止バイメタル、空焚防止バイメタル、ドアセットセンサー、電流ヒューズ
電器に対する規格の形式	クラス I
電 源 電 圧	AC100V±10V 50/60Hz 消費電力 / 1.2kVA
表 示	時計・予約・温度・滅菌・乾燥
工 程 表 示	ドア・給水・加熱・滅菌・乾燥・完了
質 量	26.5kg
医療機器クラス分類	クラス II (特定保守管理機器)
業 事 承 認 番 号	219AABZX00051000

改正薬事法対応で
EMC適合機種となりました。
~JISC1806-1:2001に
準拠しています~

EMC適合
JIS C 1806-1:2001

改正薬事法では、指定管理医療機器には厚生労働大臣の登録を受けた民間機関による第三者認証が必要となりました。その際、高圧蒸気滅菌器には各種のJIS規格への準拠が求められます。例えば、EMC適合の規格とされるJIS C 1806-1:2001への対応も記述されていますが、当カタログ掲載商品は既にその対応を済ませています。さらに使う方の安全を求めて、進化した性能を有した商品となっております。
※EMC(電磁両立性規格)・・・製品から余分な電磁波を出さず、また周囲からの電磁波に影響を受けて誤動作をしないための規格。



製造販売業者 株式会社 湯山製作所

販売業者 株式会社 ヌ ヤ マ

本 社・第二工場：豊中市名神口3丁目3番1号 〒561-0841
大 阪 TEL (06) 6332-2556 代 FAX (06) 6333-1971 番
[医療機器製造販売業許可番号] 27B2X00001 [医療機器製造業許可番号] 27BZ001333第二工場

ユヤマのホームページ“Y's PLAZA”のアドレス <http://www.yuyama.co.jp/> アクセスをお待ちしています。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●カタログの掲載内容は2007年7月現在のものです。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

Home Page
(ホームページアドレス)
<http://www.yuyama.co.jp>

無償プレゼント実施中!
「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう!」



(株)湯山製作所は、平成15年3月にISO9001(2000年版)を取得しました。品質保証のプロセス管理に加えて、顧客満足向上の波及を含めた認証です。さらに医療機器製造管理システムであるISO13485も平成19年4月に取得。岡山工場では環境マネジメントシステム規格のISO14001も取得しております。

