

防錆剤配合

錆びやすい器具にも安心！



NET.4L

アルカリ性

抜群の洗浄力・防錆力！錆びやすい器具にも安心してご使用いただけます！

STB 小器具用洗剤

業務用

CAE、塩化ベンゼトニウム配合





抜群の洗淨力

※タンパク質が検出できる染色液で処理しています。青い部分があればタンパク質が残っている状態。

①洗淨力試験(超音波10分間)

②洗淨力試験(浸漬→水洗)

30倍希釈液に浸漬

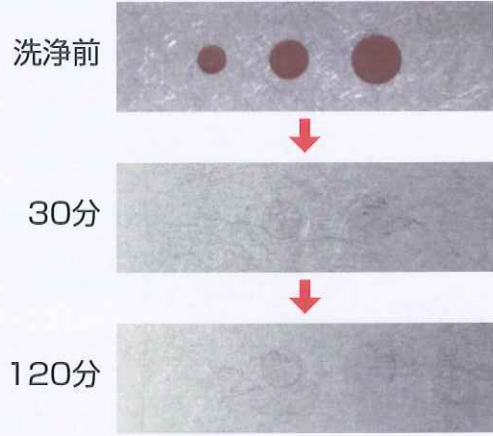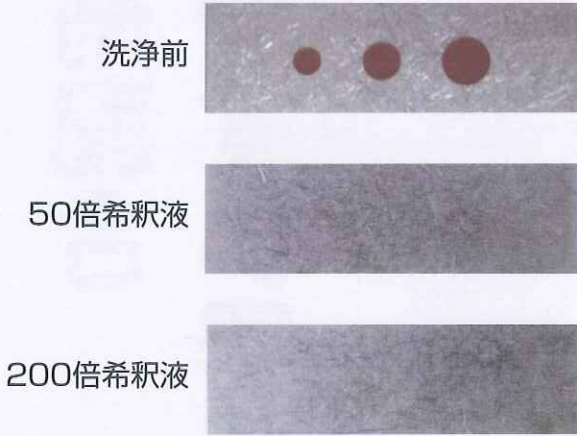

※「ピュアチェック」使用

安心の防錆力

〈防錆力試験〉2日間浸漬

スチールバー(希釈倍率100倍)



ブローチ(希釈倍率100倍)



銅(希釈倍率100倍)



黄銅(希釈倍率100倍)



アルミ(希釈倍率30倍)



ステンレス304(希釈倍率100倍)



使用方法

浸漬洗淨	・使用濃度	30倍希釈	超音波洗淨	・使用濃度	50倍～200倍(汚れによって選択可能)
	・浸漬時間	30分以上		・洗淨時間	5分～10分(汚れによって選択可能)

流水→浸漬or超音波→流水→滅菌処理

注意事項

※洗淨剤はアルカリ性です!

- ・皮膚への影響をおさえるため、感染予防のため炊事用の手袋の着用
- ・目に入らないようにゴーグル等の着用
- ・その他保護具の着用
- ・アルミ製の器具にご使用される場合は、10倍～30倍希釈でご使用ください。



〈発売元〉

S T B グ ル ー プ

有限会社ハマダ歯科商店
八幡デンタル器材株式会社
フォルディ株式会社

〈製造販売元〉

⊗ 太平化学産業株式会社

〒540-0039 大阪市中央区東高麗橋1-19 TEL.06-6942-7241