

**CROSSTEX**<sup>®</sup>  
A CANTEL MEDICAL COMPANY

**PROTECTS**<sup>SM</sup>

**NITRILE**



*Ambi-ance*<sup>™</sup>

アンビアンス ニトリルグローブ パウダーフリー

素手感覚に近い快適装着感

左右兼用

200 枚入

伸縮性 伸縮性に富み、カスタムメイドのように  
快適なフィット感

指 先 指先部分は滑り止め処理加工

袖 口 丸め込み処理加工

カラー ブルー

規 格 ASTM D6319

XS

S

M

L

医療機器届出番号 27B2X00041000170 歯科用手袋 一般医療機器 製造販売元: サンデンタル株式会社

**SD サンデンタル株式会社**  
info@sundental.jp / www.sundental.jp

本社: 大阪市中央区南船場 4-8-9 営業所: 東京 03.3836.9347  
06.6245.0950 福岡 092.482.2318

医 03 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 歯科用手袋 JMDN70911000

## アンビアンス ニトリルグローブ パウダーフリー

再使用禁止

【禁忌・禁止、併用禁忌】  
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状：直指型、平手タイプ



2. 構造

原材料：カルボキシル化ブタジエンアクリロニトリル

サイズ：XS / S / M / L

サイズ	掌部の幅 mm	全長 mm
XS	75±5	235
S	85±5	235
M	95±5	235
L	106±5	235

表面加工：梨地加工、パウダーなし

項目	老化前	老化後
引張強さ	14MPa 以上	14MPa 以上
切断伸び	500% 以上	400% 以上

3. 原理

合成ゴムを主材料とし、副材料に打粉を含まない（パウダーフリー）、未滅菌の使い捨て式歯科用手袋である。

【使用目的又は効果】

歯科診療の際の、術者の感染防止または交差感染の防止（手術を除く）。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 手指を洗浄する。
- 2) 取り出し口より手指で手袋の表面に触れないように取り出す。
- 3) 手袋は無菌的に装着する。

【使用上の注意】

- 1) 本品は、記載の使用目的にのみ使用すること。
- 2) 油類・薬品・溶剤等によってはグローブに影響を与える恐れ（膨潤や浸透等）があるので、確認の上使用すること。本品を強い化学薬品に長時間接触させないこと。（過酸化水素水やフェノールの扱いは適さない）。
- 3) 製品に含まれる化学物質により、アレルギー性接触皮膚炎（IV型・遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）の症状がでる恐れがある。また、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を引き起こすことがある。このような症状が発生した場合には、直ちに使用を中止し医師に相談すること。
- 4) 手袋装着後、使用前に水洗し、ピンホール等による水の浸入がないことを確認してから使用すること。
- 5) 感染防止の為、患者毎に取り替えること。
- 6) 刃物等鋭利な器具に触れると、切れたり、穴があいたりすることがあるので注意すること。
- 7) 本製品は、本文【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- 8) 洗浄、消毒、滅菌上の注意  
(ア) 本製品は未滅菌である。  
(イ) 本製品は再使用禁止。
- 9) 廃棄  
(ア) 使用済みの本製品を廃棄する場合は、地域の条例に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 1) 品質保持の為、水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて、冷暗所に保管すること。
- 2) 使用期限は外箱に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：サンデンタル株式会社

製造業者：CROSSTEX INTERNATIONAL, INC.

（クロスステックスインターナショナル）

国名：アメリカ合衆国