

# クリアでしか得られないリアル

# Dr.Silicon® Clear Bite

**NEW**

ドクターシリコン クリア バイト

**ご好評のドクターシリコン バイトに透明タイプのクリアタイプが追加新発売!!  
より臨床的な応用範囲が広がりました。**

**新発売**



**BSA**



### ■ 特長

- ・咬合状態を目視で確認しながら咬合採得ができます。
- ・透明度の高い色調のため咬合状態がクリアーに確認できます。
- ・透明で光を透過させるので光重合レジンのコア材としてもお使い頂けます。
- ・チキソトロピー性に優れ、口腔内で垂れずに操作できます。
- ・弾性を抑え、寸法安定性に優れた咬合採得が行えます。

高い透明度で  
視認性 UP

クリア バイト


他社製品

### ■ 特長を生かした使用例

#### ■ プロビジョナルレストレーション製作

①～③クリアバイトでコア印象採得を行い透明コアを形成します。

④⑤支台歯に分離材塗布後、透明コアに光重合レジンを流し込み、コア試適。光重合を行います。⑥コアを除去し、⑦通法に従い研磨を行います。

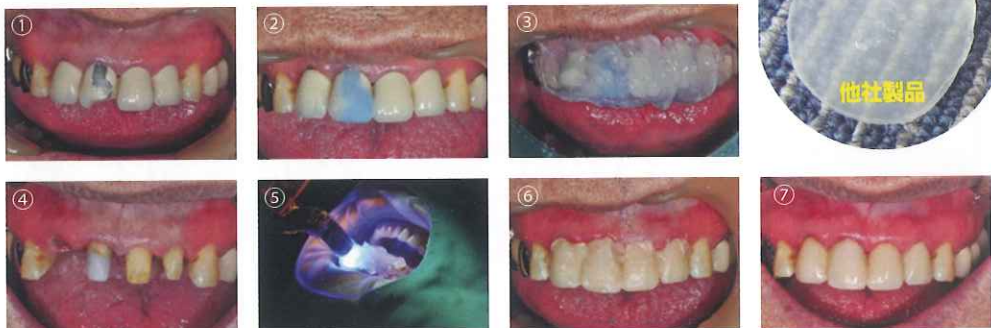

#### ■ 矯正 (間接法でのブラケットのトランスファー)

- ①石膏模型上にブラケットを仮配列します。
- ②クリアバイトで透明コアを製作します。
- ③ボンディング材を塗布し口腔内にクリアバイトのコアをセットします。
- ④光重合後、コアを取り外します。

# Dr.Silicon® クリア バイト

**新発売**

#### 物理的性質表

操作余裕時間	30 秒
口腔内硬化時間	2 分
ショア A 硬度	72

JIS T6513 による参考データ

包装：カートリッジ 50ml×2  
ミキシングチップ L×6

**思いっきり使える この価格!!**

医院価格

**2,900円**



分類：一般医療機器  
一般的名称：歯科咬合採得用材料  
届出番号：23BB2X00017000210