

# スペシャル ロタティブ

Spécial Rotatif

## バーヤリーマーの滅菌前洗浄に 15分の浸漬で除菌効果を発揮

- バーヤリーマー・根管治療器具などを洗浄・除菌します。
- 様々な菌・ウイルス類を幅広く除菌します。※すべての菌を除菌するわけではありません。
- 有機物の汚れによる影響を受けにくい除菌成分「PHMB」を使用しています。
- ニッケル・チタニウム・タングステンカーバイド・アルミニウム等、幅広い材質の器具を洗浄できます。
- 汚れが激しい場合は、超音波洗浄器でもお使いいただけます。
- 希釈や計量が不要な原液タイプです。
- 浸漬の際は、十分な深さがありすぎもしやすい「ソーキングカップ」のご使用がお勧めです。

▼ スペシャル ロタティブ  
5リットル



▼ スペシャル ロタティブ  
2リットル



◀ ソーキングカップ  
ANI0404050  
高さ8×φ上9×φ下8.6(cm)  
(取っ手含む)  
参考医院価格：¥2,940/個


主成分	配合目的
ポリヘキサメチレンピグアナイド塩酸塩 (PHMB)	除菌
ジデシルメチルポリオキシエチルアンモニウムプロピオネート	除菌
ポリアルコキシシレーテッドファッティアルコール	洗浄
アミンアルキルジメチルN-オキサイド	洗浄

●すべての菌を除菌するわけではありません。●安全のため、グローブをご使用ください。●24時間毎に洗剤を新しいものに取り換えてください。●5℃～35℃の間で保管してください。●お子様の手の届かないところで保管してください。●直射日光の当たる場所には保管しないでください。

### 使用方法



本品をソーキングカップなどの洗浄容器に注ぎます。薄めず原液のままご使用ください。

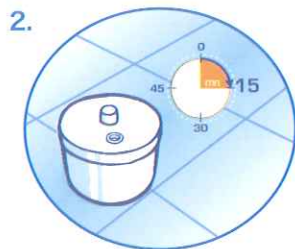

器具を完全に液中に沈めます。15分間そのまま放置してください。



器具を取り出し、流水で全体をよくすすいでください。



器具を乾燥させて、その後、滅菌してください。

品番	内容量	入り数	参考医院価格	EANコード
DEN1087047	5リットル	1ケース/1本	¥12,400/本	3597610033100
DEN1087062	2リットル	1ケース/1本	¥4,500/本	3597610033124