



MODEL LUSTERING AGENT

LABO SPRAY

ラボスプレー

石膏模型艶出し剤



石膏模型の艶出しが短時間で簡単にできます。

特長

石膏模型の艶出しが短時間で簡単にできます。

石膏模型処理後の変色がありません。

模型の艶出し用途以外に、模型の汚れ防止、簡易な耐水性付与などにもご利用できます。

色調

無色透明

包装

100ml入りスプレー付き×6／P C

500ml入りボトル×6／P C

用法・容量

使用方法：スプレー法：

- ①石膏模型表面全体にスプレーします。
- ②30秒後、ガーゼ、ティッシュ等で塗り広げながら、余分な液を拭き取ります。
- ③模型表面が乾き始めたら、歯頸部、咬合面等の拭き残りが白くなりますので、柔らかめの歯ブラシ、刷毛、バフなどで艶が出る様に磨きます。
- ④ムラがあった時は、①から繰り返して下さい。



使用方法：浸漬法

- ①石膏模型を本液に漬けます。
- ②30秒後取り出し、水洗しないでそのままガーゼ等で余分な液を拭き取ります。
- ③模型表面が乾き始めたら、歯頸部、咬合面等の拭き残りが白くなりますので、柔らかめの歯ブラシ、刷毛・バフなどで艶が出る様に磨きます。

使用上の注意

- ①スプレーの飛沫や模型を磨く時に出る白い粉を吸い込まない様に、換気の良い場所で使用されるかマスクを装着してご使用下さい。
- ②浸漬法の場合、30秒以上浸漬すると白濁して液の寿命が短くなります。



サンエス石膏株式会社

大阪本社 大阪営業所 大阪府吹田市江坂町1-23-101
大同生命江坂ビル13F TEL (06) 6339-0870 FAX. 06 (6339) 0871
東京営業所 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F
TEL. 03 (5283) 6201 (代) FAX. 03 (5283) 6205
中部営業所 愛知県瀬戸市苗場町113番地
TEL. 0561 (82) 9185 (代) FAX. 0561 (85) 4179
福岡営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目4-17 第6岡部ビル6F
TEL. 092 (413) 5220 (代) FAX. 092 (413) 5222

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ