


# gutta•core® PINK

ガッタパーチャ製の新しい充填材

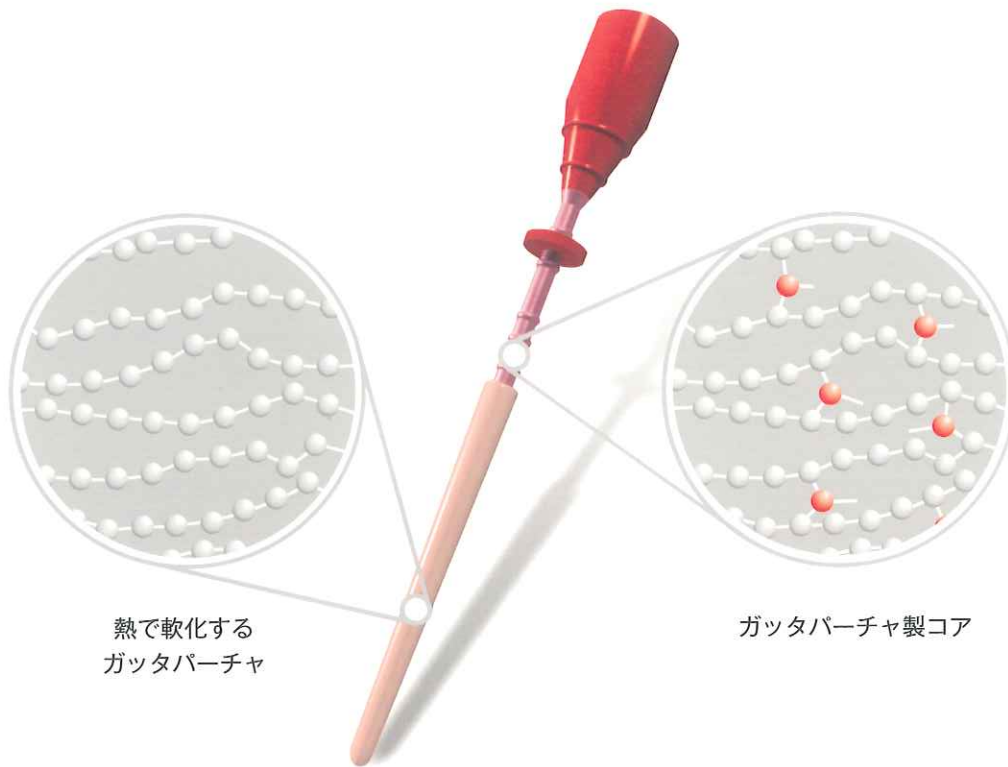


熱で軟化する  
ガッタパーチャ

ガッタパーチャ製コア

### 3次元的根管充填

1本で垂直及び側方への加圧ができ、短時間で3次元的根管充填ができます。

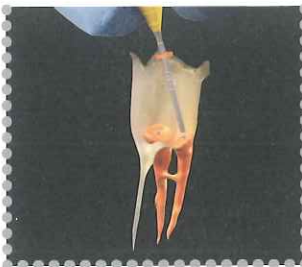


### 容易な リトリートメント

容易に除去でき、リトリートメントの時間と手間を省きます。



### 容易な ポストスペースの作成

機械的除去で容易にポストスペースを作成できます。

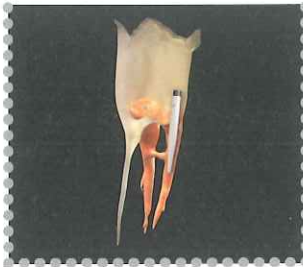

## 製品仕様

製品番号	製品名	包装	製品番号	製品名	包装
A1703B0042000	ガッタコア ピンク #20	6本入	A1803B0042500	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X2用	6本入
A1703B0042500	ガッタコア ピンク #25		A1803B0043000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X3用	
A1703B0043000	ガッタコア ピンク #30		A1803B0044000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X4用	
A1703B0043500	ガッタコア ピンク #35		A1803B0045000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X5用	
A1703B0044000	ガッタコア ピンク #40		A1803P0042500	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X2用	
A1703B0044500	ガッタコア ピンク #45		A1803P0043000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X3用	
A1703B0045000	ガッタコア ピンク #50		A1803P0044000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X4用	
A1703B0045500	ガッタコア ピンク #55		30本入		
A1703B0046000	ガッタコア ピンク #60				
A1703B0047000	ガッタコア ピンク #70				
A1703B0048000	ガッタコア ピンク #80				
A1703B0049000	ガッタコア ピンク #90				
A1703P0042000	ガッタコア ピンク #20				
A1703P0042500	ガッタコア ピンク #25				
A1703P0043000	ガッタコア ピンク #30				
A1703P0043500	ガッタコア ピンク #35				
A1703P0044000	ガッタコア ピンク #40				



製品名：ガッタコア ピンク  
 一般的名称：歯科用根管充填固状材料  
 医療機器認証番号：227AGBZX00042000  
 クラス分類：クラスII（管理医療機器）

### ガッタコア ピンク サイズ対応表

根管サイズ (先端径/テーパー)	ガッタコア ピンク	根管サイズ (先端径/テーパー)	ガッタコア ピンク
20/.04	20/.06 に拡大	20/.06	#20
25/.04	#20	25/.06	#25
30/.04	#25	30/.06	#30
35/.04 以上	最終拡大の先端径より1つ下のサイズを使用	35/.06 以上	最終拡大の先端径と同じサイズを使用

## 関連製品

### サーマブレップ2

ガッタコアピンク/サーマフィル用加温器



・製品名：サーマブレップ2  
 ・製品名：プロテーパー・ネクスト  
 ・製品名：ペリファイヤ

一般的名称：歯科材料加温器  
 一般的名称：電動式歯科用ファイル  
 一般的名称：歯科用ファイル

### ペリファイヤ

試適用インストルメント



長さ：25mm  
 サイズ：#20、#25、#30、#35、#40、#45  
 #50、#55、#60、#70、#80、#90  
 単品：6本入り（種類別）  
 セット：6本入り（#20～#45 各1本入り）  
 セット：6本入り（#50～#90 各1本入り）

医療機器届出番号：09B1X00005Y03530  
 医療機器認証番号：225AKBZX00158000  
 医療機器届出番号：09B1X00005Y02100

### プロテーパー・ネクスト



種類（X1,X2,X3,X4,X5）  
 長さ（21,25,31mm）  
 各組み合わせ6本

クラス分類：クラスI（一般医療機器）  
 クラス分類：クラスII（管理医療機器）  
 クラス分類：クラスI（一般医療機器）

\*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

**デンツプライ三金株式会社**

東京本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10  
 那須工場/〒324-0036 栃木県大田原市下石上1382番11

**カスタマー・サービス・センター**

受付時間：9：00～17：00（土・日・祝祭日を除く）

**0120-789-123** FAX:0120-789-129



<http://www.dentsply-sankin.com>