

Mucopren[®]
soft DENTURE RELINE SYSTEM

HAKUSUI

2016年

健保適用品


下顎総義歯内面適合法 軟質材料

ムコプレ ソフト

シリコン系義歯用軟質裏装材
直接法/間接法

新たなプロセス
だから高品質

Delivers what
it promises.

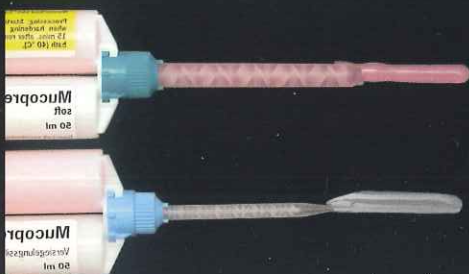

新システムカートリッジ入りシーラント(表面コート材)が
システムになった新2層構造の義歯裏装用軟質シリコン。
新たな操作手順がより高い接着力・耐久性・高品質の領域に導く。

Direct and Indirect Application using Mucopren soft

作業時間	直接法	間接法
操作時間	2分15秒	2分15秒
口腔内保持時間	3分15秒	—
温水浸水時間	15分<	30分<

●上記はリライニング材の作業時間です。

物性データ	
接着強度	179 N/cm ²
引裂強度	502 N/cm ²
歪回復率	99.5 %



クリニカルヒント1

ヒント1



- アドヒーシブは裏装面全面とその周縁を越えて確実に薄く塗布します。
- アドヒーシブは2回、間隔をおいて塗布します。

クリニカルヒント2




裏装面は一層削除して新鮮面を出し粗面にして仕上げます。

クリニカルヒント3 ——— より確実な接着のために



移行部は直角に削り厚みを十分設けます。

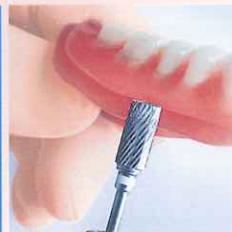

裏装作業中は、裏装面を素手やラテックスグローブ等で触れないよう、面汚染に注意します。



Clinical Points



削合終了。新鮮粗面露出、表層粗面仕上げ及び移行部の厚みが確保されています。

セット包装



ムコプレ ソフト ベーシックセット

ムコプレ ソフト (50mL)	1
ムコプレ シリコンシーラント (50mL)	1
ムコプレ アドヒーシブ (10mL)	1
ミキシングチップφ6.5mm 大グリーン	7
ミキシングチップφ3.2mm 小ブルー	20
ブラシホルダー	1
ディスポーザブルブラシ	20
スチールバー	1
ポリッシングディスク	2
パッキングディスク	4
マンドレール	1

補充用包装



ムコプレ ソフト リフィル

ムコプレ ソフト (50mL)	2
ミキシングチップφ6.5mm 大グリーン	12



ムコプレシリコンシーラント リフィル

ムコプレ シリコンシーラント (50mL)	1
ミキシングチップφ3.2mm 小ブルー	10

補充用包装

					
ムコプレ アドヒーシブ ムコプレ アドヒーシブ(10mL)1	ミキシングチップ φ6.5mm大グリーン ミキシングチップ φ6.5mm大グリーン 50	ミキシングチップ φ3.2mm小ブルー ミキシングチップ φ3.2mm小ブルー 60	スチールバー スチールバー1	ポリッシングディスク ポリッシングディスク.....2 パッキングディスク.....4 マンドレール.....1	アプリフィックス4 (ガンII) アプリフィックス4 (ガンII)1

医療機器認証番号 219AGBZX00071000、管理医療機器



ケッテンバツハ社 (ドイツ)

白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市中区千種区山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/> 2016.04.P.7,000(Rev)