

OPTIM 33TB

SciCan

Your Infection Control Specialist™



～ 感染管理における最適な選択 ～

OPTIM 33TB には、革新的な、世界的に特許が取得されている除菌技術である **AHP**(加速化過酸化水素) が配合されています。

より清潔に

より迅速に

より安全に

より環境に優しい

OPTIM を選択して最適な結果を！

AHP の利点

- ・ 健康、安全、及び環境特性を守ります
- ・ ラベルに厳格な警告なし
- ・ 刺激性なし
- ・ VOC(揮発性有機化合物) が空气中に発生しないため、換気不要
- ・ 環境に優しい / 生分解性 - 酸素及び水に分解
- ・ 広範囲の有機物に対して即効性があり、効果的




本社 / 〒174-0056 東京都板橋区志村1-28-1 ☎03(3966)7736
営業所 / 大阪 ☎06(6308)1173 福岡 ☎092(432)0770 札幌 ☎011(622)7532
E-mail: sedent@sedent.co.jp URL http://www.sedent.co.jp

OPTIM™ 33TB クイックガイド

OPTIM 33TB WIPES

WIPE • DISCARD • WIPE ~ワイプで拭くだけの簡単消毒！~

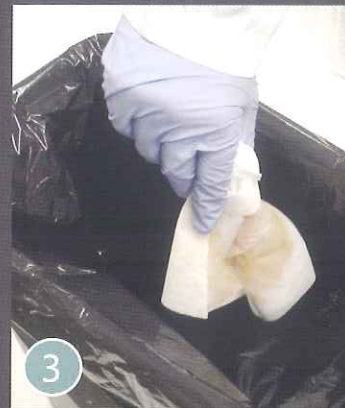

消毒前の洗浄

1. OPTIMウェットティッシュワイプを45度の角度で引き出します。(蓋は毎回しっかりと閉めて下さい。)
2. 洗浄・消毒を行う面に付着している有機物または血液を除去して下さい。
3. 汚れがひどくない場合、まずワイプの片面で拭いて洗浄した後、裏返してもう一方の側で消毒をして下さい。
4. 汚れがひどい場合、まず洗浄のためワイプで表面を拭き、その後使用済みワイプを破棄し、新しいワイプで洗浄した面を消毒して下さい。

安心・安全にお使い頂くために：

OPTIM を使いすぎないでください

以下の物に対する OPTIM の使用を避けてください。真鍮、銅、陽極酸化アルミニウム、カーボン系の器具、ソフトプラスチック類。具体的には、VITA SHADE, ROOT 2X SCREEN, P+C CHAIR CONTROLS & SCHICK DIGITAL SENSORS(オールドモデル)。

これらに OPTIM をご使用になると変色または表面が傷つく恐れがあります。

コーンスターチと手袋の使用は、表面の変色を引き起こす可能性があります。

高レベルの硫黄で生産された手袋を使用すると腐った卵の臭いがすることがあります。

OPTIMはCATを受けています。

EPA (アメリカ合衆国環境保護庁) の評価：警告必要なし。ただしEPAの評価区分として最低レベルの毒性があるとして注意書きがラベルに必要。

OPTIMはワンステップクリーナー消毒剤としてのEPAオーガニック土壌負荷条件に基づいてテストされています。

その他詳しい指示・説明及び情報については、製品の容器をご確認ください

OPTIMへの切り替え

- OPTIMに切り替える前に、ご使用になる箇所の表面を石鹸と水でしっかりとすすぎ洗いをして下さい。OPTIMに切り替え後も、ご使用箇所の表面を定期的に水ですすぎ洗いの必要があります。(1週間に1回以上推奨)
- 化学物質を混ぜないでください！



Surface Disinfectant

OPTIMは、2016年度 AMERICAN DENTAL ADVISOR AWARD 受賞！

世界的に実証された確かな洗浄の有効性およびコスト削減！

SciCan

Your Infection Control Specialist™