

# アメリカで

# 人気No.1の鼻うがい

# 日々健康に過ごすための“新習慣”

花粉症に!

風邪の予防に!

アレルギー性鼻炎に!

日々の健康に!

鼻うがいの

## サイナス・リンス™ キット

洗浄ボトルと生理食塩水を使った鼻うがい・保湿



空気中には、様々な種類の花粉やホコリ、雑菌、ウイルスがたくさん浮遊しています。これら異物は呼吸とともに鼻に吸い込まれ鼻の粘膜に付着します。これをきれいに洗い流すのが鼻うがいです。生理食塩水と洗浄ボトルを使う副作用の心配のないニールメッドの鼻洗浄システム「サイナス・リンス キット」はアメリカで人気 No.1。

世界中で愛される鼻洗浄がついに日本に上陸。新しい習慣としてご愛用ください。

鼻洗浄液の流れ



# NeilMed™ SINUS RINSE™

ニールメッド

一般名称：手動式生体用洗浄器（一般医療機器）  
商品名：ニールメッド・サイナス・リンス・キット  
製造番号：13B2200924000001



# サイナス・リンス キットは 洗浄ボトルと生理食塩水を使った“鼻うがい”のキットです。

サイナス・リンス キットは、鼻うがい用のボトル容器と、調合済みサッシュエ(生理食塩水の素を密封した小袋)とで構成されています。  
その調合済みサッシュエは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mlのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。  
ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉・雑菌・ウイルス等を洗い流します。  
毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをお勧めします。

## ニールメッド・サイナスリンス キットのココがすごい!

**Point  
1**

体液に近い洗浄液で洗うから  
“ツーン”としない

サイナス・リンスの洗浄液(USPグレード/米国薬局方品質の塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム)は人間の体液に近い濃度に調整されているので、鼻に入れても刺激が少なく“ツーン”としません。

**Point  
2**

1回使いきりタイプの  
調合済みサッシュエなので簡単・安心!

約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを調合したサッシュエです。分量の調整が必要なく、簡単に洗浄液ができ**便利で安心**です。

**Point  
3**

使いやすい独自開発システムの  
ボトル形状タイプ

同時開発のラージボリューム&ロープレッシャーシステム(多量の水で優しくしっかり)を採用。**片手で簡単**に使用できます。

**Point  
4**

たっぷりの洗浄液で、  
鼻腔を優しくしっかり洗います!

**多量の洗浄液**が鼻腔に噴射され、ゴミやチリ、花粉をしっかりと洗い流すことで鼻腔内を清潔に保ち、潤いを与えます。

使用方法




1 キャップを開ける。



2 精製水を準備し、体温(36°)程度に温める。(レンジ使用も可)水道水は煮沸して体温(36°)程度に冷ます。



3 適温になった精製水(煮沸水)240mlに、粉末(1包)を入れて完全に溶かし、洗浄液を作る。

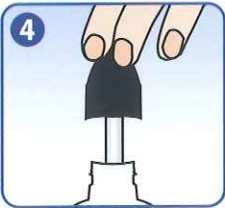

4 キャップをボトルにしっかり取り付ける。



5 頭を下げ、口で息をしながら、ボトルをゆっくり握り液を押し出すと、もう一方の鼻孔から洗浄液が流れ出る。



6 残り半分程度の洗浄液を使い、もう一方の鼻孔からも同じ作業をおこなう。最後に鼻をやさしくかむ。

(こんな時にお使いください)

用途		
日々の健康に	花粉症	ハウスダスト
風邪を引きやすい	鼻づまり 鼻の不快感	ペットの抜け毛
薬が飲めない 妊婦さん	工事現場の 粉塵・土ほこり	PM2.5 火山灰

ラインナップ



サイナス・リンス キット 10包  
(ボトル+調合済みサッシュエ 10包)



サイナス・リンス キット 60包  
(ボトル+調合済みサッシュエ 60包)

スター  
キット

サイナス・リンス キット 10包	
商品番号	K24680
標準価格	850円
患者さん価格	999円
サイナス・リンス キット 60包	
商品番号	K24681
標準価格	2,380円
患者さん価格	2,800円
※価格はすべて税別となります	



サイナス・リンス リフィル 60包  
(調合済みサッシュエ 60包)



サイナス・リンス リフィル 120包  
(調合済みサッシュエ 120包)

リフィル

サイナス・リンス リフィル 60包	
商品番号	K24682
標準価格	1,700円
患者さん価格	2,000円
サイナス・リンス リフィル 120包	
商品番号	K24683
標準価格	3,060円
患者さん価格	3,600円
※価格はすべて税別となります	

**SmartPractice**

【製造販売元】ニールメッドファーマシューティカルズ株式会社  
【お問い合わせ先】株式会社スマートプラクティスジャパン

■本社  
〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13 アサヒヤマトビル2階 TEL.046-200-5615 FAX.046-401-1737  
■西日本営業所  
〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-26 Auroraビル710 TEL.06-6309-4000 FAX.06-6309-4002

販売代理店