



PMTTC用コードレスハンドピース
メルサーージュ プロ ソリッド



PCP (Professional Care for Prophylaxis) 製品

PCPは松風が提唱する、口腔衛生や予防のための概念で、PCP製品はそれらに最適な製品群です。

ヘッドとギアを一体化 (ソリッド) した
PMTTC用コードレスハンドピース

メルサーージュ プロ ソリッド

軽く、長時間操作でも疲れにくいコードレスタイプ
口腔内の視野が広がり、
さらには的確なPMTTCをサポートします。



Message PRO Solid




超コンパクトヘッドで
届きやすさ抜群

SHOFU INC.

※印刷の色は実際の色と異なる場合があります

超コンパクトヘッドで届きやすさ抜群

患者さまの開口量には限度があります。従来のヘッドよりもさらに細くて長い超コンパクトヘッドにしました。口腔内の視野も広がり作業効率も向上します。

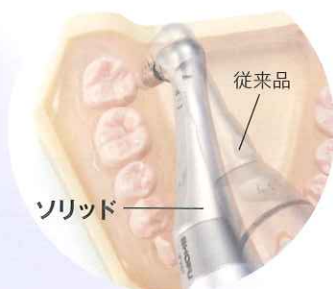

ヘッドへのクリーニングペーストの侵入を防ぐダブルシールド防塵シールドを採用。



ヘッドを6ポジションに簡単設定

施術部位に応じて6方向に向きを変えて取り付けることができますので、作業効率が大幅に向上します。



包装・価格



PMTc用コードレスハンドピース
メルサーージュ プロ ソリッド
一式 **¥93,000**

【セット内容】
ハンドピース(モーターキャップ付)、
スタンド、
コントラアングルヘッド(1/4ヘッド iFX57)、
ACアダプター、
Fタイプスプレーノズル

販売名	メルサーージュプロ ソリッド
一般的名称	歯科用電動式ハンドピース
承認・認証・届出番号	管理医療機器 医療機器認証番号 226ABBZX00034A01 特定保守管理医療機器

別売品

メルサーージュプロ ソリッド 1/4・ヘッド (iFX57)	メルサーージュプロ ラッチタイプ・ヘッド (NAC)	メルサーージュプロ 1/4減速シャング (F4R)	メルサーージュプロ 等速シャング (FC)	メルサーージュプロ ソリッド スタンド (電源コードなし)	メルサーージュプロ ソリッド ハンドピース (モーターキャップ付)	メルサーージュプロ ソリッド バッテリーパック	メルサーージュプロ ソリッド ACアダプター
¥24,500	¥12,000	¥12,500	¥10,500	¥14,000	¥42,500	¥4,500	¥12,000

カタログに記載の価格は2016年9月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

シンプルな操作パネル

操作ボタンはハンドピース上面に設置し、シンプルな操作が可能です。



正逆切換

バッテリー表示

回転速度表示部

- 5 2,500min⁻¹
- 4 2,000min⁻¹
- 3 1,500min⁻¹
- 2 1,000min⁻¹
- 1 500min⁻¹

電源/
回転速度選択

〈広範囲な速度設定〉

ヘッドを交換することで、500min⁻¹~10,000min⁻¹と幅広く速度設定ができますので、施術目的に応じた使い方が可能です。

ギア比	回転速度 (min ⁻¹)				
1 : 1	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000
4 : 1	500	1,000	1,500	2,000	2,500

※2,500min⁻¹以上でご使用される場合は、別売品のヘッドと等速シャングをお求めください。

●仕様

ハンドピース: 定格入力DC3.7V 0.6A、最高回転速度(無負荷時) 10,000min⁻¹※1
連続使用時間(満充電時) 約1時間※2、充電時間 約1.5時間
寸法 φ25×D139mm、質量 78g

※1: バッテリー残量によって回転速度が変化することがあります。
※2: 使用時の負荷によって使用時間が変化することがあります。

スタンド: 定格入力5VDC 0.6A、寸法 W80×D105×H37mm、質量120g

ACアダプター: 定格入力AC100-240V 0.4-0.2A、定格出力 5VDC 2A、
寸法 W48×D81×H43.3mm、コード長 1.8m、質量140g

コントラアングルヘッド: 許容入力回転速度10,000min⁻¹、
無負荷最高回転速度2,500min⁻¹、ギア比4:1減速、質量38g

※基本セットはスクリュータイプのみですが、別売のラッチタイプ(ヘッド・シャング)を購入いただくとCAタイプのラバーカップ等もご使用いただけます。

取扱い店