

100%食品添加物由来



premium zia
プレミアムジア

マウスガード(ナイトガード・入れ歯)専用

強力分解型
除菌・防臭スプレー

最高品質次亜イオン

安全・安心

※100%食添由来成分

[揮発しない・錆びにくい・色落ちしない]

最高品質次亜塩素酸ナトリウム

除菌率99%以上!

ニオイ・ヌメリ解消!

抗菌・防臭

99%
除菌



品名:プレミアムジア

成分:安定化高純度次亜塩素酸ナトリウム+(ROイオン交換)高純水


性質:弱アルカリ性

内容量:100mL

医院価格:1,440円(税抜) 希望患者価格:1,800円(税抜)



使用前または使用後に
スプレーするだけ! 手入れが簡単に!

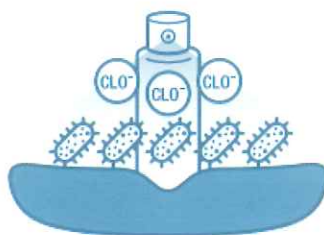

スプレー後1分程度してから布で拭くか、乾いてからケース等にしめてください。

[錆びにくい・色落ちしない]から

各種マウスピース(矯正用・歯ぎしり防止用・いびき防止用)、
3DSトレー、リテーナー、スプリント、入れ歯などにもご使用できます。

<発売元>

ナノクロシステム株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋3-6-2

<http://nanoclo2-system.co.jp>

[お客様お問い合わせ先] 03-6435-7553

<販売元>



山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp

一般細菌に対する除菌効果

黄色ブドウ球菌に対する除菌効果試験



	開始時	15秒	30秒	60秒
プレミアムジア	320,000	30	<10	<10
	減少率	99.99%	99.99%	99.99%
自然放置	320,000	-	-	400,000
	増加率			25%

大腸菌(O-157)に対する除菌効果試験



	開始時	15秒	30秒	60秒
プレミアムジア	130,000	<10	<10	<10
	減少率	99.99%	99.99%	99.99%
自然放置	130,000	-	-	130,000
	減少率			0%

(財)日本食品分析センター調べ

お客様の声

会社員 埼玉県:40代男性 矯正装置使用



9歳になる娘は、取り外し可能な矯正装置を使っていますが、ニオイが気になると言っていたので、歯科医院の先生から勧められるままに「プレミアムジア マウスガード専用スプレー」を購入。食事中にスプレーするだけで、嫌な臭いが取れ、簡単に使えるとのこと娘も凄く喜んでます。使い始めは、ほんのり残る塩素臭が、気になると言っていたのですが、軽く水洗いするだけで取れるので、問題ありませんでした。今では、学校に持っていき、給食中にスプレーして嫌な臭いを取っているそうです。娘が気に入っている商品に出会えて良かったです！

会社員 千葉県:20代女性 矯正用マウスピース使用



食事の時にはマウスピースを外しますが、食後に装着する時に実はニオイが気になって今までは装着するのにちょっと抵抗感がありました。ニオイの元が細菌だなんて知らなかったので除菌なんて考えたことがありませんでした。今まではただ水道水で洗い流していただけでしたが、歯医者さんで勧められてスプレーをするようになってからは嫌なニオイが無くなり気持ちよく装着できるようになりました。使用感はとても良いです。

大学生 東京都:20代男性 スポーツ用マウスガード使用



大学でアメフトをやっています。今まではマウスガードが汚れているとか、除菌が必要とか全く無関心で、ただ水道水でサッと洗い流していました。今回は自分の歯形に合ったマウスガードが良いという話を聞き、歯医者さんでマウスガードを作りました。安物のマウスガードと違いせっかく高いお金出して作ったマウスガードだから大事に使った方が良く先生に勧められスプレーを購入しました。確かに使ってみると水道水で洗い流していただけの時と違って、ヌメリが無くなり気持ちよく使えます。部員にも薦めようと思っています。

マウスガード(ナイトガード・入れ歯)専用

強力分解型 除菌・防臭スプレー

成分:安定化高純度次亜塩素酸ナトリウム+(ROイオン交換)高純水
性質:弱アルカリ性
内容量:100mL

○製品の仕様およびデザインは性能改善の為、予告なく変更する場合がございます。

安全・安心
※100%食添由来成分

使用回数
555
プッシュ



100%食品添加物由来

premium zia
プレミアムジア

最高品質次亜イオン

<発売元>

ナノクロシステム株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋3-6-2

<http://nanoclo2-system.co.jp>

[お客様お問い合わせ先] 03-6435-7553

<販売元>



山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp

●ご用命は・・・