


超音波多目的治療器

mectron

medical technology

MULTIPIEZO

マルチピエゾ

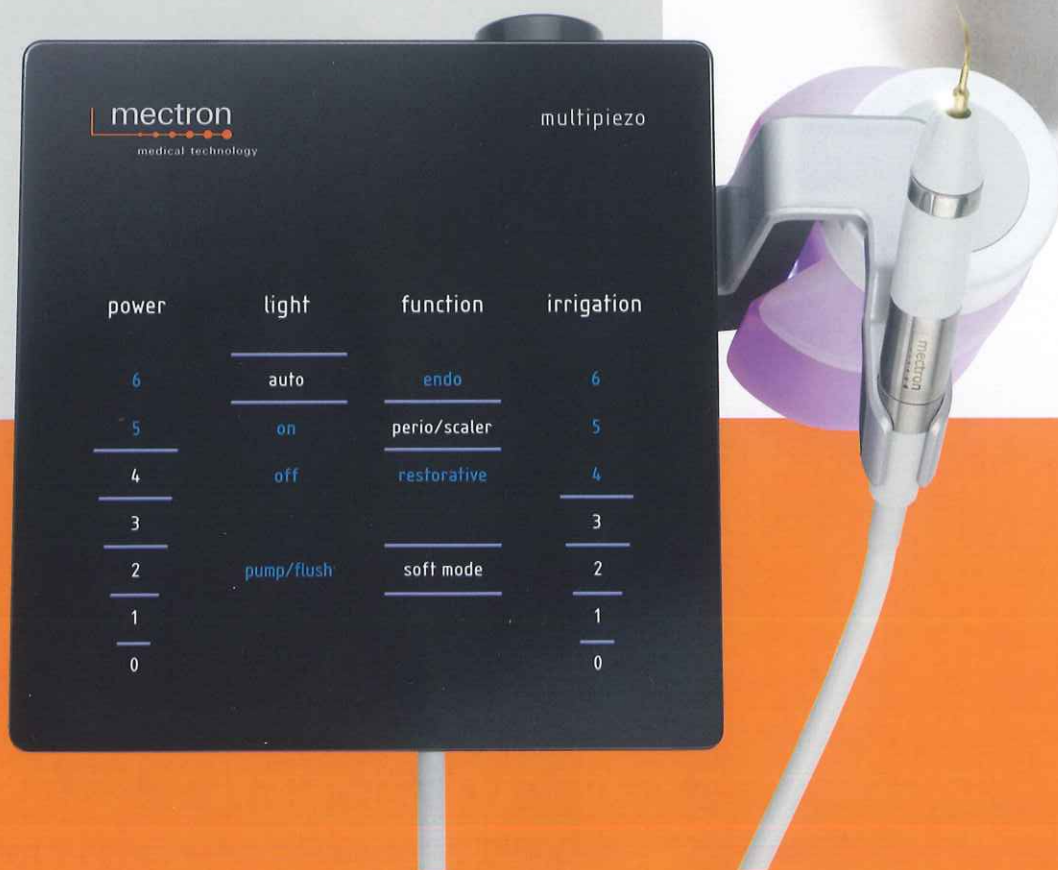

ンティストへ。

EZO



パルスモードや
ことなく振動を弱
争および形成、支
襲で効率的にサ

920001

【包装内容】

ハンドピース(LED付)×1本
インサートチップ S1×1本
インサートチップ S6×1本
インサートチップ P10×1本
チップスタンド
トルクレンチ K6×1個
フットスイッチ×1個

【仕様】

電 源:100-240V 50/60Hz
重 量:2.4kg
サイズ:W230×L320×H145mm(本体)
周波数:24KHz~36KHz
モード:endo
 perio/scaler
 restorative



mectron
medical technology

タッチパネルで簡単操作

パワー、流量や機能がわかりやすく、タッチパネルで簡単に調節できます。

power	light	function	irrigation
6	auto	endo	6
5	on	perio/scaler	5
4	off	restorative	4
3			3
2	pump/flush	soft mode	2
1			1
0	🔧 🔪 🔧 ⚠️		0

セルフチェック機能




異常を感知すると、自動で超音波振動と注水を0.1秒以内に停止します。また、停止原因をディスプレイにアイコンで表示します。

付け替えが簡単なボトル

本体サイドに簡単に付け替えでき、温水や目的に合わせた薬液を選択できます。残量が分かりやすい設計です。



フラッシュ機能

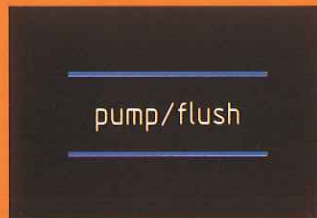

薬液使用后、ボトルを水に代えて使用することで、注水回路を自動的に洗浄します。

LED付きハンドピース

360度回転して位置を調整できるLED付きのハンドピースを標準でご用意しています。治療部位を明るく照らします。点灯もタッチパネルで簡単に選択できます。



それぞれの診療形態に合わせたチップラインナップ

窒化チタンコーティングが施されたチップは、耐摩耗性、耐蝕性、耐久性を高めることでコストパフォーマンスに優れます。

SCALING



S1 S2 S3 S4 S5

スクレーリング用

SCALING HIGH EFFICIENCY



S6 S7 S8

スクレーリング用チップ S1~S3と比較して約2倍のパワーを発揮

IMPLANT CLEANING



ICS IC1

インプラント表面や補綴物のクリーニング用


PERIO



P1 P2 P3 P4

歯肉線下の歯石やバイオフィルム除去用

PERIO ANATOMIC

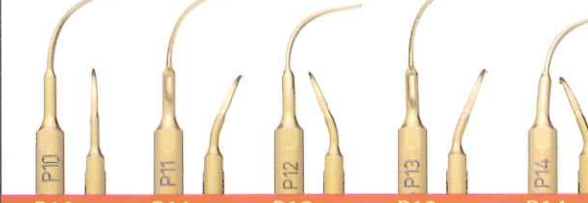

P10 P11 P12 P13 P14

ストレート 右向き(15°) 左向き(15°) 先端φ0.8mm(ラウンド) 右向き(15°) 先端φ0.8mm(ラウンド) 左向き(15°)


ENDO



E1 E2

エンドファイル取付用 挿入角度120° 挿入角度90°

ENDO REVISION



ER1 ER2 ER3 ER4 ER5

先端φ1.7mm 粒度:細(D30) φ0.7mm 作業長10mm 粒度:先端5mm 細(D30) φ0.6mm 作業長10mm 粒度:先端5mm 細(D30) φ0.6mm 作業長20mm 粒度:先端5mm 細(D30) φ0.5mm 作業長24mm

ENDO RETRO



R1 R2 R3 R4 R5

ストレート 前歯部用 逆根管充填用 前歯部用 臼歯部用 右向き 臼歯部用 左向き

ENDO REVISION



RD3 RD4 RD5

逆根管充填用(ダイヤモンドコーティング) 粒度:細(D30) 粒度:細(D30) 粒度:細(D30)

EXTRACTIONS



ME1 ME2 ME3

歯根膜剥離用ブレードタイプ ストレート 左向き 右向き

CROWN PREP




DB1

マージン形成 仕上げ用

	TA	D120	D90	D60
φ1.2mm			TA12D90	TA12D60
φ1.4mm	TA14D120		TA14D90	TA14D60
φ1.6mm	TA16D120		TA16D90	TA16D60

CAVITY MARGIN



CM1 CM2 CM3 CM4

φ1.8mm 粒度:中(D90) 窩洞辺縁形成用 φ1.8mm 粒度:細(D30) 仕上げ用 φ1.5mm 粒度:中(D90) 窩洞辺縁形成用 φ1.5mm 粒度:細(D30) 仕上げ用

RESTORATIVE



D1 D2 D3 D4

コンデンセーション用 ガッタパーチャ 充填用 クラウン 撤去用

【特定保守管理医療機器】
販売名:マルチピエゾ
分類:管理医療機器
認証番号:226AGBZX00067000
一般的名称:歯科用多目的超音波治療器
コード:70719000
製造元:Mectron S.p.A.(イタリア)

※カタログ掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

製造元



製造販売元



東京本社: 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
TEL:03-3831-0176(代)/FAX:03-3835-8254

大阪支店: 〒541-0059 大阪市中央区博労町4丁目4-11 船場西KIDビル2階
TEL:06-6251-5624/FAX:06-6251-5705

九州支店: 〒812-0028 福岡市博多区須崎町4-23
TEL:092-281-5625/FAX:092-291-7553