

優れた強度と極めて滑沢な表面性状をローコストで実現。

CHARM FIL[®]
LIGHT CURING COMPOSITE RESIN

チャームフィル

新発売



ナノハイブリットフロアブル コンポジットレジン
チャーム フィル フロー




ナノハイブリットフロアブル コンポジットレジン
チャーム フィル フローHV
(ハビーボディ)



ナノハイブリット充満用コンポジットレジン
チャーム フィル プラス

◆ 従来型フィラーに比べ長期間審美性が持続

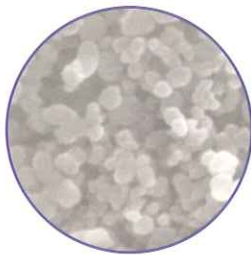


[SEM 像 ×4000 倍]


平均粒径 0.4 μ m(400 ナノメーター) という超微細な表面特殊処理無機フィラー + 独自の高密度均一分離テクノロジーにより、優れた強度と極めて滑沢な表面性状を実現しました。

◆ 優れた物性と辺縁封鎖性

チャームフィル プラス・フローは重合時の発熱が少なく収縮もそれぞれ 1.2%・2.3%と極めて低く、辺縁部漏洩を効果的に防止します。


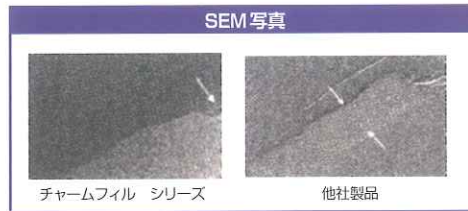


チャームフィル シリーズ 他社製品

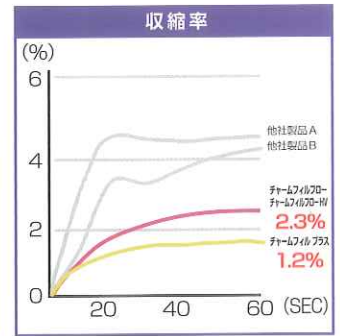

◆ 極めて滑沢な表面性状とツヤ

チャームフィルシリーズは最新のナノフィラーテクノロジーにより研磨が容易、短時間で滑沢なレジン面が得られます。また、摩耗しても超微細のフィラーのため、レジン面の凹凸が小さく摩耗後も長期間ツヤを維持します。

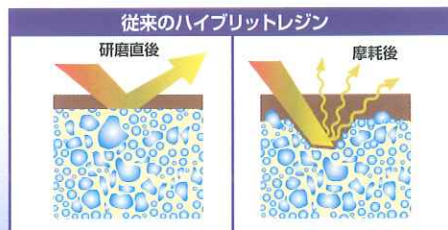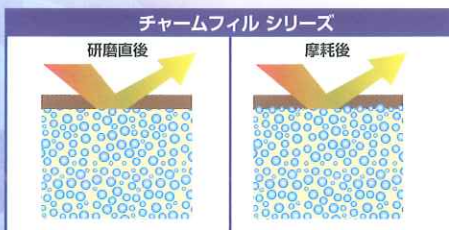


◆ 高いX線造影性

チャームフィルシリーズは・ペーストタイプ・フロータイプ共にバリウムガラスフィラーの配合により高いX線造影性を実現しています
厚さ 2mmのアルミ板に対し 160 ~ 180% 高い造影性を有します。



◆ 高い強度と優れた耐摩耗性

ナノフィラーを高密度に充填されています。そのためチャームフィルは従来型臼歯部用CRを超える高い強度を実現しています。

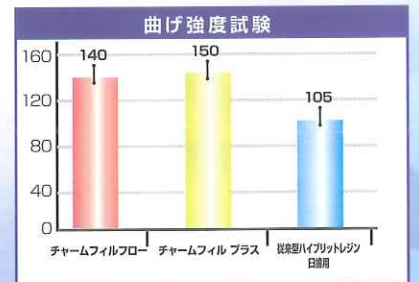

【発売元】

BSA 株式会社ビーエスエーサクライ
〒468-0022 愛知県名古屋市長久寺一丁目117-1
TEL: 052-805-1181 FAX: 052-805-1182
http://www.bsa-sakurai.co.jp
e-mail: contact@bsa-sakurai.co.jp

チャームフィルシリーズはペーストタイプ・フロアブルタイプで全3タイプ

チャームフィル プラス

ベタつかず、インスツルメントで自在に付形。

CHARM FIL
LIGHT CURING COMPOSITE RESIN

PLUS



形態維持の比較 (室温37℃)



※付形直後 (左) と3分後 (右)



ペーストタイプ

管理医療機器 228AKBZX00038000

チャームフィル フロー

流動性が良く窩洞へのなじみが良好。

CHARM FIL
LIGHT CURING FLOWABLE COMPOSITE RESIN

FLOW



抽出後垂直に立て30秒後



フロアブルタイプ

管理医療機器 228AKBZX00037000

チャームフィル フローHV

(ヘビーボディー)

流動性とタレにくさのベストバランス。

CHARM FIL
LIGHT CURING FLOWABLE COMPOSITE RESIN

FLOW HV




抽出後垂直に立て30秒後



フロアブルタイプ

管理医療機器 228AKBZX00037000

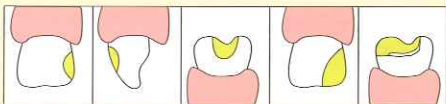

3級窩洞 深い5級窩洞 楔状欠損 臼歯咬合面 4級窩洞 2級窩洞

- ・1~5級の窩洞・前歯部・臼歯部の大きな窩洞の充填に。
- ・チャームフィル フローと組み合わせて臼歯部咬合面の充填に。
- ・ベタつかず、インスツルメントで自在に付形ができます。
- ・天然歯に近いシェード・1.2%の低収縮性率と高い圧縮強度を有します。




色調：4色=A2.A3.A3.5.B2

【セット内容】
4g×1本入り

標準価格 **¥1,200**

高品質
最新CRで
この価格!! 乳歯の
大きな窩洞にも
最適です。

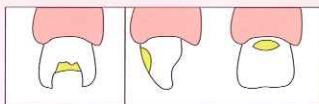


窩洞のライニング 浅い5級窩洞

- ・低収縮性で積層が行いやすいフロアブルレジンです。
- ・凹凸のある窩底や細かい部位に最適。
- ・臼歯部咬合面にもご使用頂けます。
- ・オパール効果で審美性に優れ、充填後は天然歯のような自然な仕上がりに。



- ・薄い5級窩洞・臼歯高底部ライニング
チャームフィルプラスと合わせて。

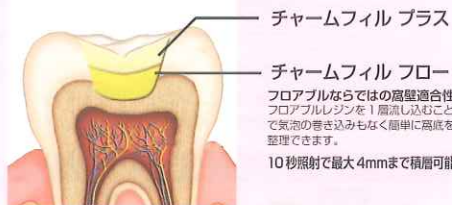

チャームフィル プラス

チャームフィル フロー
フロアブルならではの窩壁適合性
フロアブルレジンで1層塗り込むことで
気泡の巻き込みもなく簡単に窩底を
整理できます。
10秒照射で最大4mmまで積層可能




色調：4色=A2.A3.A3.5.B2

【セット内容】
2g×2本入り
ディスプレイチップ×8

標準価格 **¥1,500**

2g
シリンジ1本あたり
750円

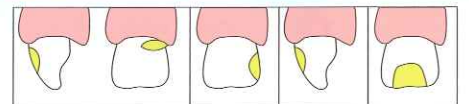

浅い5級窩洞 3級窩洞 深い5級窩洞 臼歯咬合面 楔状欠損

- ・3級、5級窩洞 欠損、矯正用ブラケットへの接着。
- ・チャームフィル フローの高い物性・審美性はそのままに思い通りの形態付与が行えます。

ブラケットライアングルの治療



コアビルトアップ



色調：4色=A2.A3.A3.5.B2

【セット内容】
2g×2本入り
ディスプレイチップ×8

標準価格 **¥1,500**

2g
シリンジ1本あたり
750円



チャームフィル シリーズは世界64カ国で年間150万本が使われるデンキストのベストセラー商品です。この機会にぜひお試しください。

■ご注文は信頼ある