

Re Born

シャープナー


砥石をRe Bornに持ち替えるだけ
どこでも手軽に簡単シャープニング



快適なスケーリングやSRPには、スケーラーの鋭利さが重要、
Re Bornで、簡単、かつ短時間にシャープな刃を取り戻せます。

安定した仕上がり

一定の角度で動かすことが難しい砥石の「動き」と「角度」を機械化することで、スケーラーのエッジをシャープな仕上がりにすることができます。

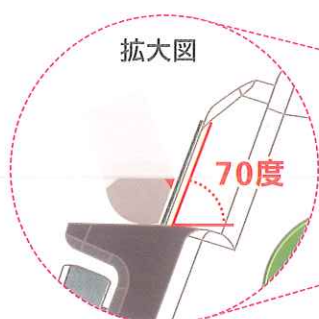

本体底部

本体の底部には円盤が付いており、エッジからトゥ（先端）までを連続的にシャープニングすることが可能です。キュレット本来の丸い先端形状を、長期間保つことができます。



手のひらサイズのコンパクトデザイン

持ち運びやすくコンパクトサイズなので使用場所や保管場所に困りません。

2種類の異なる砥石

セラミック砥石



細目～中目。毎日のメンテナンスに最適です。

ダイヤモンド砥石



粗目。切れ味が著しく鈍ったインスツルメントに。


〈使用方法〉



①キュレットの刃の内面が台と平行になるように置きます。



②キュレットを台の上で砥石方向にスライドさせ、砥石面にブレードの側面を当てます。

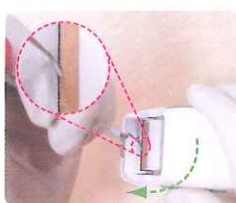

③トゥ（先端）を研ぐ場合はRe Bornを回転させて研ぎます。

〈製品仕様〉

外形寸法 W107×D57×H54mm
 質量 約170g(乾電池除く製)
 砥石 セラミック砥石・ダイヤモンド砥石
 オイル・水(潤滑剤)不要
 オートクレーブ滅菌可能
 上下表裏(計4カ所)使用可能
 本体 プラスチック製、底部に円盤付
 電池式(単三形アルカリ乾電池使用)
 セット内容 本体 1入、セラミック砥石 1入、ダイヤモンド砥石 1入、シャープニングテスター 1入、インスツルメントキャップ 1入、単三形アルカリ乾電池 2入、グレーシーキュレット用ガイド板 1入
 標準価格 48,000円 201010110

〈別売単品〉

Re Born用セラミック砥石 3,650円 201010111
 Re Born用ダイヤモンド砥石 3,650円 201010112

●標準価格の後の数字は品目コードです。●掲載商品の標準価格は、2016年10月21日現在のものです。標準価格には消費税は含まれておりません。

総店 株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28 〒355-0042

完全 株式会社 モリタ 大阪府枚方市南浜1-3-18 〒564-8650 ☎06-6380-2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 ☎03-3634-6161

www.dental-plaza.com

志磨会社 静岡県浜松市東区東山1-1-15 〒410-2220(フリーコール)

PUB NO. M207.2476-1-000.1619.72.3005-10 208530168