



DISINFECTING AND
SECURING ACCURACY DOSE
FOR DENTAL IMPRESSION

CHLOR ANCHOR

クロルアンカー
歯科印象用除菌固定剤 錠剤

目に見えないからこそ、徹底しなくてはならない衛生対策。
クロルアンカーを使ったスタンダードプリコーションの実践により、院内衛生管理に役立ちます。
印象模型は補綴物製作のベースとなる、いわば設計図です。
もし設計図の段階で誤差が生じると、後々の工程に大きな影響を与えてしまいます。
クロルアンカーは印象体の寸法変化を安定させます。




- タブレットタイプ
- 塩素濃度 1300ppm
- 印象体の寸法安定

お手軽な除菌固定剤

特長

- 1 取り扱いが簡単です。
タブレットタイプで、水に入ると発泡して溶けます。
直接手に触れることなく水に投入できます。
- 2 高い塩素濃度による除菌力
1ℓの水に溶かすと、塩素濃度が1300ppmになります。
- 3 印象体固定効果について
3時間程度の浸漬でも寸法は安定しています。

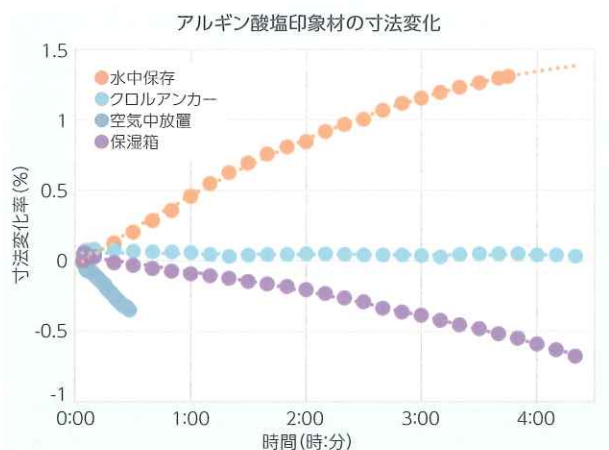

用途

アルギン酸塩印象材の除菌及び寸法精度固定

使用方法

- 1 樹脂の容器に水1ℓに対し、12g(1包)を入れます。
※かき混ぜるとより速く溶解します。
- 2 流水で洗浄した印象体を溶液に浸漬します。
- 3 15分～1時間後に印象体を取り出し、水洗してください。
※印象体の汚れ具合に応じて浸漬時間を調整してください。
- 4 余分な水分を除去して、石膏を注入してください。
※注入前に【スムーズメーカー】で処理するとより滑沢な石膏模型を得られます。

包装

錠剤 12g×30包/箱

使用上の注意事項

- 1 本剤は歯科医療従事者が使用してください。
- 2 本剤は食べ物ではありません。飲み込むと有害です。誤って飲み込んだ場合は無理に吐かせず、口をよくすすいでください。気分が悪い時は、医師の診断を受けてください。
- 3 錠剤に素手で触れない様で使用してください。本剤が皮膚に付着した場合は、大量の流水で洗ってください。皮膚刺激や発疹がある場合は専門医の診断を受けてください。目に入った場合には、大量の流水でよく洗い、眼科医の診断を受けてください。
- 4 他の製剤(酸・アルカリ・脱塩素剤・油脂類・他の塩素系薬剤等)と直接接触・混合しないでください。スムーズメーカーの原液とは接触・混合しないようにしてください。
- 5 本剤は、説明書に記載の用途以外には使用しないでください。
- 6 歯科医療従事者以外が触れない場所に保管してください。

関連商品



スムーズメーカー 歯科印象用滑沢剤
200gボトル

販売元:サンエス石膏株式会社

サンエス石膏株式会社

大阪本社 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
大阪営業所 TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

東京営業所 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利タビル5F
TEL(03)5283-6201 FAX(03)5283-6205

中部営業所 〒489-0983 瀬戸市苗場町113
TEL(0561)82-9185(代) FAX(0561)85-4179

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>
E-mail : headquarter@san-esugypsum.co.jp

サンエス石膏

検索

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ