

ジーシー MIオペーカー



光重合型コンポジットレジンオペーカー

金属面や変色・着色歯を効率良く遮蔽。
MIフィリングシリーズがますます便利に。

露出根面の変色を審美的回復 〈 MIオペーカー + MIローフロー(A4) 〉



硬質レジン前装冠の歯頸部破折リペア 〈 MIオペーカー + MIフィル(A03+A3) 〉



ジーシー MIオペーカー

色調●1色=0U(ユニバーサル)
包装・希望医院価格●1包:1.9g(1.0mL)入
シリンジ1本、フィリングチップⅢプラスチック2個、
フィリングチップⅢニードル1個、フィリングチップ用
キャップ1個=¥2,900
管理医療機器 228AABZX00093000


MI FILLING SERIES



優れた遮蔽性

MIオベーカーは遮蔽性に優れ、変色歯や着色歯、破折した前装冠の金属面を効果的に遮蔽できます。

■透過率

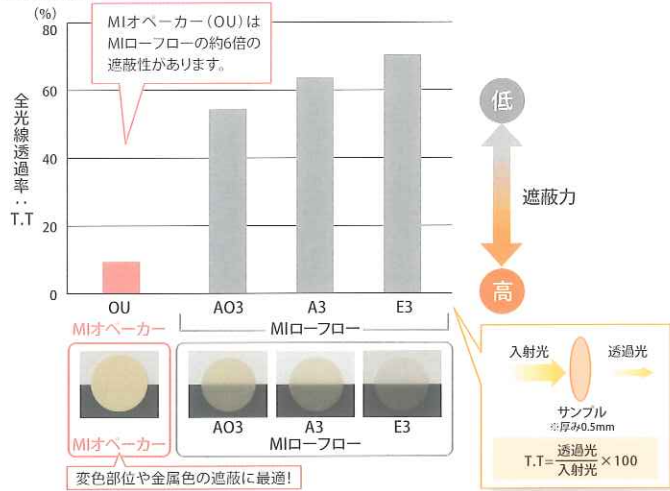

■遮蔽性シミュレーション

前装冠を作製後、下半分をバーで切削し、硬質レジン部を削除した




従来のMIファイリングシリーズ・コンポジットレジンのオベークシェードでは積層しても十分な金属面の遮蔽性が得られないのに対し、MIオベーカーを用いた場合は確実な遮蔽性が得られた。


ジーシー独自のナノフィラーテクノロジーによる高い強度

MIファイリングシリーズに共通のナノサイズフィラーを採用。長期的に審美性を維持する高い強度を実現しています。

■SEM像(×1000)

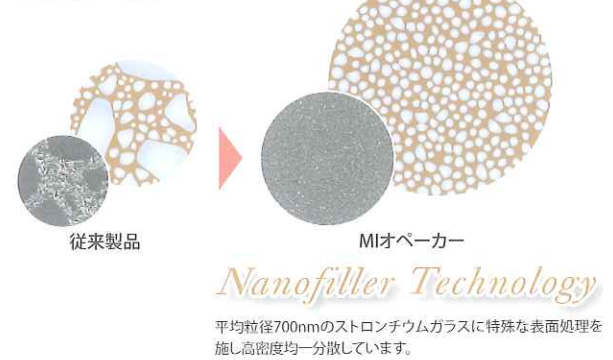

■3点曲げ強さ

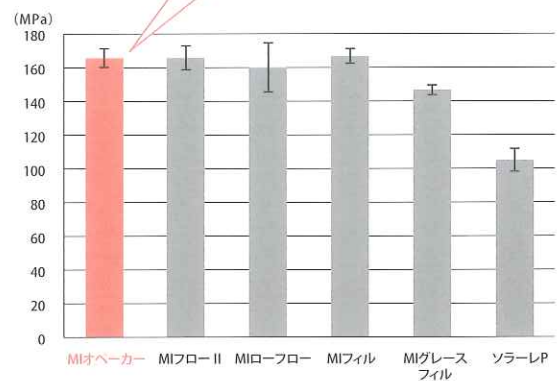

硬質レジン前装冠歯頸部破折のリペアー



G-マルチプライマー
2種の接着性モノマーに、シランカップリング剤を配合し、すべての材料に対応する強固な1液性のプライマーです。
管理医療機器 228AABZX00003000

G-プレミオ ボンド
塗布後、待ち時間なしで乾燥・光照射が行えるボンディング材。補綴物の口腔内リペアーにも便利です。
管理医療機器 226AABZX000098000



<使用上のご注意> 一回の塗布厚さは0.5mmまでとし、10秒光照射(LED)してください。光照射し難い部位は長めに照射してください。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の実測データは、2017年2月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286