

# EVE

made  
in  
Germany



ブラシ形状で、

- ① 歯面・咬合面等、あらゆる箇所
- ② 特に咬合面等の複雑な裂溝部を艶やかに仕上げる。

## ブラシ状ダイヤモンドポリッシャー EVE ダイヤポール ツイスト

ジルコニア・ニケイ酸リチウムガラスセラミック・ポーセレン・メタル、  
そしてハイブリットレジン等の中研磨から最終光沢研磨

コントラアングル・ハンドピース

### コントラアングル



品番	DT-W14Dg	DT-W14Dmf	DT-W14D
粗さ	コース	ミディアム	ファイン
価格	¥1,500/1本	¥1,500/1本	¥1,500/1本

推奨回転数：7,000～12,000rpm (ファインのみ 3-6,000rpm)  
最大回転数：20,000rpm (ファインのみ 8,000rpm)



### ハンドピース



品番	DT-H17Dg	DT-H17Dmf	DT-H17D
粗さ	コース	ミディアム	ファイン
価格	¥2,500/1本	¥2,500/1本	¥2,500/1本

推奨回転数：7,000～12,000rpm (ファインのみ 3-6,000rpm)  
最大回転数：15,000rpm (ファインのみ 8,000rpm)

お得な  
セットを  
新発売!



NEW

EVE ダイヤポール ツイスト ポリッシャーセット CA 用  
価格 ¥7,200

DT-W14Dg、DT-W14Dmf、DT-W14D 各 2 本ずつセット

口腔内でご使用の際は、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、オートクレーブ滅菌を行ってからご使用ください。乾燥工程はお避けください。

注意 ご使用の際は、過度な速度での作業と過度な押し付けはお避けください。口腔内でご使用の際は、注水下で治療してください。

EVE ダイヤポール /27B2X00041000094/ 歯科用コム製研磨材 EVE ダイヤポール ツイスト ポリッシャーセット CA 用 /27B2X00041000180/ 歯科技工用研削・研磨器材キット  
一般医療機器 ドイツ製 EVE ERNST VETTER GmbH



## ダイヤコンプラス ツイスト

形態修正～荒研磨後の  
全てのコンポジットを2ステップで研磨！

ダイヤモンド砥粒含有でカンタン & 素早く研磨  
柔軟性があり複雑な面もしっかり研磨

オートクレーブ滅菌 & 再利用可能

### 使用可能材料

- コンポジットレジン
- 硬質レジン
- 即時重合レジン
- 充填用レジン強化型ガラスアイオノマーセメント
- ハイブリットセラミックス
- メタル

咬合面



切歯



唇側



頬側



舌側



隣接面



### 使用方法

形態修正後に、注水下・推奨回転数・軽いタッチで使用します。  
注水することで熱の発生を防ぎます。  
注意：注水無しでも使用可ですが、発熱に注意してください。

### 形態修正～荒研磨

市販のカーバイドバー等

### 光沢研磨

ダイヤコンプラス ツイスト ミディアム

### 最終光沢研磨

ダイヤコンプラス ツイスト ファイン

研磨部寸法：10 x 1.6mm  
推奨回転数：3,000-8,000rpm  
最大回転数：20,000rpm  
価格：¥1,500/1本

アイテム No.  
粒度



DT-DCP10m  
ミディアム



DT-DCP10f  
ファイン

### セット品

EVE ダイヤコンプラス  
ツイスト ミックス 10  
品番 DT-DCP10m x 3本  
DT-DCP10f x 3本  
価格 ¥8,000

