

デンタルマスク

コムフィットマスク

高い遮断効率と通気性を両立、
刺激の少ない素材で作られたマスクです。



コムフィットマスク
敏感肌



コムフィットマスク
快適呼吸



コムフィットマスク
スーパーフィルター



コムフィットマスク

com-fit mask

- 高い遮断効率と通気性を両立
- 低刺激、ラテックスフリーで肌に優しい
- ゴムをマスクの外側で留め、皮膚への刺激を低減
- フチは細菌の侵入を防ぐ超音波接着



コムフィットマスク 敏感肌

肌にやさしい

- 肌に刺激となる材料を排除しました。肌を刺激しない素材で敏感肌、ラテックスアレルギーのある方も安心です。(インク、染料、香料、ラテックス不使用)
- 成型したノーズピースにより正しくぴったり装着できます。
- PFE※ 99% (0.1ミクロン)

■標準価格 【50枚入(白色)】 2,200円 620040



コムフィットマスク 快適呼吸

呼吸が楽に行える

- 遮断率が高いまま、通気性が良いため呼吸がしやすくなっています。
- 成型したノーズピースにより正しくぴったり装着できます。
- PFE※ 97% (0.1ミクロン)

■標準価格 【40枚入(水色)】 2,700円 620041



コムフィットマスク スーパーフィルター

特殊撥水層が飛沫を遮断する

- 表層に特殊素材DELNETを使用し、高い撥水効果があります。
- PFE※ 99% (0.1ミクロン)
- 観血処置などに効果を発揮します。
- フォーム状のノーズピースでメガネの曇りを防ぎます。

■標準価格 【40枚入(水色)】 2,700円 620042

※PFE(微粒子ろ過効率)試験粒子(0.1ミクロン)が除去された割合で、数値が高いほうが性能が高い。

マスクの正しい装着方法



1 ノーズピースがある方を上にして装着し、鼻と口を完全に覆います。



2 口の周りの側面を抑えて顔に沿わせます。



3 ノーズピースを鼻にぴったり固定します。



4 飛沫がある場合は、サイドまでレンズのあるグラスを着用します。



× マスクを鼻の下で装着しないでください。



× マスクを顎の下にかけないでください。

●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。 ●掲載商品の標準価格は、2014年7月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

製造 サルタン

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
www.dental-plaza.com

●この印刷物は、環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。

PUB No. M207.816-4-000.1408.1,000KP-SU-IT