

咬合堤軟化器が小型になって新登場

なん mini ちゃん

訪問診療に持ち込み易い小型ボディ

定評のあるハニカムによる軟化構造を継承

- **短時間**
約10秒で軟化が完了
- **均一**
任意の深さまで均一に軟化します
- **適温**
適温軟化は患者に
不快感・不安感を与えません
- **確実**
患者の噛み過ぎによる
失敗がありません
- **クリーン**
ワックスのたれを防止



販売名 なんちゃんミニ
 一般的名称 歯科材料加温器
 分類 一般医療機器
 医療機器届出番号 26B2X10018000044

デンケン・ハイデンタル 株式会社
 DENKEN-HIGHDENTAL Co.,Ltd.

短時間・均一・適温・確実・クリーン軟化を小さくまとめました

KDF

なんちゃんミニは義歯を製作する過程で、ワックス咬合堤を軟化する装置です。
従来器「なんちゃん2」で確立した咬合堤軟化性能を継承し、ギュッと小型にしました。



なんちゃん mini

特徴

小型・軽量・スマートなデザイン




訪問診療を考慮し従来器と比べ小型軽量になりました。診察室にマッチする清潔感のあるデザインです。

簡単操作




電源スイッチを入れるだけの簡単操作です。操作パネルもシンプルです。温度設定はHigh/Lowの2段階です。

ワックスの清掃方法を改善

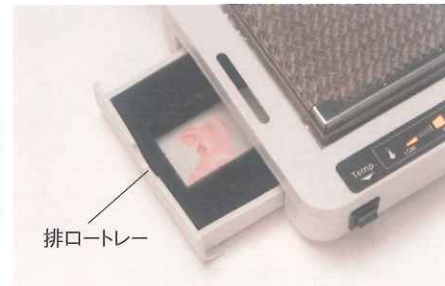

排口トレーがシリコン製となり廃棄ワックスの取りのぞきが簡単にできます。

咬合堤軟化手順

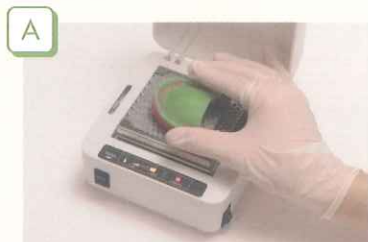

A ハニカム部に咬合堤を押し当てて軟化させます。設定温度は任意に設定して下さい。




B 咬合堤の位置をすらすら角度を変えたりして、2~3回ハニカム部に押し当てます。



C ベースプレートが当たる場合はハニカム部の端を使用して軟化させて下さい。



D パーシャル症例の場合は、石膏模型からはずして軟化して下さい。

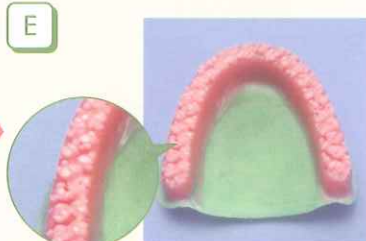

E 【軟化完了】
均一に軟化された状態です。



咬合平面の作り方

ドットホール部にロー堤を置き、前後に動かします。

仕様

名称	なんちゃんミニ
型式	DT-300
電源電圧	100V±10% 50/60Hz 2Pプラグ仕様(国内仕様のみ)
消費電力	Max. 200W
外形寸法	(W) 140×(H) 95×(D) 145mm
質量	0.7kg
スタンバイ時間	Highまで約5分

関連商品

メルトベースプレート ハード・ソフト MELT BASE PLATE




用途：ベースプレート(基礎床)

商品名	メルトベースプレート	メルトベースプレート ハードタイプ
届出番号	26B2X10018M00085	26B2X10018M00087
一般名	歯科用ベースプレート	
クラス分類	クラスI(一般医療機器)	


- パラフィンワックスより強度があり、熱湯で簡単に溶けるベースプレートです。
- 試過再現性の向上
従来のベースプレートは撤去が必要なためクラスプや人工歯が動く可能性がありました。メルトベースプレートは溶融性ですので試過の状態はそのまま義歯を完成できます。
- 咬合採得時の精度向上
曲げ強度がパラフィンの約3倍なので従来のパラフィンより咬合採得時や試過時の変形が起こりにくいです。
- 辺縁調整が容易パラフィンワックスと同じような操作性ですので、熱したインツルメントで軟化や削除が可能。またワックスを定すこともできます。
- カラー/イエロー、ピンク

さわやかデント SAWAYAKA DENTO

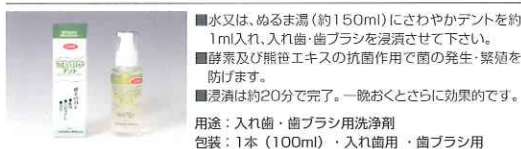

- 水又は、ぬるま湯(約150ml)にさわやかデントを約1ml入れ、入れ歯・歯ブラシを浸漬して下さい。
 - 酵素及び熊世エキスの抗菌作用で菌の発生・繁殖を防げます。
 - 浸漬は約20分で完了。一晩おくとさらに効果的です。
- 用途：入れ歯・歯ブラシ用洗浄剤
包装：1本(100ml)・入れ歯用・歯ブラシ用

デンタル:クリーン DENTAL CLEAN

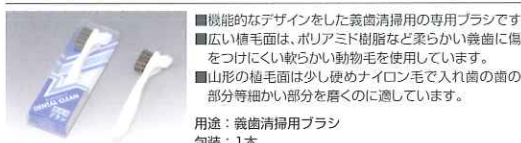

- 機能的なデザインをした義歯清掃用の専用ブラシです。
 - 広い植毛面は、ポリアミド樹脂など柔らかい義歯に傷をつけにくい軟らかい動物毛を使用しています。
 - 山形の植毛面は少し硬めのナイロン毛で入れ歯の歯の部分等細かい部分を磨くのに適しています。
- 用途：義歯清掃用ブラシ
包装：1本

※外観・仕様につきましては予告なしに変更する場合があります。

●代理店

●販売元 ●製造販売 許可番号 26B2X10018

エアウォータグループ



デンケン・ハイデンタル 株式会社

http://www.kdf.co.jp/ Email denken@kdf.co.jp

■お問合せは

西日本営業所
TEL.075-571-1000
FAX.075-572-9000

東日本営業所
TEL.03-3969-8000
FAX.03-3969-4567

九州営業所
TEL.092-710-5360
FAX.092-710-5361